
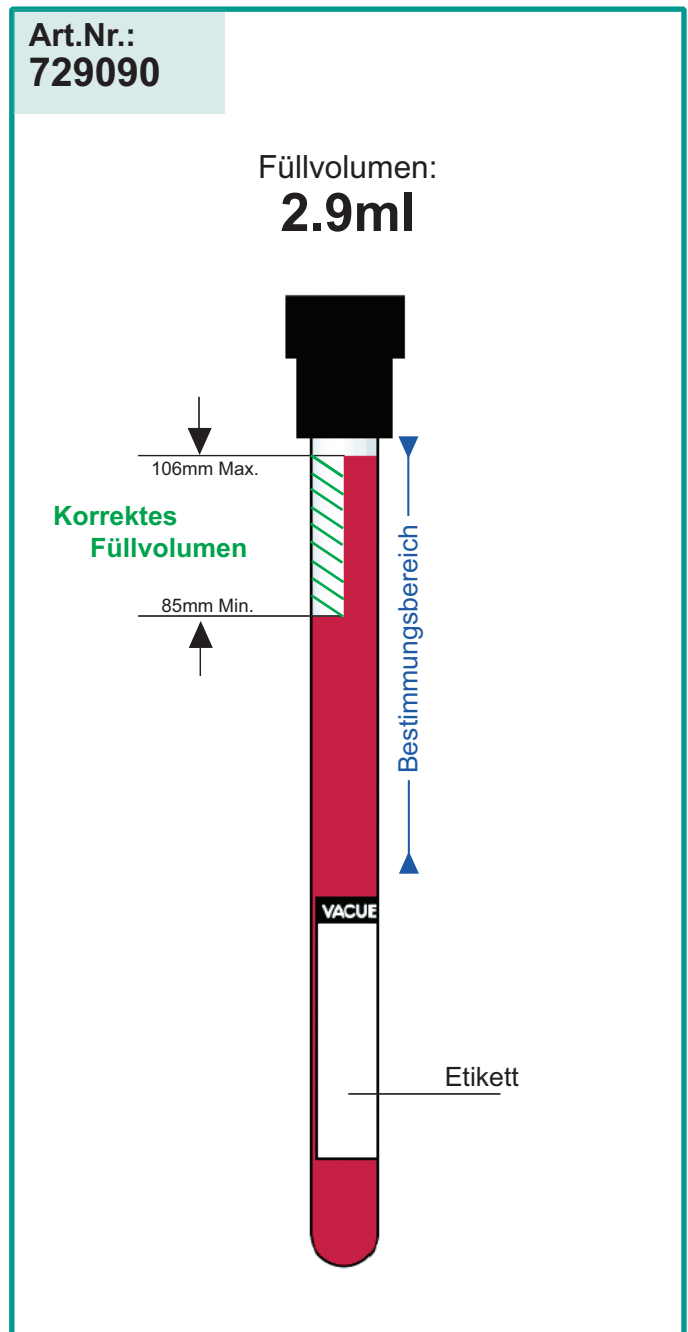


Um das korrekte Füllvolumen der entnommenen Blutmenge zu überprüfen, vergleichen Sie bitte die Füllhöhe des Röhrchens mit dieser Füllmengenübersicht. Wenn die Füllhöhe zwischen der Markierung **"Korrektes Füllvolumen"** liegt, dann ist das Röhrchen vollständig befüllt.

Füllmengenübersicht

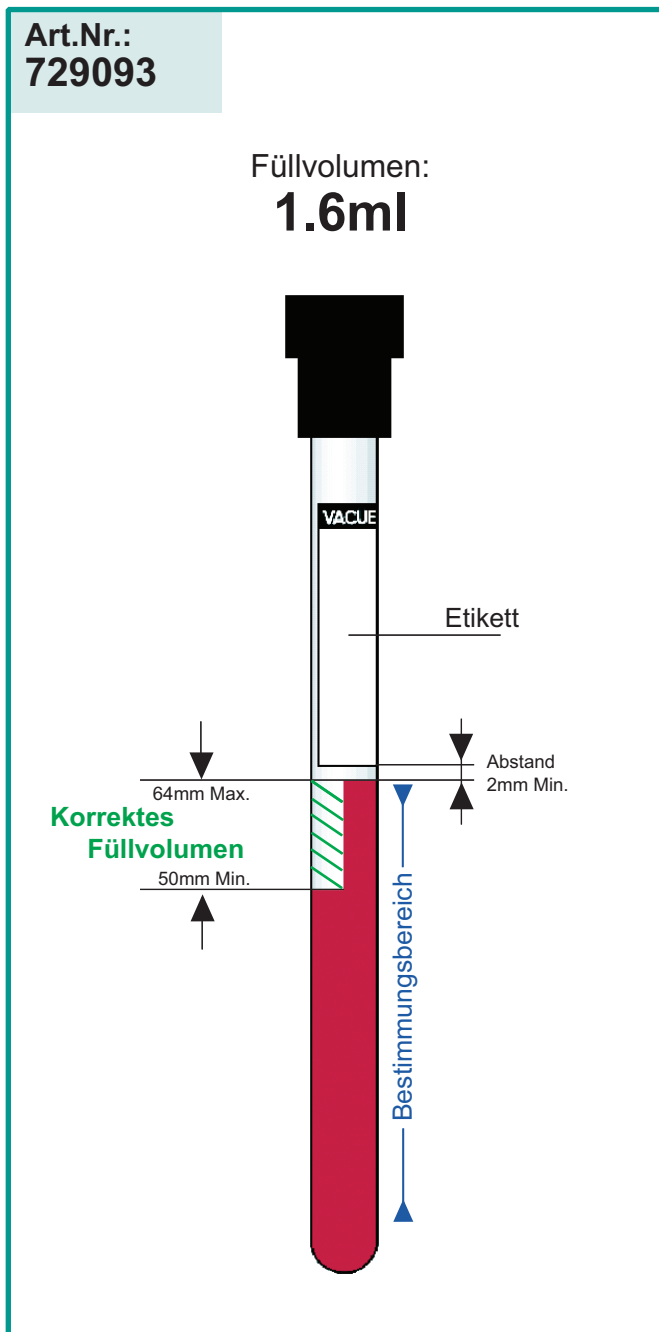

Bitte überkleben Sie den **"Bestimmungsbereich"** nicht mit Barcodes - in diesem Bereich findet die Messung statt.

Tragen Sie Handschuhe während der Blutentnahme und der Arbeit mit Blutentnahmeröhrchen, um die Gefahr der Kontamination mit Blut zu verringern!