

**Sistema VACUETTE® Para A Colecta Segura De Sangue/  
Para Infusões Seguras  
Instruções de Uso**

**Uso**

O Sistema **VACUETTE®** para a Colecta Segura de Sangue utiliza-se em processos de rotina diária de venipunctura. O Sistema **VACUETTE®** para Infusões Seguras utiliza-se para a colecta de sangue e/ou uma infusão intravenosa breve com líquidos. A agulha alada é concebida com uma manga protectora que, imediatamente depois de realizada a colecta de sangue/a infusão, deve ser activada para cobrir a agulha de modo a fornecer uma protecção essencial contra acidentes por picadas de agulha. Este produto deve ser utilizado apenas por pessoal adequadamente treinado e de acordo com estas Instruções de Uso.

**Descrição do Produto**

O Sistema **VACUETTE®** para a Colecta Segura de Sangue é um produto estéril de uso único e consiste de uma agulha alada segura ligada a um tubo flexível em cuja extremidade se encontra uma conexão Luer. Está disponível em várias combinações. O Sistema **VACUETTE®** para a Colecta Segura de Sangue/para Infusões Seguras é embalado de forma individual, estéril e pode ser utilizado em conjunto com um sistema Luer (p. ex. Holdex®). Este produto não contém borracha natural seca.

**Sistema VACUETTE® para a Colecta Segura de Sangue/para Infusões Seguras**

Tipo	Descrizione
Sistema <b>VACUETTE®</b> para a Colecta Segura de Sangue/para Infusões Seguras	embalado de maneira individual e estéril, pode ser utilizado em conjunto com um sistema Luer
Sistema <b>VACUETTE®</b> para a Colecta Segura de Sangue, com adaptador Luer	embalado de maneira individual e estéril, com adaptador Luer (para a utilização em conjunto com equipamentos tais como o adaptador padrão de Tubos <b>VACUETTE®</b> )
Sistema <b>VACUETTE®</b> para a Colecta Segura de Sangue, com adaptador Luer e adaptador	embalado de maneira individual e estéril, pronto para ser utilizado na colecta de sangue
Sistema <b>VACUETTE®</b> para a Colecta Segura de Sangue, com HOLDEX®	

**Informações de Segurança**

Se cumprir as instruções, o dispositivo funcionará como deve ser.

- Por favor, nunca puxe a agulha alada de maneira forçada e nunca active o mecanismo de protecção de forma prematura. Isso poderia prejudicar o funcionamento normal deste dispositivo.
- Antes de utilizar estes produtos, inspecione cada uma das embalagens quanto a danos. Quando estas estiverem danificadas, nunca utilize os produtos que contêm.
- Elimine imediatamente e nas caixas de eliminação previstas para este fim quaisquer Sistemas **VACUETTE®** para a Colecta Segura de Sangue usados.
- Não reactive ou desbloqueie de maneira forçada o mecanismo de protecção depois de este já ter sido activado.
- Durante o uso e o processo de eliminação, mantenha as suas mãos sempre atrás da agulha.

**Informações de Advertência**

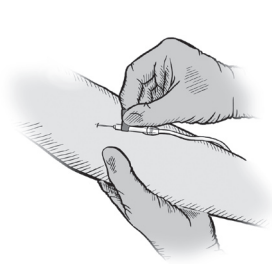
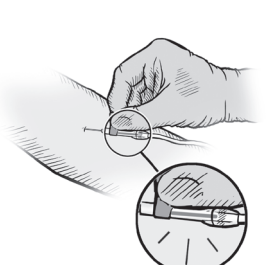

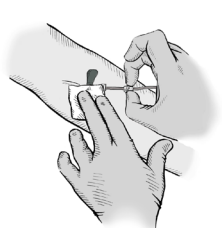

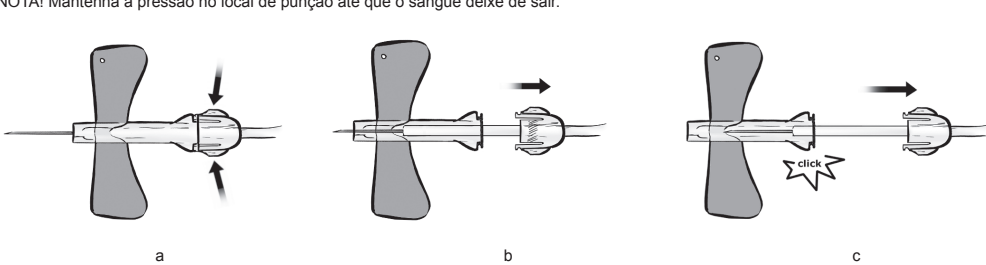
- Manuseie todas as amostras biológicas e quaisquer instrumentos utilizados na colecta de sangue (por ex. lancetas, agulhas, adaptadores Luer e sistemas para a colecta de sangue) de acordo com as regras de higiene e segurança em vigor.
- HBV, HCV, HIV e outras doenças contagiosas podem-se transmitir pelo contacto com amostras biológicas.
- No caso de uma exposição a tais amostras biológicas o que pode significar um risco de infecção, recomenda-se consultar um médico imediatamente.
- Uma vez utilizada, cada agulha será considerada contaminada e, imediatamente depois de ter sido retirada, deveria ser descartada num recipiente de eliminação apropriado para amostras biológicas. A reutilização do produto pode levar a infecções, lesões ou até à morte.
- Depois de usados, elimine quaisquer instrumentos utilizados na colecta de sangue (por ex. lancetas, agulhas, adaptadores Luer e sistemas para a colecta de sangue) usando as caixas de eliminação previstas para este fim.
- Utilize sempre luvas durante o processo de venipunctura e o trabalho com tubos para a colecta de sangue para reduzir ao mínimo o risco de contacto directo com o sangue.
- O plastificante DEHP está contido no canal de líquidos do tubo flexível do sistema para a colecta segura de sangue/para infusões seguras. Lixiviação do DEHP é possível em contato com lipídios. Deve-se ter particular cuidado no uso deste produto em mulheres grávidas ou lactantes e em crianças.
- Proceda com particular cuidado durante a colecta de sangue de pacientes imobilizados, hemofílicos e epiléticos.
- Não cubra o mecanismo de protecção com fita adesiva.
- Quando tirar o produto para fora ou durante o processo de eliminação, tenha atenção a uma possível saída de sangue ou medicação.

**Como armazenar os Sistemas VACUETTE® para a Colecta Segura de Sangue/para Infusões Seguras antes da sua utilização**

Temperatura recomendada para o armazenamento: 4–36°C (40–97° F). NOTA! Evite o contacto com a luz solar directa. Temperaturas acima da temperatura máxima recomendada para o armazenamento podem prejudicar a qualidade dos Sistemas **VACUETTE®** para a Colecta Segura de Sangue/para Infusões Seguras.

**Manuseamento do Sistema VACUETTE® para a Colecta Segura de Sangue/para Infusões Seguras**

- Durante um processo de venipunctura, escolha os tubos adequados e o Sistema **VACUETTE®** para a Colecta Segura de Sangue/para Infusões Seguras.
- Retire o Sistema **VACUETTE®** para a Colecta Segura de Sangue/para Infusões Seguras da sua embalagem. Assegure que a agulha alada esteja ligada seguramente ao mecanismo de protecção. NOTA! Caso a embalagem já tenha sido aberta ou danificada, por favor elimine o Sistema para a Colecta Segura de Sangue/para Infusões Seguras e escolha um que esteja intacto.
- Escolha o local de punção. Garroteie a veia e desinfecte o local de punção. Não apalpe a veia depois da limpeza do local! Agarre o Sistema **VACUETTE®** para a Colecta Segura de Sangue/para Infusões Seguras nas abas e, procedendo com muito cuidado, elimine a tampa protectora da agulha.

D. Colecta de sangue/Infusão	E. Activação do mecanismo de protecção
<p>Fig.1 Realize a venipunctura, com o braço do paciente apontado para baixo.</p>  <p>Fig.2 Nota-se que a venipunctura foi realizada com êxito quando a parte transparente atrás da agulha se enche com sangue. Caso necessário, fixe as abas da agulha usando adesivos</p> <p>Inicie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a venipunctura</li> <li>ou</li> <li>• a infusão</li> </ul> <p>NOTA! Retire a tampa da conexão Luer antes de ligar o tubo flexível de infusão.</p> 	<p>Fig.3 Depois de realizada a colecta de sangue, fixe as abas da agulha usando uma mecha. Com a outra mão, desbloqueie a corrediça da agulha alada, premindo no mecanismo de protecção em ambos os lados.</p> <p>NOTA! Nunca exerça uma pressão excessiva no local de punção.</p>  <p>Fig.4 Puxe a corrediça do mecanismo de protecção para trás até que se ouça um somo „clique“. Este clique indica que o mecanismo de protecção tenha sido activado de forma correcta.</p> <p>NOTA! A pressão no local de punção deveria ser mantida de acordo com as regras locais de segurança em vigor.</p> 
<p>F. Eliminação</p> <p>Fig.5 Elimine imediatamente o Sistema <b>VACUETTE®</b> para a Colecta Segura de Sangue/para Infusões Seguras usado nas caixas de eliminação previstas para este fim e de acordo com as regras locais de segurança em vigor.</p> 	<p>Activação do mecanismo de protecção</p> <p>Depois de terminada a colecta de sangue, recomenda-se activar o mecanismo de protecção antes de tirar a agulha para fora da veia do paciente.</p> <p>NOTA! Nunca exerça uma pressão excessiva no local de punção.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Para desbloquear o mecanismo de protecção, aperte em ambos os lados.</li> <li>Deslize a corrediça do mecanismo de protecção para baixo.</li> <li>Um som „clique“ indica que o mecanismo de protecção foi activado correctamente.</li> </ol> <p>Verifique se o mecanismo de protecção engatou de forma segura e não se deixa movimentar. A agulha tem de estar inteiramente coberta pela manga protectora.</p> <p>NOTA! Mantenha a pressão no local de punção até que o sangue deixe de sair.</p> 

<p><b>Informações constantes do rótulo</b></p> <p><b>Ref.</b> número de artigo</p> <p><b>LOT</b> número do lote (LOT)</p> <p>prazo de validade: pode-se utilizar o produto até ao fim do mês indicado</p> <p>STERILE EO símbolo para "esterilização com gás óxido de etileno"</p> <p>⊗ símbolo para produtos de uso único</p>	<p><b>Referências:</b></p> <p>CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) H3-A6 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-Sixth Edition</p>
---	---

