



VACUETTE® Sicherheitsblutentnahmeset + Blutkulturflaschenhalter



- ↳ Steril sowie bereits vormontiert für die einfache Handhabung
- ↳ Ein Halter für die Entnahme in Blutkulturflaschen und VACUETTE® Vakuumröhrchen
- ↳ Bietet alle bekannten Sicherheitsvorteile des VACUETTE® Sicherheitsblutentnahmesets

VACUETTE® Sicherheitsblutentnahmeset + Blutkulturflaschenhalter

Das Sicherheitsblutentnahmeset mit bereits vormontiertem Halter wurde speziell für die in einem Arbeitsschritt durchführbare Entnahme mit gängigen Blutkulturflaschen sowie **VACUETTE®** Blutentnehmeröhrchen entwickelt. Für die einfache Verwendung wird das Set steril sowie in bereits gebrauchsfertigem Zustand angeboten. Durch die flexible Verwendung wird die Anzahl der Entnahmen reduziert und somit eine kostengünstige und patientenschonende Arbeitsweise unterstützt. Um allen Ansprüchen gerecht zu werden, gibt es den Blutkulturflaschenhalter auch mit Standardblutentnahmeset ohne Sicherheitsmechanismus.



Geeignet für BacT/Alert and BacTec Blutkulturflaschen

Anwendung

Version a = Sicherheitsblutentnahmeset; **Version b** = Blutentnahmeset



1 Reinigen Sie die Punktionsstelle sowie die Gummikappe der Blutkulturflasche gemäß den Sicherheitsrichtlinien Ihrer Institution.



2 Markieren Sie die korrekte Füllmenge auf dem dafür vorgesehenen Feld am Flaschenetikett.




3a Führen Sie die Venenpunktion mit dem **VACUETTE®** Sicherheitsblutentnahmeset durch.



3b Führen Sie die Venenpunktion mit dem **VACUETTE®** Blutentnahmeset durch.



4 Drücken Sie das hintere Ende des Halters auf die Kappe der aeroben Blutkulturflasche, so dass sich sowohl der Halter als auch die Flasche in einer Position unterhalb der Punktionsstelle befinden. Sobald die Flasche befüllt ist, entfernen Sie diese aus dem Halter und fahren Sie entweder mit der Befüllung einer anaeroben Flasche oder mit **VACUETTE®** Blutentnehmeröhrchen fort.

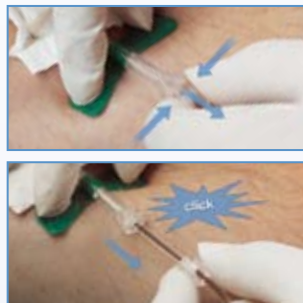

5a Nach Beendigung der Blutentnahme drücken Sie sanft mit einer Hand den Tupfer auf die Punktionsstelle. Mit der anderen Hand entriegeln Sie den Schieber der Flügelkanüle durch Druck des Sicherheitsmechanismus an beiden Seiten. Ziehen Sie den Schieber nach hinten bis Sie deutlich ein "Klicken" hören. Das "Klicken" ist das Zeichen einer korrekten Aktivierung des Sicherheitsmechanismus.



5b Nach Beendigung der Blutentnahme drücken Sie sanft mit einer Hand den Tupfer auf die Punktionsstelle und entfernen Sie mit der anderen Hand die Kanüle sanft aus der Vene.



6 Entsorgen Sie das gebrauchte Kombiprodukt in eine dafür vorgesehene Entsorgungsbox gemäß den Sicherheitsrichtlinien Ihrer Institution.

Artikel-Nummern

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackung	
			innen	außen
VACUETTE® Sicherheitsblutentnahmesets + Blutkulturhalter (steril)				
450182	Sicherheitsblutentnahmeset + Blutkulturhalter	Schlauchlänge: 19cm 21G x 3/4"	24 Stk.	240 Stk.
450183	Sicherheitsblutentnahmeset + Blutkulturhalter	Schlauchlänge: 19cm 23G x 3/4"	24 Stk.	240 Stk.
450184	Sicherheitsblutentnahmeset + Blutkulturhalter	Schlauchlänge: 30cm 21G x 3/4"	24 Stk.	240 Stk.
450185	Sicherheitsblutentnahmeset + Blutkulturhalter	Schlauchlänge: 30cm 23G x 3/4"	24 Stk.	240 Stk.
VACUETTE® Blutentnahmesets + Blutkulturhalter (steril)				
450186	Blutentnahmeset + Blutkulturhalter	Schlauchlänge: 19cm 21G x 3/4"	24 Stk.	240 Stk.
Blutkulturhalter (nicht steril)				
450181	Blutkulturhalter		40 Stk.	320 Stk.