

VACUETTE® VISIO PLUS KAN ALMA İĞNELERİ KULLANIM KILAVUZU

Kullanım Amacı:

VACUETTE® VISIO PLUS Kan Alma İğneleri kan almada yetkili personelin günlük rutin kan alma işlerini gerçekleştirmek amacıyla tasarlanmıştır. İğnenin transparan bölümü başarılı bir damara girme işlemi için kullanıcıya yardımcı olur.

Tek kullanımlıktır ve yeterli derecede eğitim almış sağlık personeli tarafından bu talimatlara göre kullanılmalıdır.

Ürün Tanımı:

VACUETTE® VISIO PLUS Kan Alma İğneleri paslanmaz çelikten üretilmiştir ve ucuna bir emniyet valfi (kauçuk) yerleştirilmiştir. Delikli etiket sadece ürünü tanımlamayı kolaylaştırmak için değil, aynı zamanda güvenlik bandı görevi görmek için yapılmıştır. VACUETTE® Kan Alma İğneleri steril tek kullanımlık bir üründür.

VACUETTE® Önlemler ve Depolama Rehberi

Önlemler

- VACUETTE® VISIO PLUS Kan Alma İğneleri kullanılması işletmenizin politika ve prosedürlerine uygun olmalıdır.
- HBV, HCV, HIV ve diğer bulaşıcı hastalıklar biyolojik örneğe temas yolu ile bulaşabilir. Bu biyolojik örneklerle maruz kalma durumunda gerekli tıbbi önlemleri alın.
- Kullanılmış tüm VACUETTE® VISIO PLUS Kan Alma İğnelerini onaylanmış biohazard konteynerlerinde bertaraf ediniz.
- Tehlikeye maruz kalmayı minimize etmek için damara girme işlemi ve kan alma işlemi boyunca eldiven giyiniz.
- Son kullanma tarihi geçmiş VACUETTE® VISIO PLUS Kan Alma İğnelerini kullanmayınız.

VACUETTE® VISIO PLUS Kan Alma İğnelerinin Kullanımdan Önce Depolanması

* Tavsiye edilen saklama sıcaklığı 4-25 C° (40-77 °F)

NOT: Direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Tavsiye edilen maksimum depolama sıcaklığının aşılması VACUETTE® VISIO PLUS Kan Alma İğnelerinin kalitesinin bozulmasına neden olabilir.

Örnek Alma ve Kullanma

Damara girmeden önce bu bilgileri okuyunuz.

Örnek Alma İçin Gerekli Ekipmanlar

Kan Alma işlemine başlamadan önce aşağıdaki malzemelerin hazır halde olduğuna emin olun.

- Kan alımı için gerekli kan alma tüpleri ; Boyutu, kan çekme hacmi ve katkı maddesi tanımlı
- Hasta örneği bilgileri için etiket.
- Kan Alma İğneleri ve holderlar

NOT: VACUETTE® VISIO PLUS Kan Alma İğneleri Greiner Bio-One tarafından holderla en iyi uyumu sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Farklı üreticilerin ürettiği holder kullanmak kullanıcının sorumluluğundadır.

- Kandan bulaşabilecek virüs ve mikroplara karşı eldiven ve uygun kıyafet
- Kan alınacak bölgeyi temizlemek için alkol veya benzeri bir madde.
- Turnike
- Yapışkanlı plaster veya bandaj
- Kullanılmış iğnelerin güvenli bertarafı için iğne atık kovası.


Damara Girme Tekniđi ve Örnek Alma

Genel Talimatlar

TEHLİKEYE MARUZ KALMAYI MİNİMİZE ETMEK İÇİN DAMARA GİRME VE TÜPE KAN ALMA İŞLEMİ BOYUNCA ELDİVEN GİYİNİZ.

NOT: Delikli etiket sadece ürünü tanımlamayı deđil aynı zamanda iđnenin steril ve kullanılmamış olduđunun bir göstergesidir. Delikli etiketin yırtılmış ve ya zarar gördüđünü tespit ettiđiniz zaman iđneyi bertaraf edin ve etiketi zarar görmemiş yeni bir iđne alın.

- 1) İđnenin kapak kısmını çevirerek çıkartın. (Fig.1)
- 2) İđneyi dik bir şekilde holderin içine takınız.(Fig.2) İđnenin sıkıca oturduđuna emin olunuz ki kullanım sırasında iđne holderden çıkmasın.
NOT: İđne holderin içine yerleřtirirken açđ ile yerleřtirilirse holdere ve iđneye zarar verebilir ve bu da damara giriřte iđnenin gevşemesine sebep olur.
- 3) İđnenin gireceđi bölgeyi seçiniz. Turnikeyi uygulayınız. (max.1 dakika). Damara girecek olan bölgeyi uygun antiseptiđi uygulayınız.
TEMİZLEME İŞLEMİNDEN SONRA DAMARA GİRİLECEK BÖLGEYİ ELLE KONTROL ETMEYİNİZ.
- 4) Hastanın kolunu düřey pozisyona getiriniz. (Fig.3, Fig.4) İđnenin koruyucu kapađını çıkartın. Hastanın kolunu ařađı dođru tutun ve tüp kapađı yukarı bakacak şekilde olsun. Damara girme işlemini gerçekteřtiriniz.
- 5) İđnenin transparan bölümünü kontrol ediniz. Kanın bu transparan alanda görünmesi başarılı bir damara girme işlemi gerçekteřtiđini gösterir. (Fig.4)
- 6) Tüpü holderin içinden ileri dođru iterek kauçukun içinde bulunan iđne ile kauçukun delinmesini sađlayın. Zamanından önce tüp kapađının kauçuk ile temas etmesi vakum kaybına sebep olur. (Fig.5)
- 7) TÜPÜN İÇİNE KAN DOLMAYA BAřLADIđI ANDA TURNİKEYİ ÇIKARINIZ. BU İŞLEM SIRASINDA TÜP İÇİNDEKİ KANIN TÜP KAPAĐI YA DA İĐNENİN SON KISMI İLE TEMAS ETMESİNE İZİN VERMEYİN.
Tüpe kan alma işlemi boyunca tüp hiçbir şekilde ařađı yukarı istikamette hareket ettirmeyin. Vakum tamamlanana kadar her zaman başparmađınızla tüpe arkadan baskı uygulayın.
- 8) Kan alımı işlemi devam ederse izleyen tüpü holdere takın. Kapak ile tüpün içindeki kanın temas etmesine izin vermeyin
- 9) Kan alma işlemi biter bitmez iđneyi dikkatli bir şekilde damardan çıkarınız, iđnenin girdiđi alana kuru steril bir bezle kan akıřı durana kadar baskı uygulayınız.
- 10) Kan durunca iđnenin girdiđi alana yapışkanlı plaster ve ya bandaj uygulayınız.
NOT: Kan alma işlemi bittikten sonra tüp kapađının üst kısmında kan artıđı olabilir. Elle tüpe temas ettiđinizde bu kana temas etmemek için gerekli önlemleri alın. Herhangi bir şekilde iđne holder kanla kontamine olursa tehlikeli olarak kabul edilir ve derhal bertaraf edilmelidir.
- 11) Kullanılmış iđne ve holderi atık kovasına atınız. İĐNE KAPAĐINI TEKRAR İĐNE YÜZEYİNE GEÇİRMİYİN. İđne kapađını kapatma işlemi için kullanmak iđne batma riskini artırır.

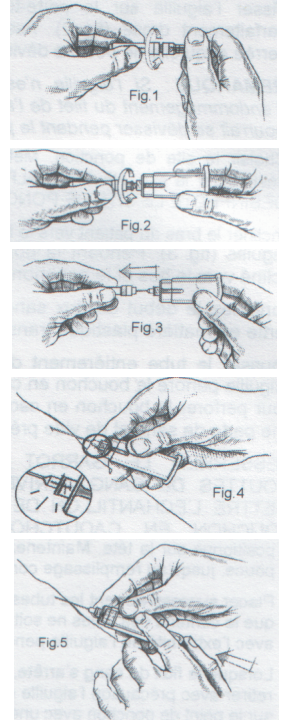

Etiket Bilgileri



Son Kullanma Tarihi: İđne üzerinde belirtilen ayın sonuna kadar kullanılabilir.



Referans Number: Birbirinden farklı iđneler kendi özel kodlarını kullanarak sipariř edilebilir.

LOT

Lot Number: Parti numarası



Tek kullanımlıktır.

STERILE EIO

Steril Göstergesi (Etilen Oksit)

Referans: Clinical Laboratory Standarts Institute (formerly NCCLS) H3-A5 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-5th Edition

İthalatçı Firma



TIBBİ MALZEME ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Yazıbařı Beldesi Balkan Cad. No: 33 Torbalı - İZMİR
Tel : (0 232) 853 94 66
Fax : (0 232) 853 94 87
e-mail : info@iztipsan.com www.iztipsan.com

Producer:

Nipro Medical Industries Ltd., Tatebayashi Plant, 2-19-64, Matsubara, Tatebayashi-shi, Gunma, 374-8518, Japan

Made in Japan

Manufactured for:
Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Strasse, 32
A-4550 Kremsmünster
Austria

980226 R01 06-2011