



## VACUETTE® Kit per il prelievo di sangue Istruzioni per l'uso



### Impiego

Il kit per il prelievo di sangue **VACUETTE®** viene utilizzato per il prelievo di sangue, di routine quotidiano. Questo prodotto dovrebbe essere impiegato solo da parte di personale appositamente formato e addestrato in base alle presenti istruzioni per l'uso.

### Descrizione del prodotto

Il kit **VACUETTE®** per il prelievo di sangue è un prodotto sterile monouso. E' composto di un ago a farfalla combinato con un tubo flessibile alla cui estremità si trova un raccordo Luer. Il kit **VACUETTE®** per il prelievo di sangue è in confezione singola e sterile con adattatore Luer. Permette l'impiego p.es. in combinazione con una camicia standard **VACUETTE®**

### VACUETTE® - Avvertimenti e indicazioni riguardanti la sicurezza:

#### Indicazioni riguardanti la sicurezza

Se le relative istruzioni vengono rispettate, il dispositivo funzionerà nel modo previsto.

- Prima dell'uso controllare ogni singola confezione e verificare se presenta dei danni. In caso di danni si consiglia di non utilizzarla.
- Immediatamente dopo l'uso i kit per il prelievo di sangue/per infusioni **VACUETTE®** andranno smaltiti negli appositi contenitori del materiale usato.
- Mantenere le mani sempre dietro l'ago durante l'uso e durante l'eliminazione.

#### Avvertimenti

- La manipolazione di campioni biologici e degli accessori per il prelievo di sangue (p.es. lancette pungidito, aghi, adattatori Luer e kit per il prelievo di sangue) dev'essere effettuata osservando e rispettando le disposizioni d'igiene e di sicurezza rispettivamente valide e in vigore.
- HBV, HCV, HIV e altre malattie infettive potranno essere trasmesse mediante contatto con campioni di natura biologica. In caso di esposizione a campioni di natura biologica e di un conseguente rischio di infezione, si raccomanda una immediata consultazione medica.
- Ogni ago utilizzato viene considerato contaminato e dev'essere eliminato dopo il prelievo inserendolo nell'apposito contenitore di eliminazione per campioni di natura biologica. Un riutilizzo del prodotto potrebbe causare infezioni dannose per la salute, lesioni oppure la morte.
- Per l'eliminazione di accessori per il prelievo di sangue (p.es. lancette pungidito, aghi, adattatori Luer e kit per il prelievo di sangue) si dovranno utilizzare gli appositi contenitori di eliminazione del materiale usato.
- Nel canale dei liquidi del tubo flessibile del kit di sicurezza per il prelievo di sangue/per infusioni è contenuto il plastificante DEHP. E' possibile un'estrazione del DEHP in caso di contatto con lipidi. In caso di utilizzo del prodotto con donne incinte, allattanti e bambini bisogna prestare particolare attenzione.
- In caso di pazienti p.es. immobilizzati, emofilici nonché epilettici bisogna stare particolarmente attenti durante il prelievo di sangue.
- Togliendo o eliminando il kit bisogna prestare particolare attenzione ad eventuali gocce di sangue o di materiale per la medicazione.

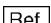
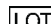



### Manipolazione del kit VACUETTE® per il prelievo di sangue

1. Scegliere le provette appropriate e il kit **VACUETTE®** per il prelievo di sangue
2. Estrarre dall'imballaggio il kit **VACUETTE®** per il prelievo di sangue  
NOTA: In caso di imballaggi già aperti oppure danneggiati scartare il kit per il prelievo di sangue e sceglierne uno intatto.
3. Scegliere il sito di puntura. Applicare il laccio emostatico e disinfettare il sito di puntura. Non palpare (ricercare manualmente la vena) dopo la disinfezione! Tenere in mano il kit **VACUETTE®** per il prelievo di sangue reggendolo dalla parte della farfalla e togliere con prudenza il tappo di protezione dell'ago.
4. Eseguire la puntura venosa sul paziente, a braccio disteso verso il basso.
5. Dopo il prelievo estrarre con precauzione l'ago a farfalla dalla vena. Esercitare una lieve pressione con un tampone asciutto e sterile sulla sede di puntura finché si arresta l'emorragia.  
NOTA: Non esercitare troppa pressione sul sito della puntura.
6. Eliminare il kit **VACUETTE®** per il prelievo di sangue usato infilandolo nell'apposito contenitore di smaltimento del materiale usato in conformità con le direttive di sicurezza in vigore sul luogo del suo impiego.

### Immagazzinaggio dei kit VACUETTE® per il prelievo di sangue prima dell'uso

Temperatura raccomandata per l'immagazzinaggio: 4–36°C (40–97° F).

NOTA: Evitare l'esposizione diretta al sole. Il superamento della temperatura massima raccomandata per l'immagazzinaggio potrà compromettere la qualità dei kit **VACUETTE®** per il prelievo di sangue

Contrassegni sulle etichette dei prodotti	Riferimenti:
 Ref. Numero dell'articolo.	CLSI (Clinical Laboratory and Standards Institute) H1-A5 "Evacuated Tubes and Additives for Blood Specimen Collection – 5th Edition"; Approved Standard H3-A6 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-Sixth Edition
 LOT Numero di lotto: numero di carico	
 Data di scadenza: Il prodotto potrà essere utilizzato fino alla fine del mese indicato.	
 Simbolo per la „sterilizzazione ad ossido di etilene“	
 Simbolo per „Prodotto monouso“	

Producer: Nipro (Thailand) Corporation Limited,  
10/2 Moo 8 Bangnomko, Sena,  
Phra Nakhon Si Ayutthaya 13110, Thailand

Made in Thailand



greiner bio-one

Manufactured for:  
Greiner Bio-One GmbH  
Bad Haller Straße 32  
A-4550 Kremsmünster  
AUSTRIA

www.gbo.com/preanalytics  
office@at.gbo.com  
(+43) 07583/6791