

# Produktinformation

## VACUETTE® Homocysteinröhrchen

### Allgemeine Information

Es zeigt sich im Röhrchen kein signifikanter Anstieg der in vivo Homocystein Konzentration für mindestens 6 Stunden bei Raumtemperatur (20 – 24°C). Die Stabilisierung der Probe bedeutet, dass ein Transport innerhalb einer definierten Zeit bei Raumtemperatur möglich ist - ohne die Probe kühlen zu müssen. Weiteres kann die Probe, wenn auf 4°C gekühlt, für mindestens 72 Stunden stabilisiert werden.

Es ist nötig die Röhrchen vor der Analyse 10 Minuten bei 2000 – 2200 g zu zentrifugieren.

Bitte beachten Sie, dass das Ergebnis der Analyse mit dem Faktor 1.11 multipliziert werden muss, um die Verdünnung der Probe zu kompensieren. Dies ist nötig, um die tatsächliche Homocystein Konzentration im Plasma zu erhalten.

Die Kompatibilität des Gerätes hängt vom Testkit ab. Wenn Ihr Instrument nicht auf der Liste ist, bedeutet das nicht zwingend, dass es nicht kompatibel ist.

Instrument	Testkit	Methode
<b>Die folgenden Kombinationen wurden getestet und sind geeignet:</b>		
Abbott AxSYM, IMx, Architect	Homocystein Reagens	FPIA
-	Chromsystems (neuer Kit)	HPLC/FL
-	Bio-Rad	HPLC/FL
<b>Die folgenden Kombinationen wurden getestet und sind NICHT geeignet:</b>		
Siemens Advia Centaur	ADVIA Centaur® Homocysteine (HCY) Assay	Kompetitiver Immunoassay
Roche Integra, Cobas	Diazyme	Enzymatisch
Olympus; Hitachi	Homocysteine FS	Enzymatisch
Cobas Mira; Hitachi 717, 911, 917; Synchron-CX-7; Olympus AU400; Dimension AR; Aeroset; Advia 1650; Modular P	Demeditec „Homocystein enzymatic“	Enzymatisch
OLYMPUS AU400	Homocystein Enzymatic Assay Kit - IBL USA	Enzymatisch

### VACUETTE® Homocysteinröhrchen

Artikel N°.	Nom.Volumen	Kappenfarbe	Ringfarbe	Röhrchengröße	Beschreibung
<b>PREMIUM (Sicherheitsschraubkappe)</b>					
454421	2ml	weiß	rot	13 x 75	Homocysteinröhrchen