

SOC 60

Socle de travail pour Plastigroup/Plasticut



SOC 60

LA FONCTION DU SOC 60

Le **SOC 60** est le support nécessaire pour le positionnement et le maintien des plaques d'analyses des systèmes Plastigroup et Plasticut.

SOC 60 ET SON UTILISATION

Insérer la plaque d'analyse des systèmes Plastigroup ou Plasticut sur les 2 goupilles du bas du socle de travail.

La plaque mélangeuse thermoformée, et éventuellement sécable, sera placée sur la plaque d'analyse et viendra buter dans les goupilles des côtés et du haut du socle. Vous obtenez ainsi un mélange homogène et simultané sur l'ensemble des disques.

CONDITIONNEMENT


Conditionné en carton de 1 pièce.
Garanti 1 an

ENCOMBREMENT

Socle de travail : 370 x 215

MATIERE

ABS Blanc
Non stérile

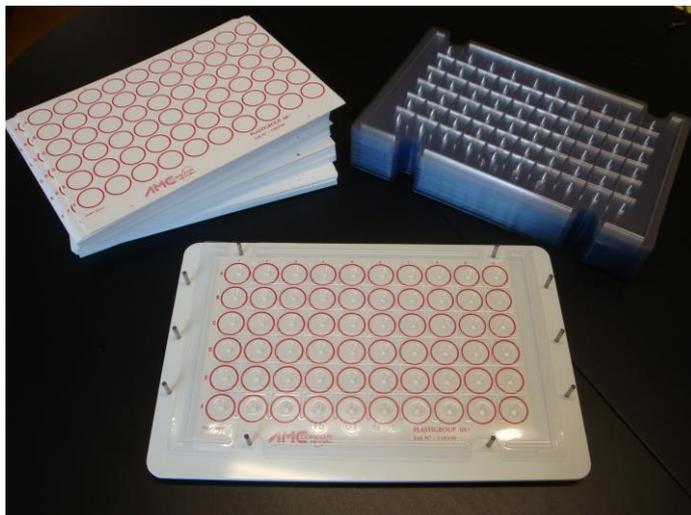

Vue d'ensemble socle + plaque d'analyse + plaque mélangeuse



SOCLE RE-UTILISABLE APRES NETTOYAGE