



Plaque eutectique +18°C Hemobox®

La plaque eutectique restitue de manière homogène une température définie sur une longue durée. Elle assure la conservation et l'intégrité durables des prélèvements.



CARACTÉRISTIQUES

Température :

- Conçue pour la mallette Hemobox® : circulation optimale de la température du haut vers le bas pour une meilleure conservation.

Étanchéité :

- Enveloppes des plaques étanches, bouchons soudés par ultrasons, plaques rigides.

Qualité :

- Liquide eutectique haute performance.

MODE OPÉRATOIRE

Mode réchauffement

Stockage : conservez la plaque eutectique à +25°C ou placez la dans une étuve à +28°C maximum pendant environ 4 heures.

Utilisation : une fois liquide, placez la plaque eutectique dans votre conteneur isotherme.

Mode refroidissement

Stockage : conservez la plaque eutectique au réfrigérateur pendant 2 heures minimum (à +8°C +/-).

Utilisation : sortez la plaque eutectique du réfrigérateur et placez la dans votre conteneur isotherme.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Froid restitué	T°C de solidification conseillée	Temps de refroidissement/réchauffement
+18°C à +25°C*	+8°C/+28°C	2h minimum

*la durée du palier varie en fonction de la température ambiante, du type d'emballage isotherme, de la masse eutectique introduite, etc.

Pour un maintien optimal de la température, il est préconisé que la masse des plaques eutectiques soit deux fois supérieure à celle transportée.

PRÉCAUTIONS

- Ne pas mettre la plaque en contact direct avec le produit à conserver.
- Ne pas exposer la plaque eutectique à des températures élevées, flammes ou sources de chaleur intenses.
- Ne pas laver la plaque eutectique au lave-vaisselle, la nettoyer à l'eau savonneuse.

HEMOBOX®

Stiplastics® Healthcaring

Contacts

www.hemobox.com
contact@hemobox.com
Tél. 04 76 38 64 00
Fax 04 76 38 54 39



Dim. plaque rigide modèle M en mm :

réf. STI808 : L 175 x l 105 x H 30

pois : 485,6 g

Dim. plaque rigide modèle L en mm :

STI810 : L 320 x l 175 x H 30

pois : 1 500 g

Dim. plaque rigide modèle XL en mm :

STI812 : L 325 x l 265 x H 30

pois : 2 360 g

Matériaux : coque extérieur PEHD

Livrée seule