
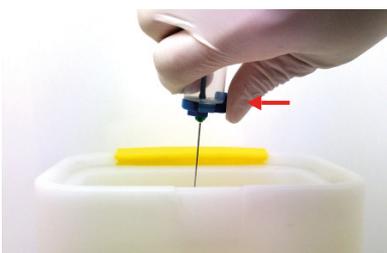
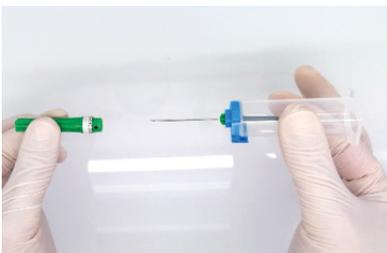
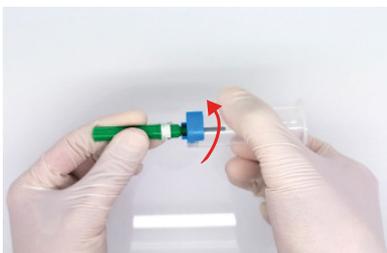


# PROTOCOLE D'UTILISATION SPEEDY QUICK

Veuillez respecter le mode d'emploi sur [www.gbo.com](http://www.gbo.com).

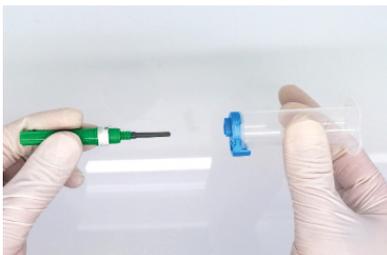

1

Retirez le manchon protecteur de l'aiguille interne.

2

Prenez le dispositif Speedy Quick.

3

Insérez l'aiguille, maintenez-la d'une main et vissez le dispositif Speedy Quick (un tour complet senestre) de l'autre main.

4

Retirez le manchon protecteur de l'aiguille. Effectuez le prélèvement.

5

Une fois le prélèvement terminé, appuyez sur le mécanisme déclencheur et éjectez l'aiguille dans un collecteur adapté.



Greiner Bio-One SAS France

TEL : 01.69.86.25.25 | FAX : 01.69.86.25.35 | E-MAIL : [accueil.france@gbo.com](mailto:accueil.france@gbo.com)

Greiner Bio-One is a global player.

Find the contact details of your local partner on our website.