

BANDE DE RECHANGE

- / Référence Greiner Bio-One : BRVGP2
- / Désignation produit : Bande rechange verte pour garrot PRAMETA carré [902-3]

Application	Accessoire pour prélèvement sanguin
Fabrication	Pays de fabrication : Allemagne Nom du fabricant : Prämata Code fournisseur : 161806 Certification : SO 9001 : 2000
Conditionnement	Conditionnement : Boîte de 1 pièce Sous-conditionnement : sans Minimum de vente : Boîte de 1 pièce
Traçabilité	N° de lot : Constitution exemple : 0905A 09 : année de production (2009) 05 : semaine de production A : traçabilité interne Localisation : Carton + boîte Date limite d'utilisation : Garantie 2 ans
Qualité bactériologique	Non stérile
Assurance qualité	- Normes et directives - Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Classe I
Spécifications	Matière : tissu mélange de fils de coton, polyamide et polyuréthane Dimensions : Longueur de la bande : 570 ± 10 mm et Largeur de la bande : 23 mm Informations complémentaires : - Radioactif : non - Usage unique : non - Latex : sans
Mode d'emploi	1. Presser le cran de sécurité et extraire la bande 2. Glisser la nouvelle bande sous le ressort de la boucle, puis dans la pièce du bout 3. Contrôler sa bonne fixation.
Désinfection	Recommandations d'usage et limites d'utilisation : - Stérilisation par immersion 15 minutes dans une solution contenant de l'alcool (glucoprotamines et aldehydes) - Concentration habituelle de la dissolution : 0,5% - Rinçage - Séchage - Fréquence : selon les besoins

Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées.

Photo

