

# Surgicutt

## PAPIER BUVARD

### Description du produit

Le papier buvard Surgicutt utilisé pour le test de mesure du temps de saignement est un produit exceptionnel destiné à absorber en toute sécurité et de manière efficace le sang s'écoulant d'une incision pour permettre la mesure du temps de saignement.

Ce papier buvard au haut pouvoir absorbant est recouvert d'un film protecteur qui évite tout contact direct avec le sang du patient. Le film est transparent de sorte que l'utilisateur peut voir si une quantité excessive de sang est absorbée ou s'il est nécessaire d'utiliser davantage de papier.

Etant donné le haut pouvoir absorbant du papier buvard, les gouttes de sang sont rapidement éliminées du point d'incision. Cela permet d'augmenter la visibilité et minimise le risque de contact entre le papier et la blessure qui constitue une source d'erreur dans la mesure du temps de saignement.

Chaque disquette de papier buvard est stérile. Etant donné que le papier est en contact étroit avec une blessure ouverte, le caractère stérile du produit permet d'éviter l'infection.

### Spécifications

- Haut pouvoir absorbant
- 9 cm de diamètre
- Stérile
- Pouvoir absorbant 365% approximativement supérieur
- Sûr
- à celui d'un papier filtre
- Facile d'utilisation

### Mode d'emploi

(Se référer à la fiche technique des dispositifs Surgicutt pour des précisions complémentaires).

1. Préparer le patient et pratiquer l'incision conformément au protocole accepté de mesure du temps de saignement.
2. Pour utiliser le papier dans le cadre de la mesure du temps de saignement, ouvrir le film protecteur en déchirant la bande perforée (Fig. 1).
3. Faire glisser le papier à travers l'ouverture dans le film 3 protecteur (Fig.2).
4. Utiliser le papier toutes les 30 secondes pour éponger l'écoulement de sang en appliquant le papier sur la goutte de sang. Ne pas appliquer le papier directement sur l'incision afin de ne pas perturber le processus de formation du caillot.
5. Opérer une rotation du papier de manière à obtenir une sur-face vierge (Fig. 3, 4, et 5).
6. A intervalles de 30 secondes, éponger en utilisant une autre surface de papier vierge.
7. Continuer à éponger le sang à intervalles de 30 secondes jusqu'à ce que le test soit terminé. .

*Après usage, le papier-buvard doit être considéré comme ayant été souillé. Par conséquent, les mesures institutionnelles relatives à la destruction de déchets septiques devront être mises en œuvre..*

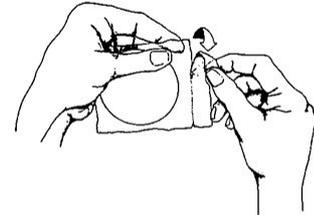


Fig. 1

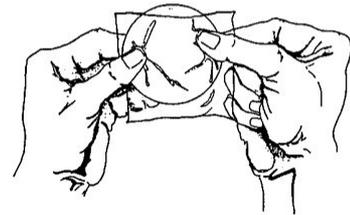


Fig. 2

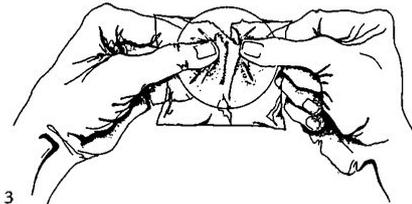


Fig. 3

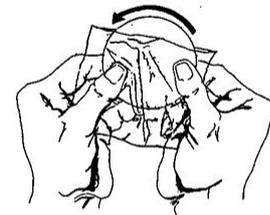


Fig. 4

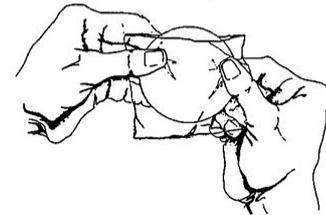


Fig. 5

Distributeur exclusif pour la France :



305, Allées de Craponne  
13300 Salon-de-Provence  
Tél. : 33 (0)4 90 17 54 50 - Fax : 33 (0)4 90 17 54 51