

DESINFEKTIONSMITTELLISTE

VACUETTE® EASYCLEAN

ART. NR. 840052

Validierte

Desinfektionsmittel

- Schülke mikrocid® universal wipes premium

Verträgliche

Desinfektionsmittel

- B. Braun Meliseptol® acute Wipes
- B. Braun Meliseptol® sensitive Wipes
- Bode Kohrsolin® FF
- Bode Mikrobac® Tissues
- Clinell® Peracetic acid wipes
- Clinell® universal wipes
- Dr. Schumacher Cleanisept® Wipes Maxi
- Dr. Schumacher Ultrasol OXY® Wipes
- Ecolab Incidin™ Active (powder)
- Ecolab Incidin™ Alcohol Wipe
- Ecolab Incidin™ OxyWipe S
- Ecolab Incidin™ Pro
- Ecolab Incidin™ Rapid
- Ecolab Sekusept™ aktiv (powder)
- Hartmann Bacillol® Sensitive Tissues
- Milton™ Sterilising Tablets
- Sani-Cloth Disinfectant Wipe
- Schülke mikrocid® universal wipes premium
- Schülke perform® (powder)
- SoChlor® DST (1.7g NaDCC)

Unverträgliche

Desinfektionsmittel

- Bode Bacillol® AF

Note: Printed copies will not systematically be updated. Valid at the date of issue. Information is subject to change.

Hinweis zur Desinfektionsmittelliste

Diese Desinfektionsmittelliste ist ausschließlich in Verbindung mit den in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Methoden zu verwenden.

Die unter „Verträgliche Desinfektionsmittel“ aufgeführten Produkte wurden vom Hersteller auf ihre Materialverträglichkeit mit dem VACUETTE® EasyClean Venenstauer geprüft. Eine vollständige Validierung der Aufbereitung in Kombination mit dem VACUETTE® EasyClean Venenstauer wurde nicht durchgeführt. Die Liste dient als Hilfestellung zur Auswahl und Validierung geeigneter Desinfektionsmittel durch den Anwender. Die Verantwortung für die Validierung der Aufbereitung unter den jeweiligen Betriebsbedingungen liegt beim Anwender bzw. bei der Einrichtung.

Die aufgeführten Reinigungs-/Desinfektionsmittel werden nicht von Greiner Bio-One in Verkehr gebracht; die Nennung erfolgt rein informativ und stellt weder Empfehlung noch Zusicherung dar.

Die Verwendung nicht geprüfter oder nicht kompatibler Desinfektionsmittel kann zu vorzeitiger Materialermüdung, Funktionsstörungen oder Produktdefekten führen.

Befolgen Sie stets die folgenden Anweisungen:

Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers des verwendeten Reinigungs- oder Desinfektionsmittels (Konzentration, Einwirkzeit, Temperatur, Kompatibilität).

Tragen Sie die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA) während der Aufbereitung des VACUETTE® EasyClean Venenstauers.

Stellen Sie sicher, dass vor der Anwendung keine Rückstände von Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln auf dem VACUETTE® EasyClean Venenstauer vorhanden sind.

Verwenden Sie keine abweichenden Verfahren oder Mittel, die in der Gebrauchsanweisung des VACUETTE® EasyClean Venenstauers nicht ausdrücklich freigegeben sind (z. B. Lösungsmittel, abrasive Mittel, nicht empfohlene Konzentrationen).

Fachliche Fragen zu Reinigungs- und Desinfektionsmitteln richten Sie bitte an den jeweiligen Hersteller; Fragen zum VACUETTE® EasyClean Venenstauer an uns unter <https://www.gbo.com/en-int/contact>.

Haftungsausschluss

Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt Greiner Bio-One in ihrer Rolle als Distributor und/oder Inverkehrbringer des VACUETTE® EasyClean Venenstauers keine Gewähr, Zusicherung oder Haftung für Schäden an Materialien, Geräten oder Personen, die aus der Verwendung dieser Liste, aus unsachgemäßer Aufbereitung oder aus der Nutzung von Desinfektionsmitteln entgegen deren Gebrauchsanweisung entstehen. Die in dieser Liste genannten Reinigungs-/Desinfektionsmittel sind Produkte Dritter; deren jeweilige Hersteller bleiben für Sicherheit, Eignung und die Einhaltung ihrer Gebrauchsanweisung verantwortlich. Zwingende gesetzliche Rechte und Haftungen (insb. nach Produkthaftungsrecht) bleiben unberührt. Maßgeblich sind stets die Gebrauchsanweisung des VACUETTE® EasyClean Venenstauers, die Gebrauchsanweisung des Mittel-Herstellers sowie geltende gesetzliche und normative Vorgaben.