


# Biocompact

EMBALLAGES POUR DÉCHETS À RISQUE INFECTIEUX  
SHARPS DISPOSAL CONTAINERS

SUPPORT BARRE / MUR  
BAR / WALL BRACKET




INSTALLATION: SUPPORT BARRE  
INSTALLATION: BAR BRACKET

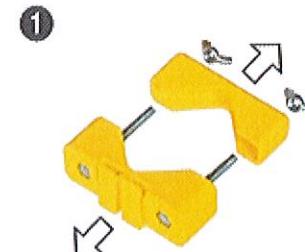

Dévisser les papillons pour extraire les vis et séparer les deux pièces du support

*Unscrew the wing nuts to remove the bolts and separate the 2 pieces of the bracket*

INSTALLATION : SUPPORT MUR  
INSTALLATION: WALL BRACKET

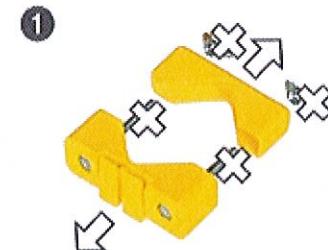

Dévisser les papillons pour extraire les vis et séparer les deux pièces du support

*Unscrew the wing nuts to remove the bolts and separate the 2 pieces of the bracket*




1,8L

3L

5L

10L

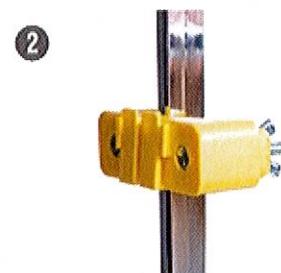

Placer chacune des pièces sur le chariot et les fixer en même temps en introduisant de nouveau les vis et les fixer avec les papillons  
*Position both pieces on the trolley and fix them in place by reinserting the bolts and securing them with the wing nuts*




Insérer le conteneur dans la rainure du support prévue à cet effet pour la fixation de celui-ci  
*Insert the container in the supporting slot in the bracket*



Les visser jusqu'à ce que le support soit fixé au mur

*Tighten the screws until the bracket is secured to the wall*

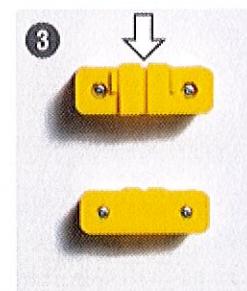

Insérer le conteneur dans la rainure prévue à cet effet pour la fixation de celui-ci

*Insert the container in the supporting slot in the bracket*