

## FICHE TECHNIQUE

### Tube de la gamme Deltaswab avec milieu ViCUM® et écouvillon floqué

codes 304238KF, 304236KF, 304234KF, 304230F, 304239KF, 304233F, 304233F.2S

mod.	code	milieu (ml)	description	point de rupture (mm)	montant boîte	poids boîte	volume boîte
B + 1	304238KF	2	avec écouvillon floquée standard	80	6 x 90	6,59	0,056
B + 2	304236KF	2	avec écouvillon urétral floqué	80	6 x 90	6,59	0,056
B + 3	304234KF	2	avec écouvillon nasopharyngé floqué	80	6 x 90	6,59	0,056
B + 3	304230F	2	avec écouvillon nasopharyngé floqué	100	6 x 90	6,59	0,056
B + 4	304239KF	2	avec écouvillon floqué minitip	80	6 x 90	6,59	0,056
A + 1	304233F	3	avec écouvillon floquée standard	100	6 x 70	8,91	0,056
A + 1/3	304233F.2S	3	avec 2 écouvillons standard/nasopharyngé	100	6 x 50	6,36	0,056

Tube avec milieu de transport : Directive 98/79/CE Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Écouvillon: Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.



## FINALITÉ D'UTILISATION - DESCRIPTION

ViCUM® est un milieu de transport liquide universel formulé avec une solution de sels équilibrés, d'albumine sérique bovine, de tampon HEPES, d'antibiotiques et d'antifongiques et de conservateurs adaptés, avec un pH qui permet la viabilité des virus, chlamydia, mycoplasmes et uréoplasmes. Il contient du rouge de phénol et des antibiotiques qui inhibent la croissance des bactéries et des champignons, garantissant ainsi une récupération adéquate des échantillons.

Chaque tube contient des billes de verre pour faciliter la lyse cellulaire, l'homogénéité de l'échantillon et maximiser l'élution. Conçu pour la culture cellulaire, la réalisation d'études antigéniques pour les techniques de détection virale et d'amplification génomique par PCR.

RÉALISÉ	VERIFIÉ	APPROUVÉ
Pascal Montoya Département du Brand & Communication	Anna Mir Directeur Technique, AR, Qualité et Environnement	Mónica Torras Commercial Integration Directeur

## FICHE TECHNIQUE

# Tube de la gamme Deltaswab avec milieu ViCUM® et écouvillon floqué

codes 304238KF, 304236KF, 304234KF, 304230F, 304239KF, 304233F, 304233F.2S

- L'ensemble est composé de :
- Tube de milieu de transport ViCUM®
  - Écouvillon floqué en peel-pack
  - Présentation en flow-pack

Écouvillon : stérile par rayonnement (R).  
Tube avec milieu : stérile par filtration.

### MESURES

Longueur du tube	104,3 mm
Diamètre du tube	16mm
Diamètre de la fiche	21,6 mm
Longueur de l'écouvillon	152 mm

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU SYSTÈME DELTASWAB

- Compatible avec les nouveaux équipements d'automatisation pour l'inoculation et le semis d'échantillons.
- Compatible avec les techniques de diagnostic moléculaire.
- Facilite la collecte, le transport et le traitement ultérieur des échantillons microbiologiques.
- Plus grande fiabilité dans la récupération des échantillons : haute capacité d'absorption et d'élution de l'écouvillon floqué Deltaswab.
- Une plus grande viabilité de l'échantillon, puisqu'il est complètement en suspension dans le milieu.
- Permet d'obtenir différents inoculums homogènes à partir d'un même échantillon.
- S'adapte à tout protocole de travail.
- Minimise la contamination croisée possible grâce à moins de manipulation et une étanchéité maximale.
- Plus de confort pour l'utilisateur : fond conique qui facilite l'agitation et une plus grande stabilité du tube à jupe.
- Plus de confort pour le patient grâce à la housse d'écouvillon plus douce.
- Normalise la réception des échantillons dans les laboratoires de microbiologie.
- Facilite le semis manuel.
- Permet une extension directe sur la lame, puisqu'elle ne contient pas de milieu gélosé.
- Assure le transport et le stockage corrects des échantillons à température ambiante (20-25°C) et au réfrigérateur (4-8°C).

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DE L'ÉCOUVILLON FLOQUÉE

- Fiabilité et praticité maximales dès le point de rupture.
- Support polystyrène --> Sécurité optimale.
- Tête de fibre floquée --> Meilleure absorption et élution de l'échantillon dans le milieu.
- Adaptabilité maximale, large portée.
- Confort maximal : conception anatomique et ergonomique.

RÉALISÉ	VERIFIÉ	APPROUVÉ
Pascal Montoya Département du Brand & Communication	Anna Mir Directeur Technique, AR, Qualité et Environnement	Mónica Torras Commercial Integration Directeur


## FICHE TECHNIQUE

Page 23 Catalogue Général 2025

# Tube de la gamme Deltaswab avec milieu ViCUM® et écouvillon floqué

codes 304238KF, 304236KF, 304234KF, 304230F, 304239KF, 304233F, 304233F.2S

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

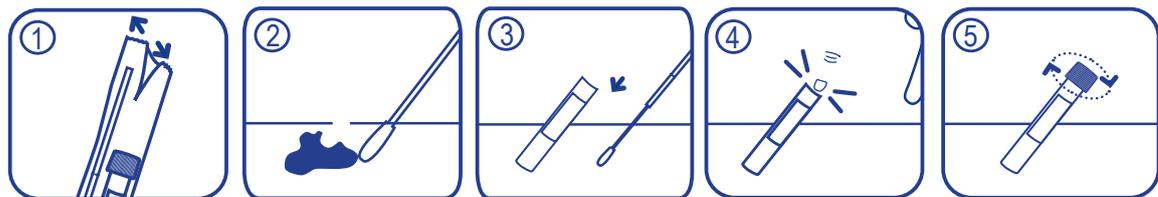

1. Ouvrez le flow-pack du kit avec les deux mains, en tirant sur les côtés opposés.
2. Retirez l'écouvillon et prélevez l'échantillon.
3. Ouvrez le tube avec votre autre main et insérez complètement l'écouvillon afin qu'il soit à moitié recouvert. Alignez le point de rupture avec le tube en appuyant légèrement sur l'écouvillon.
4. Cassez la brosse à son point de rupture en la tenant par le haut et en la pressant légèrement contre le bord intérieur du tube.
5. Jeter le haut de la tige, visser le capuchon et agiter pour que l'échantillon s'élué vers le centre.

Envoyez le tube contenant l'échantillon au laboratoire pour analyse.

### ENSEMBLE TUBE ET ÉCOUVILLON


code	description	couleur du capuchon (indique le support)
304238KF	2 ml ViCUM® + écouvillon floqué standard	●
304236KF	2 ml ViCUM® + écouvillon urétral floqué	●
304234KF	2 ml ViCUM® + écouvillon floqué nasopharyngé	●
304230F	3 ml ViCUM® + écouvillon floqué nasopharyngé	●
304239KF	2 ml ViCUM® + écouvillon floqué minitip	●
304233F	3 ml ViCUM® + écouvillon floqué standard	●
304233F.2S	3 ml ViCUM® + écouvillon floqué standard et nasopharyngé	●

RÉALISÉ	VERIFIÉ	APPROUVÉ
Pascal Montoya Département du Brand & Communication	Anna Mir Directeur Technique, AR, Qualité et Environnement	Mónica Torras Commercial Integration Directeur


# FICHE TECHNIQUE

Tube de la gamme Deltaswab avec milieu ViCUM<sup>®</sup> et écouvillon floqué  
 codes 304238KF, 304236KF, 304234KF, 304230F, 304239KF, 304233F, 304233F.2S

## LABEL DÉSIGN

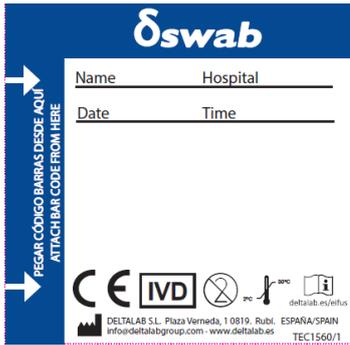

## FLOW-PACK DÉSIGN

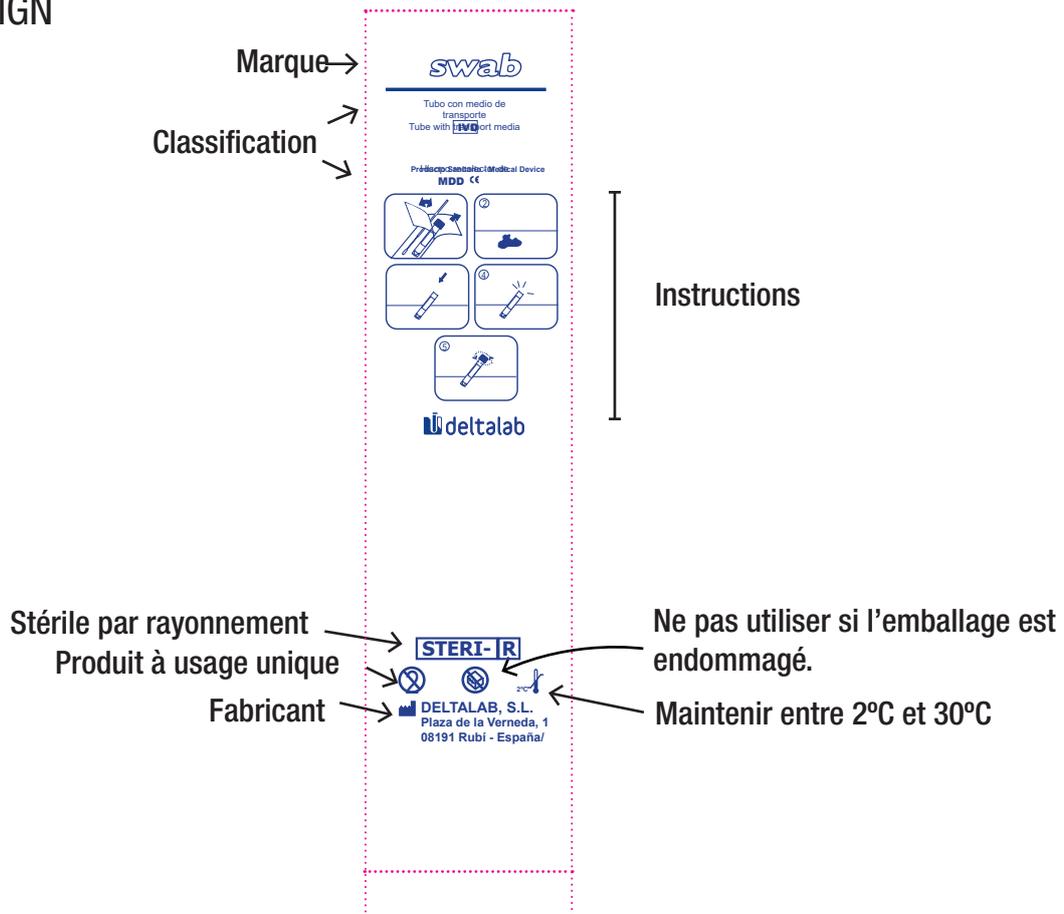

RÉALISÉ	VERIFIÉ	APPROUVÉ
Pascal Montoya Département du Brand & Communication	Anna Mir Directeur Technique, AR, Qualité et Environnement	Mónica Torras Commercial Integration Directeur