

GARROT PRAMETA VERT

- / Référence Greiner Bio-One : GPV
- / Désignation produit : Garrot Prameta vert

Application

Accessoire pour prélèvement sanguin

Caractéristiques

Dimensions :

- Longueur de la bande : 570 ± 10 mm
- Largeur de la bande : 23 mm

Matériaux :

- Tissu mélange de fils de coton, polyamide et polyuréthane
- Boucle : Alliage aluminium

Automatisation : N/A

Usage unique : non

Péremption : garantie 2 ans

Températures

Pas de température d'utilisation et de stockage

Conditionnement

Conditionnement : 30

Sous-conditionnement : N/A

Minimum de vente : 1

Qualité

Normes et certifications : ISO 9001 : 2000

Marquage CE : conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Classe I

Stérilité : non

Informations complémentaires

Radioactif : non / Latex : non

Mode d'emploi

1. Placer le garrot. Insérer le poussoir vert dans la boucle métallique du garrot.
2. Faire la stase. Tirer la ceinture jusqu'à l'obtention de la pression voulue.
3. Supprimer la stase. Appuyer progressivement sur le poussoir métallique pour obtenir une suppression lente de la stase.
4. Détacher la boucle. A cet effet, il faut appuyer franchement sur le poussoir vert jusqu'à ce que la boucle s'ouvre.

Désinfection

- Stérilisation par immersion 15 minutes dans une solution contenant de l'alcool (glucoprotamines et aldehydes)
- Concentration habituelle de la dissolution : 0,5%
- Rinçage
- Séchage
- Fréquence : selon les besoins

Photos

