







<b>FICHE TECHNIQUE :</b>	<b>Déchets Médicaux</b>		
Désignation :	<b>Mini-collecteur 1.2L</b>		
Gamme :	<b>Mini</b>		
Référence	<b>ST08008</b>	Date : 29/09/2023	

	<b>Dimensions :</b> 117 x 73 x 225 mm
	<b>Poids :</b> 125 gr
	<b>Matière :</b> PP
	<b>Volume total :</b> 1.13L / <b>Volume de remplissage :</b> 0.93L
	<b>Couleurs :</b> Jaune et blanc
	<b>Résistances :</b> Perforation et chute
	<b>Caractéristiques :</b> Fermetures provisoire et définitive / Autoclavable à 134°C pendant 18 minutes

	<b>Conforme aux normes :</b> NF EN ISO 23907-1 : 2019 Titulaire du label NF 302 Homologué UN 3291 (transport des marchandises dangereuses)	

Conditionnement carton	Conditionnement palette
Nombre de pièces par carton : 60 pièces Dimensions carton en mm : 600 x 300 (h) x 400 Poids du carton : 8.9 kg <b>GTIN produit</b> <b>GTIN carton</b>   3 701206 501038      3 701206 501045	Nombre de pièces par palette : 1680 pièces Dimensions palette en mm : 800 x 1200 x 2200 (h) Nombre de cartons par palette : 28 cartons Poids palette : 260 kg

Description et assemblage
<p>Kit de 2 pièces : 1 cuve 1.2L jaune avec étiquette, 1 couvercle blanc avec trappe disposant d'une large ouverture (50x35mm) et des opercules de désolidarisation d'aiguilles, notamment un opercule spécialement conçu pour les embouts de stylos à insuline/adrénaline.</p> <p>Produit fini à ouverture/fermeture mono manuelle provisoire et définitive avec système inviolable.</p> <p>Etape 1 : Positionner le couvercle sur la cuve, de façon à ce que le languette du couvercle soit du même côté que l'étiquette de la cuve.</p> <p>Etape 2 : Appuyer sur le couvercle en son centre et clipser-le sur la cuve.</p> <p>Etape 3 : Sécuriser l'opération en appuyant sur chacun des 8 clips ( 2 par face)</p>

Supports de fixation compatibles
Plateau de soins ( Réf ST04090) en plastique recyclé Support 4 ventouses (Réf ST04097) en acier, à fixer sur paillasse. Support pour chariot universel (Réf ST04096) en acier : à fixer sur pieds de chariots. Support pour chariot universel avec crochet (Réf ST04096) en acier : à fixer sur les côtés du chariot

