

your power for health



## Lancetas MiniCollect®

Uma punção segura  
faz toda a diferença

## Lancetas com Dispositivo de Segurança - Escolha a mais adequada para cada situação

A Greiner Bio-One oferece duas linhas de lancetas com dispositivos de segurança para atender as mais variadas necessidades.

- ☞ Todas são estéreis, de uso único e indicadas para punção capilar;
- ☞ A lâmina ou a agulha é retraída automaticamente após a punção e permanece dentro do dispositivo, evitando acidentes;
- ☞ A profundidade da punção depende do calibre da lanceta, para garantia de uma coleta fácil e segura.



### Lancetas Lancelino MiniCollect®

- ☞ Quatro tipos diferentes de profundidade para penetração e aplicação.  
**Agulhas:** verde clara 1,2mm; roxa 1,5mm; azul 1,8mm e verde 2,4mm
- ☞ A ativação é feita pressionando-a no local da punção.
- ☞ O design arredondado garante o manuseio seguro.




### Lancetas de Segurança MiniCollect®

- ☞ Três tipos diferentes de profundidade para penetração e aplicação.  
**Lâminas:** rosa 1mm; verde 1,5mm e azul 2mm
- ☞ O botão deve ser ativado para acionar a punção.
- ☞ Controle do alinhamento da lâmina durante a punção.



### Veja como é fácil!

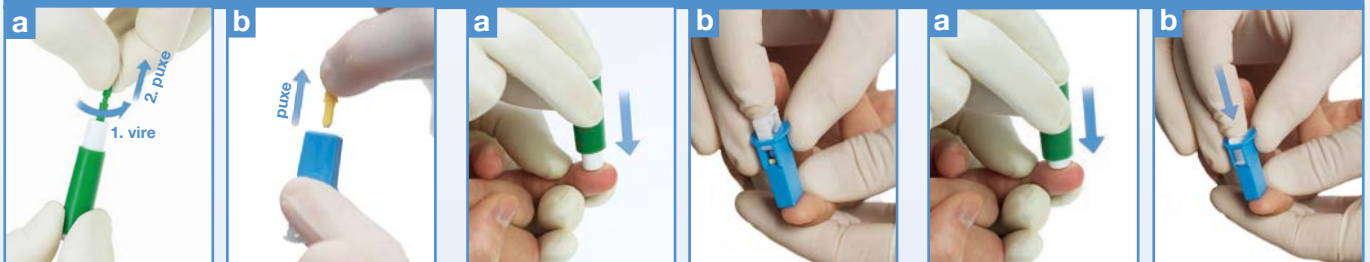

**1** Realize a antissepsia no local da punção e remova a proteção da agulha (a) ou da lâmina (b)

**2** Posicione a Lanceta Lancelino (a) ou a Lanceta **MiniCollect®** (b) no local a ser puncionado

**3** Para a punção: ative a Lanceta Lancelino pressionando-a na pele (a), ou aperte o botão para ativar a Lanceta **MiniCollect®** (b)

A obtenção do volume de sangue desejado, depende da escolha da lanceta, confira abaixo:

Item No.	Lancelino MiniCollect® com agulha	Item No.	Lanceta MiniCollect® com lâmina
450520	Verde clara, 30G, profundidade de 1,2mm	450427	Rosa, profundidade de 1mm
450521	Roxa, 25G, profundidade de 1,5mm	450428	Verde, profundidade de 1,5mm
450522	Azul, 21G, profundidade de 1,8mm	450429	Azul, profundidade de 2mm
450523	Verde, 21G, profundidade de 2,4mm		