



EXAKT OCH SÄKER FÖR SMÅ OCH ÖMTÅLIGA VENER



CLiP® NEO

IV-kateter med automatisk säkerhetsmekanism

CLiP® Neo är en IV-kateter med automatisk säkerhetsmekanism utformad för små och sköra vener som kan finnas hos neonatala, pediatrika eller äldre patientgrupper. CLiP® Neo finns i 24 och 26 gauge för att tillgodose utmanande patienttillstånd och varierande kliniska behov. CLiP® Neo har utvecklats utifrån användarens behov och med patienten i fokus och bidrar till en säker och effektiv kateterinsättning.

- / Notch som ger direkt blodsvär mellan nål och kateter
- / Vinghållare möjliggör olika greppalternativ
- / Låg vikt som inte påverkar hanteringen
- / Stabiliseringsvingar för säker fixering
- / Avsedd för blodprovstagning
- / Kompakt produkt- och förpackningsdesign ger liten miljöpåverkan

E-LEARNING FÖR VÅRDPERSONAL.

Vi erbjuder online-kurser för att hjälpa sjukvårdspersonal med bästa praxis vid användning av CLiP® Neo IV-kateter med automatisk säkerhetsmekanism.

Anmäl dig kostnadsfritt till kursen på stick-to-safety.com/training



CLiP® Neo IV-kateter med automatisk säkerhetsmekanism

Innehåller inte naturgummilatex, och är DEHP- och PVC-fri

Artikelnr	Katetermaterial	Kateterstorlek	Katetermått	Färgkod*	Flödes hastighet	Antal per inre/ytte förpackning
NW241901	FEP	24 G	0.7 x 19	● gul	22	50 / 1,000
NW261901	FEP	26 G	0.6 x 19	● lila	15	50 / 1,000

FEP = Fluorerad etylenpropylen

* Färgkodad enligt ISO10555-5:2013

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Följ bruksanvisningen på www.stick-to-safety.com eller i förpackningen.



1

Utför venpunktion och observera blodsvaret mellan nål och kateter.



2

Ockkludera venen och dra ut nålen rakt bakåt. Bekräfta aktivering av säkerhetsmekanismen.



3

Fixera och spola katetern enligt lokala riktlinjer. Täck insticksstället med sterilt förband.