



DOUCEUR ET DÉLICATESSE POUR LES PATIENTS JEUNES ET MOINS JEUNES



MINICOLLECT® LANCELINO Lancettes de sécurité

Les lancettes de sécurité MiniCollect® Lancelino sont conçues pour un usage unique. Selon le type de lancette, de lame ou d'aiguille, différentes profondeurs de pénétration sont disponibles.

Les lancettes de sécurité MiniCollect® Lancelino garantissent une sécurité optimale lors du prélèvement sanguin capillaire. Une fois la ponction effectuée, la lame/l'aiguille se rétracte automatiquement de manière irréversible dans le boîtier en plastique.

- / Activation aisée par simple pression sur le site de ponction
- / Conception ergonomique arrondie pour une prise en main confortable
- / Positionnement précis grâce à une surface de contact ronde
- / Profondeurs de pénétration définies avec précision
- / Plusieurs versions permettent de couvrir une large gamme d'applications et de patients

LARGE GAMME DE LANCETTES

Le type de lancette (aiguille/lame) et la profondeur de pénétration sont identifiés par leur couleur.

VOLUME D'ÉCHANTILLON SANGUIN

... avec utilisation d'une lancette de sécurité avec aiguille :

- lancette vert clair
- lancette violette
- lancette bleue
- lancette verte

... avec utilisation d'une lancette de sécurité avec lame :

- lancette jaune



APERÇU PRODUIT

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU
DEMANDER UN ÉCHANTILLON, RENDEZ-VOUS
SUR NOTRE SITE WEB OU CONTACTEZ-NOUS.

Lancettes de sécurité MiniCollect® Lancelino

stérile, pour le prélèvement sanguin capillaire

Réf.	Code couleur	Lame	Aiguille	Taille de lame/aiguille	Profondeur de pénétration	Intérieur / Extérieur [Qté.]
450524	● jaune	X		0,8 mm	2 mm	200 / 2 000
450520	● vert clair		X	30 G	1,2 mm	200 / 2 000
450521	● lavande		X	25 G	1,5 mm	200 / 2 000
450522	● bleu		X	21 G	1,8 mm	200 / 2 000
450523	● vert		X	21 G	2,4 mm	200 / 2 000

RECOMMANDATIONS DE MANIPULATION

Veillez suivre les instructions d'utilisation figurant sur notre site internet www.gbo.com.



1

Réchauffer et désinfecter le site de ponction conformément à vos directives internes.



2

Retirer le dispositif de protection.



3

Appuyer sur le site de ponction jusqu'à ce que la lancette se déclenche, puis la jeter.



4

Exercer une légère pression sur la zone de ponction et éliminer la première goutte de sang.