



SANFT UND SCHONEND FÜR KLEINE UND GROSSE PATIENTEN



MINICOLLECT® LANCELINO Sicherheitslanzetten

MiniCollect® Lancelino Sicherheitslanzetten sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Je nach Ausführung der einzelnen Lanzetten mit Nadel oder Klinge ergeben sich unterschiedliche Einstichtiefen.

Die Verwendung der MiniCollect® Lancelino Sicherheitslanzetten sorgt für mehr Sicherheit bei der Gewinnung von kapillaren Blutproben. Nach erfolgter Punktion zieht sich die Klinge/Nadel automatisch ins Kunststoffgehäuse irreversibel zurück.

- / Einfache Aktivierung durch Druck auf Punktionsstelle
- / Ergonomisch abgerundetes Design für angenehmen Halt
- / Punktgenaue Platzierung durch runde Auflagefläche
- / Exakt vorgegebene Einstichtiefen
- / Mehrere Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen und Patienten

VIELE VERSCHIEDENE LANZETTENTYPEN

Der jeweilige Lanzetten Typ (Nadel/Klinge) samt Einstichtiefe lässt sich anhand seiner Farbe erkennen.

GEWONNENE BLUTMENGE

... bei Verwendung einer Sicherheitslanzette mit Nadel:

- hellgrüne Lanzette
- lila Lanzette
- blaue Lanzette
- grüne Lanzette

... bei Verwendung einer Sicherheitslanzette mit Klinge:

- gelbe Lanzette



MiniCollect® Lancelino Sicherheitslanzette

steril, für Kapillarblutentnahme

| Art. Nr. | Farbcodierung | Klinge | Nadel | Klinge / Nadelgröße | Einstichtiefe | UVP / VP [Stk.] |
|----------|---------------|--------|-------|---------------------|---------------|-----------------|
| 450524 | ● gelb | X | | 0,8 mm | 2 mm | 200 / 2.000 |
| 450520 | ● hellgrün | | X | 30 G | 1,2 mm | 200 / 2.000 |
| 450521 | ● lila | | X | 25 G | 1,5 mm | 200 / 2.000 |
| 450522 | ● blau | | X | 21 G | 1,8 mm | 200 / 2.000 |
| 450523 | ● grün | | X | 21 G | 2,4 mm | 200 / 2.000 |

EMPFOHLENE HANDHABUNG

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung unter www.gbo.com.



1

Wärmen und desinfizieren
Sie die Punktionsstelle
entsprechend Ihrer internen
Richtlinien.




2

Schutzstift abziehen.



3

Auf Punktionsstelle drücken,
bis Lanzette auslöst und diese
anschließend entsorgen.

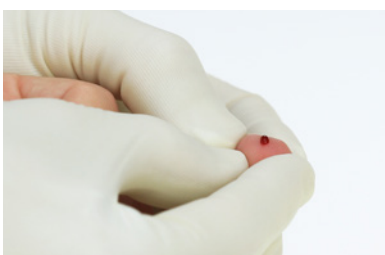

4

Sanften Druck auf das
umliegende Gewebe ausüben
und ersten Blutstropfen
verwerfen.