

Brugsvejledning

Gælder kun for følgende artikelnummer: 450241

Tilsigtet brug

HOLDEX®-engangsholder PP er beregnet til brug sammen med blodopsamlingsenheder med en hun-luer-forbindelse ved udtagning af venøst blod.

Produktbeskrivelse

En steril, engangsplastholder med en forskudt han-luer-konnektor på toppen af holderen. En forbundet nål med en muffe i rustfrit stål indvendigt i holderen for at lette blodopsamling ved at punktere hættten på en fastgjort anordning til blodopsamling.

Håndtering

1. Åbn forsigtigt pakningen.
2. Tag holderen i den ene hånd, og sæt han-luer-forbindelsen på toppen af holderen på hun-luer-forbindelsen på det valgte opsamlingsstilbehør. Kontrollér, at luer-forbindelsen er sikkert fastgjort.
3. Udfør blodudtagningen i henhold til gældende retningslinjer og procedurer på stedet.
4. Efter blodudtagningen bortskaffes holderen som beskrevet nedenfor.

Opbevaring

Holderen skal opbevares ved 4-25 °C (40-77 °F).

BEMÆRK: Må ikke udsættes for direkte sollys. Overskridelse af den anbefalede opbevaringstemperatur kan medføre, at holderen beskadiges.





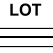
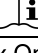
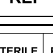
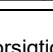
Forholdsregler/forsigtighedsregler

- Enheden vil fungere som tilsigtet, når anvisningerne følges.
- Se altid brugsvejledningen for hvert enkelt stykke tilbehør.
- Bær altid handsker under en blodopsamling ved anvendelse af denne anordning.
- Kontrollér, at de enkelte pakninger er fejlfrie inden brug. Hvis pakningen er brudt, må den ikke bruges.
- Kun til engangsbrug på en enkelt patient. Må ikke genbruges på grund af risiko for skadelige infektioner!
- Hold altid hænderne bag nålen under håndtering og bortskaffelse.
- Berør aldrig holderens indvendige side.
- Sæt aldrig kappen på nålen igen. Det anbefales at bruge sikkerhedsudstyr.
- Kontrollér, at prøverør fyldes korrekt, når der anvendes et evakueret blodopsamlingssystem.
- Hold blodprøverøret på plads under blodprøvetagningsproceduren med et let tryk med tommelfingeren for at forhindre kick-bach og sikre komplet vakuumtræk.
- Produktet må udelukkende anvendes af korrekt oplært sundhedspersonale i henhold til denne vejledning.

Bortskaffelse

De generelle hygiejneretningslinjer og lovbestemmelser for korrekt bortskaffelse af infektiøst materiale skal følges og overholdes. Efter brug skal holderen og alt engangstilbehør bortskaffes sammen i passende beholdere til biologisk farligt affald.

Oplysninger på etiketten

	Producent		Temperaturbegrænsning
	Anvendes før:		Må ikke genanvendes
	Batchkode		Læs brugsvejledningen
	Katalognummer	Rx Only (USA)	Ordineret udstyr
	Steriliseret vha. bestråling		

Forsigtig: I henhold til amerikansk forbundslovgivning må dette produkt udelukkende sælges eller ordineres til en læge.