

Kasutusjuhend

Kehtib ainult järgmise kaubanimetuse numbri kohta: 450241

Kasutusotstarve

HOLDEX® ühekordselt kasutatav katsutihoidja PP on mõeldud venoosse vere võtmiseks koos pesaga Luer-pordi verevõtu katsutiga.

Tootekirjeldus

Steriilne, ühekordselt kasutatav plastist katsutihoidja. Hoidja ülaosas paikneb detsentreeritud pistikuga Luer-pistmik. Muhviga roostevabast terasest nõel on kinnitatud hoidja sisse, hõlbustades verevõtmist verevõtukatsuti korgi läbistamisel.

Käsitsemine

1. Avage pakend ettevaatlikult.
2. Võtke katsutihoidjast ühe käega kinni ja kinnitage pistikuga Luer-pistmik, mis asub katsutihoidja ülaosas, välja valitud verevõtukatsuti pesaga Luer-tüüpi pistmiku külge. Veenduge, et see on kindlalt ühendatud.
3. Võtke vereproov vastavalt oma asutuse standarditele.
4. Pärast vereproovi võtmist visake minema, nagu allpool kirjeldatud.

Säilitamine

Säilitage katsutihoidjat temperatuuril 4–25 °C (40–77 °F)

MÄRKUS. Vältige kokkupuudet otsese päikesevalgusega. Maksimaalse soovitusliku säilitustemperatuuri ületamisel võib hoidja kahjustuda.





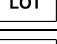

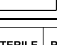
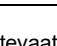
Ettevaatusabinõud/hoiatused

- Juhiste järgimisel toimib seade nagu ette nähtud.
- Lugege alati iga konkreetse tarviku kasutusjuhendeid.
- Kandke selle seadmega verd võttes alati kummikindaid.
- Enne kasutamist kontrollige iga pakendi terviklikkust. Kui pakend on katki, ärge kasutage seadet.
- Ühekordseks kasutamiseks ühel patsiendil. Mitte korduvasutada ohtlike nakkuste riski tõttu!
- Hoidke kasutamise ja äraviskamise ajal käed alati nõela taga.
- Ärge kunagi puudutage katsutihoidjat seestpoolt.
- Ärge kunagi pange nõelale katet peale. Ohutustarvikute kasutamine on soovitatav.
- Tühja verevõtusüsteemi kasutamisel kontrollige alati, et voolikud on korrektselt täidetud.
- Hoidke alati katsuti pöidlaga hoides paigal, et hoida ära tagasilööki ja tagada täielik vaakum.
- Seda toodet tohivad kasutada vastava väljaõppe läbinud tervishoiutöötajad ainult nende juhiste kohaselt.

Jäätmekäitlus

Arvestada ja järgida tuleb nakkusohtlike materjalide äraviskamist puudutavaid üldisi hügieenipõhimõtteid ja kehtivaid eeskirju. Pärast kasutamist visake katsutihoidja ja kõik ühekordselt kasutatavad tarvikud koos vastavasse bioloogiliselt ohtlike jäätmete mahutisse.

Märgiste teave

	Tootja		Temperatuuripiirang
	Kasutusaja lõpp		Ärge kasutage korduvalt
	Partii kood		Vaadake kasutusjuhendit
	Kataloogi number	Rx Only (USA)	Retseptiga väljastatav seade
	Steriliseeritud kiirgusega		

Ettevaatus! USA föderaalseadus lubab seda seadet müüa vaid arstidele või arsti tellimusel.