

Bruksanvisning

Gjelder bare for følgende varenummer: 450241

Tiltenkt bruk

HOLDEX® holder PP til engangsbruk er beregnet til venøse blodprøvetakingsprosedyrer i kombinasjon med blodprøvetakingsenheter med en hunnluerkobling.

Beskrivelse av produktet

En steril, engangsplastholder med en desentrert hannkobling øverst på holderen. En nål av rustfritt stål med en hylse er festet til innsiden av holderen for å forenkle blodprøvetaking når hetten på en tilkoblet blodprøvetakingsenhet punkteres.

Håndtering

1. Åpne emballasjen forsiktig.
2. Ta tak i holderen i den ene hånden og fest den mannlige luerkoblingen øverst på holderen til hunnluerkoblingen til det valgte prøvetakingstilbehøret. Sørg for at den er forsvarlig festet.
3. Utfør blodprøvetaking i samsvar med rutinene på praksisen/klinikken.
4. Etter blodprøvetaking kasseres enheten som beskrevet nedenfor.

Oppbevaring

Oppbevar holderen ved 4–25 °C (40–77 °F)

MERK: Skal ikke utsettes for direkte sollys. Overskridelse av anbefalt maksimumstemperatur kan føre til svekkelse av holderen.



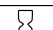

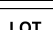



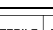
Forholdsregler/forsiktighetsregler

- Enheten fungerer som forutsatt når instruksjonene følges på riktig måte.
- Følg alltid bruksanvisningen til hvert enkelt tilbehør.
- Bruk alltid hansker under blodprøvetaking ved bruk av denne enheten.
- Undersøk at hver enkelt emballasje er hel før bruk. Dersom emballasjen er brutt, skal enheten ikke brukes.
- Kun til engangsbruk på en enkelt pasient. Skal ikke gjenbrukes på grunn av risikoen for skadelige infeksjoner.
- Hold hendene bak nålen til enhver tid under bruk og kassering.
- Berør aldri innsiden av holderen.
- Sett aldri hetten på nålen igjen. Bruk av sikkerhetstilbehør anbefales.
- Kontroller alltid at rørene er fylt på riktig måte når du bruker et evakuert blodprøvetakingsystem.
- Under blodprøvetakingsprosedyren holder du blodprøverøret på plass ved å trykke på det med tommelen for å forhindre tilbakeslag og for å sikre fullstendig vakuumentreking.
- Produktet skal bare brukes av helsepersonell med relevant opplæring og i henhold til disse instruksjonene.

Kassering

Generelle retningslinjer for hygiene samt offentlige forskrifter for korrekt avhending av infisert materiale skal respekteres og følges. Etter bruk kastes holderen og alt engangstilbehør sammen i egnede beholdere for biologisk risikoavfall.

Informasjon på etiketten

	Produsent		Temperaturgrense
	Utløpsdato		Må ikke brukes på nytt
	Partikode		Se bruksanvisningen
	Katalognummer		Enhet må foreskrives
	Sterilisert ved stråling		

Forsiktig: I henhold til USA's føderale lovgivning skal denne enheten kun selges eller forskrives av lege.