





Suporte de polipropileno (PP) para utilização única HOLDEX® (estéril)



Instruções de utilização

Aplicável apenas ao produto com a seguinte referência: 450241

Utilização prevista

O suporte de polipropileno (PP) para utilização única HOLDEX® destina-se a ser utilizado em procedimentos de colheita de sangue venoso juntamente com dispositivos de colheita de sangue com uma porta luer fêmea.

Descrição do produto

Um suporte plástico estéril e descartável para utilização única com um conector luer macho descentrado no seu topo. Contém uma agulha de aço inoxidável com capa de borracha acoplada ao seu interior para facilitar a colheita de sangue através da punção da tampa de um dispositivo de colheita de sangue encaixado.

Manuseamento

- 1. Abrir a embalagem cuidadosamente.
- Segurar o suporte com uma mão e encaixar o luer macho no topo do suporte ao luer fêmea do acessório de colheita selecionado. Certificar-se de que o luer está devidamente encaixado.
- 3. Efetuar a colheita de sangue de acordo com a política em vigor na instituição.
- 4. Eliminar conforme descrito abaixo após a colheita de sangue.

Armazenamento

Armazenar o suporte a uma temperatura de 4-25 °C (40-77 °F).

NOTA: Evitar expor à luz solar direta. O armazenamento em condições de temperatura superior à recomendada pode danificar o suporte.

Precauções/Cuidados

- O dispositivo funcionará conforme previsto desde que as instruções sejam rigorosamente seguidas.
- Consultar sempre as instruções de utilização de cada acessório individual.
- Usar sempre luvas durante uma colheita de sangue ao utilizar este dispositivo
- Antes da utilização, verificar a integridade da embalagem individual. Não utilizar se a embalagem estiver comprometida.
- Apenas para utilização única num único paciente. Não reutilizar devido ao risco de infeções perigosas!
- Manter sempre as mãos atrás da agulha durante a utilização e eliminação.
- Nunca tocar no interior do suporte.
- Nunca tapar novamente uma agulha. Recomendamos a utilização de acessórios de segurança.
- Certificar-se sempre do enchimento correto dos tubos ao utilizar um sistema de colheita de sangue evacuado.
- Durante o procedimento de colheita de sangue, mantenha o tubo de colheita de sangue no lugar, pressionando-o com o polegar para evitar retorno e garantir o preenchimento completo do vácuo.
- Este produto deve ser utilizado apenas por profissionais de saúde com formação adequada e de acordo com estas instruções de utilização.

Eliminação

Deve considerar e cumprir as diretrizes gerais de higiene e os regulamentos legais em relação à eliminação apropriada de material infeccioso. Após a utilização, eliminar o suporte e todos os acessórios de utilização única em recipientes adequados à eliminação de materiais com potencial perigo biológico.

Informações no rótulo

	Fabricante	1	Limite de temperatura
	Prazo de validade	②	Não reutilizar
LOT	Código do lote	[]i	Consultar as instruções de utilização
REF	Número de catálogo	Rx Only (USA)	Dispositivo sujeito a receita médica
STERILE R	Esterilizado por irradiação		

CUIDADO: A Lei Federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo a médicos ou mediante prescrição de um medico.

