

### Určené použití

**MiniCollect®** Bezpečnostní lancety jsou určeny pro použití při každodenních rutinních odběrech kapilární krve prováděných kvalifikovaným praktikem. Jsou určeny pouze k jednorázovému použití a musí být používány příslušně školeným zdravotnickým personálem podle těchto pokynů.

### Popis výrobku

**MiniCollect®** Bezpečnostní lancety jsou sterilní, jednorázové prostředky aktivované tlačítkem, určené k provedení vpichu do kůže a umožňující kontrolovat délku a hloubku vpichu. Tento prostředek je tvořen jehlou/čepelí z nerezové oceli v plastovém pouzdře a po vpichu dojde k jejímu automatickému a trvalému zasunutí.

### Bezpečnostní opatření/varování

- Manipulace s **MiniCollect®** Bezpečnostními lancetami musí být prováděna v souladu s předpisy a postupy platnými ve vašem zdravotnickém zařízení.
- Při kontaktu s biologickými vzorky může dojít k přenosu HBV, HCV, HIV a dalších infekčních onemocnění. Při kontaktu s biologickými vzorky zajistěte příslušnou lékařskou pomoc.
- Všechny **MiniCollect®** Bezpečnostní lancety vyhazujte do nádob schválených pro likvidaci biologického odpadu.
- Při propichování kůže a manipulaci se zkumavkami pro odběr krve noste rukavice na jedno použití, aby bylo riziko expozice co nejmenší.
- MiniCollect®** Bezpečnostní lancety nepoužívejte po uplynutí data expirace.
- Ochranný kryt je systém jedné sterilní bariéry. Nepoužívejte, pokud je ochranný kryt poškozený nebo neúmyslně odstraněný.
- MiniCollect®** Bezpečnostní lancety nepoužívejte opakovaně. Opakované použití tohoto produktu může vést k nebezpečným infekcím nebo poraněním.
- Lancety s hloubkou vpichu větší než 2 mm se nedoporučuje používat u dětí do jednoho roku věku.
- Platí pouze pro členské státy Evropské unie: Pokud v souvislosti s tímto výrobkem dojde k závažnému incidentu, je nutné jej nahlásit výrobci a příslušnému orgánu v členském státě, v němž má uživatel/pacient sídlo.
- Platí pouze pro Saúdskou Arábii: Pokud v souvislosti s tímto výrobkem dojde k závažnému incidentu, je nutné jej nahlásit výrobci a Saúdskému úřadu pro potraviny a léčiva (Saudi Food and Drug Authority, SFDA).

### Skladování

Doporučená teplota při skladování: 4–36 °C (40–97 °F). Uchovávejte na suchém místě mimo působení zdrojů přímého či nadměrného tepla.  
**POZNÁMKA:** *Nevystavujte přímému slunečnímu světlu.*

### Manipulace


PŘED PROVEDENÍM VPICHU DO KŮŽE SI PROSTUDUJTE VŠECHNY INFORMACE V TOMTO DOKUMENTU

#### Vybavení potřebné k odběru krve.

Dbejte na to, abyste před provedením vpichu měli připraveny tyto materiály:

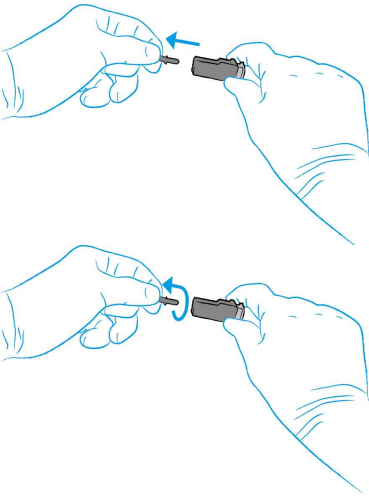
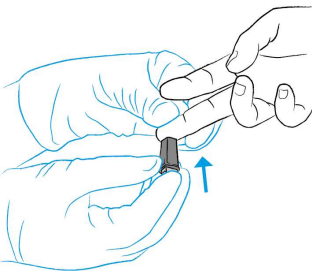

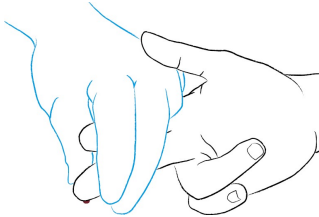
- Všechny potřebné zkumavky **MiniCollect®** označené podle velikosti, odběru a aditiva nebo jiných potřebných sběrných nádob.  
**POZNÁMKA:** *Koagulační zkumavky MiniCollect® 9NC se používají pouze k odběru žilní krve.*
- Rukavice a osobní ochranné pomůcky na jedno použití.
- Štítky k pozitivní identifikaci vzorků pacientů.
- Tampony napuštěné alkoholem pro očištění místa vpichu.
- Náplast nebo gáza.
- Nádoba na ostré předměty pro bezpečnou likvidaci použitého materiálu.

Verzi **MiniCollect®** Bezpečnostní lancety je třeba zvolit podle tloušťky tkáně pacienta a požadovaného množství odebírané krve.

MiniCollect® Bezpečnostní lancety		
Barva	Průměr/délka jehly nebo čepel	Dosažitelné množství krve
Levandulová (jehla)	28G / 1,25 mm	
Oranžová (jehla)	23G / 2,25 mm	
Růžová (čepel)	1,50 mm / 1,00 mm	
Zelená (čepel)	1,50 mm / 1,50 mm	
Modrá (čepel)	1,50 mm / 2,00 mm	







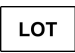







Na místo odběru lze na 3 až 5 minut přiložit zahřátý vlhký ručník (nebo jiné zahřívací pomůcky) s teplotou nepřevyšující 42 °C (108 °F).

**1** Místo vpichu ošetřete vhodnou dezinfekcí. Po očištění nechte místo vpichu do kůže oschnout na vzduchu, aby se mohl uplatnit aseptický účinek alkoholu. Rezidua alkoholu mohou způsobit rychlou hemolýzu, mohou mít nepříznivé účinky na výsledky testu a mohou pacientovi způsobit nepohodlí (pálivý pocit).

			
<p><b>2</b> Pevně držte lancetu mezi prsty a sejměte ochranný kryt tahem (z čepele) nebo kroutivým pohybem (z jehly).</p>	<p><b>3</b> Pevně uchopte místo vpichu, aby nedošlo k náhlému pohybu, a umístěte nad něj lancetu. Poté jemným stisknutím tlačítka aktivujete lancetu.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Při aktivaci <b>MiniCollect® Bezpečnostní lancety</b> nestlačujte místo vpichu.</p>	<p><b>4</b> Okamžitě po vpichu vyjměte lancetu jedním pohybem vzhůru a vložte ji do vhodné nádoby pro ostré předměty.</p>	<p><b>5</b> Doporučuje se otřít první kapku krve gázou, protože je velmi pravděpodobné, že bude obsahovat nadbytek tkáňové tekutiny. Jemně přerušované stlačujte okolní tkáň. Opakovanému silnému tlaku (vytlačování) se <b>musíte</b> vyhnout, protože oba postupy mohou vést k hemolýze nebo kontaminaci vzorků tkáňovou tekutinou.</p>


**POZNÁMKA:** V případě potřeby použijte tyto pokyny spolu s návodem k použití zkumavek pro odběry kapilární krve **MiniCollect®**.

#### Informace na štítku

	Výrobce		Sterilizováno ozářením		Systém jedné sterilní bariéry s vnějším ochranným obalem
	Datum použitelnosti		Nepoužívejte opakovaně		Zdravotnický prostředek
	Číslo šarže		Viz návod k použití		Chraňte před slunečním světlem
	Katalogové číslo		Datum výroby		Zplnomocněný zástupce ve Švýcarsku
	Omezení teploty		Upozornění		

#### Literatura:


CLSI. *Collection of Capillary Blood Specimens*. 7. vydání CLSI Standard GP42. Clinical and Laboratory Standards Institute, 2020.


 Greiner Bio-One GmbH  
 Bad Haller Str. 32  
 4550 Kremsmünster  
 Rakousko

Adresa výrobce:  
 ASAHI Polyslider Company, Limited  
 860-2 Misaki Maniwa, Okayama,  
 719-3226 Japonsko  
 Vyrobeno v Japonsku

[www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics)  
[office@at.gbo.com](mailto:office@at.gbo.com)  
 Telefon +43 7583 6791

Distributor: Greiner Bio-One GmbH, Rakousko


 Greiner Bio-One Vacuette Schweiz GmbH  
 St. Leonhardstraße 39  
 9000 St. Gallen  
 Švýcarsko