MiniCollect®





MiniCollect® Lancelino Sicherheitslanzetten



Gebrauchsanweisung

Verwendungszweck

MiniCollect® Lancelino Sicherheitslanzetten sind für die tägliche Kapillarblutentnahmeroutine bestimmt, die der Anordnung durch einen zugelassenen Arzt bedarf. Sie sind ausschließlich zur einmaligen Verwendung bestimmt und dürfen nur von angemessen geschultem medizinischem Fachpersonal gemäß dieser Gebrauchsanweisung verwendet werden.

Produktbeschreibung

MiniCollect® Lancelino Sicherheitslanzetten sind sterile, kontakt-aktivierte Einheiten für die Hautpunktion zur einmaligen Anwendung. Die Einheit besteht aus einer Edelstahlnadel/-klinge in einem Kunststoffgehäuse, die nach dem Einstich automatisch und dauerhaft zurückgezogen wird.

Sicherheitshinweise/Warnhinweise

- Bitte beziehen Sie sich in Bezug auf den Umgang mit MiniCollect[®] Lancelino Sicherheitslanzetten auf die Richtlinien und Verfahren Ihrer Einrichtung.
- Durch den Kontakt mit biologischen Proben können HBV, HCV, HIV und andere Infektionskrankheiten übertragen werden. Im Falle einer Exposition mit biologischen Proben ist kompetenter ärztlicher Rat einzuholen.
- Entsorgen Sie alle MiniCollect® Lancelino Sicherheitslanzetten in zugelassenen Entsorgungsbehältern für biologische Gefahrenstoffe.
- Während der Hautpunktion und dem Umgang mit Blutentnahmeröhrchen sind Einweghandschuhe zu tragen, um das Expositionsrisiko zu minimieren
- Verwenden Sie keine MiniCollect® Lancelino Sicherheitslanzetten mit überschrittenem Ablaufdatum.
- Die Schutzkappe ist ein Einfach-Sterilbarrieresystem. Nicht verwenden, wenn die Schutzkappe beschädigt oder unbeabsichtigt entfernt wurde.
- MiniCollect® Lancelino Sicherheitslanzetten nicht wiederverwenden. Ein Wiederverwenden des Produktes kann gesundheitsschädliche Infektionen oder Verletzungen zur Folge haben.
- Lanzetten mit einer Einstichtiefe von mehr als 2 mm werden nicht für Kinder unter einem Jahr empfohlen.
- MiniCollect® Lancelino Sicherheitslanzetten werden nicht für Fersenstiche empfohlen.
- Gilt nur für Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Sollten schwerwiegende Ereignisse im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, sind diese dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.
- Nur für Saudi-Arabien zutreffend: Falls schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, müssen diese dem Hersteller und der Saudi Food and Drug Authority (SFDA) gemeldet werden.

Lagerung

Empfohlene Lagertemperatur: 4–36 °C (40–97 °F). Kühl und trocken lagern. Direkte oder übermäßige Hitze vermeiden. **HINWEIS:** Vermeiden Sie eine Exposition gegenüber direktem Sonnenlicht.

Handhabung

LESEN SIE DIESES DOKUMENT VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE MIT DER HAUTPUNKTION BEGINNEN.

Für die Probenahme benötigtes Arbeitsmaterial.

Stellen Sie vor der Durchführung der Hautpunktion sicher, dass folgende Materialien griffbereit sind:

- Alle notwendigen MiniCollect® Röhrchen, gekennzeichnet nach Größe, Entnahme und Additiv oder andere notwendige Sammelbehälter.
 HINWEIS: MiniCollect® 9NC Gerinnungsröhrchen werden nur zur venösen Blutentnahme verwendet. Diese Röhrchen sind in den USA nicht erhältlich
- Einmalhandschuhe und persönliche Schutzausrüstung.
- Etiketten für die eindeutige Identifizierung der Patientenproben.
- Alkoholtupfer für die Reinigung der Punktionsstelle.
- Pflaster oder Verband.
- Entsorgungsbehälter für spitze und scharfe Gegenstände zur sicheren Entsorgung gebrauchten Materials.


Die Ausführung der MiniCollect® Lancelino Sicherheitslanzetten sollte anhand der Gewebedicke des Patienten und der benötigten Blutmenge ausgewählt werden.

Farbe	Nadel- oder Klingengröße/ -länge	Erzielbare Blutmenge
Hellgrün (Nadel)	30G / 1,2 mm	٨
Violett (Nadel)	25G / 1,5 mm	/\
Blau (Nadel)	21G / 1,8 mm	
Grün (Nadel)	21G/2,4 mm	
Gelb (Klinge)	0,8 mm/2 mm	

Ein warmes, feuchtes Handtuch (oder andere Wärmevorrichtungen) mit einer Temperatur von nicht mehr als 42 °C kann verwendet werden, um die Stelle für 3 bis 5 Minuten abzudecken.

980939_Rev04_12-2022 Seite **1/2**

1 Behandeln Sie die Punktionsstelle mit einem geeigneten Antiseptikum. Nachdem Sie die Punktionsstelle gereinigt haben, lassen Sie die Stelle lufttrocknen, sodass sich die antiseptische Wirkung des Alkohols entfalten kann. Restalkohol kann rasch zu einer Hämolyse führen, die Testergebnisse negativ beeinflussen und dem Patienten ein unangenehmes (brennendes) Gefühl bereiten.

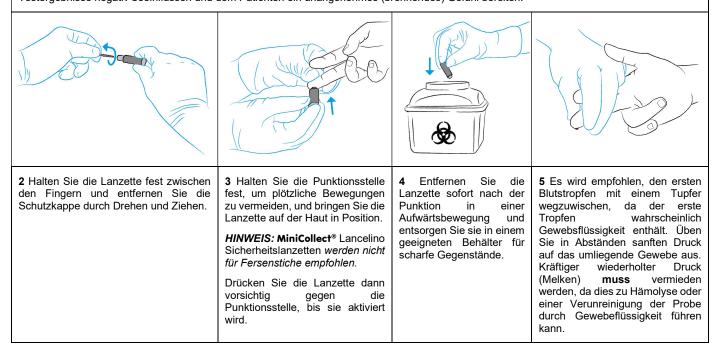

HINWEIS: Falls erforderlich, verwenden Sie diese Anleitung bitte zusammen mit der Gebrauchsanweisung für MiniCollect® Kapillarblutentnahmeröhrchen.

Etikettierung

•••	Hersteller	STERILE R	Sterilisation durch Bestrahlung		Einfach-Sterilbarrieresystem mit äußerer Schutzverpackung
Σ	Verwendbar bis (Datum)	8	Nicht wiederverwenden	MD	Medizinprodukt
LOT	Chargennummer	[]i	Gebrauchsanweisung beachten	*	Vor Sonneneinstrahlung schützen
REF	Artikelnummer	₩	Herstellungsdatum	CH REP	Autorisierter Vertreter in der Schweiz
1	Temperaturgrenzwerte	\triangle	Warnhinweis		

Literatur:

CLSI. Collection of Capillary Blood Specimens. 7. Aufl. CLSI-Standard GP42. Clinical and Laboratory Standards Institute; 2020.



Greiner Bio-One GmbH Bad Haller Str. 32 4550 Kremsmünster Österreich Produktionsort: HTL-STREFA S.A., 95-035 Ozorków, 7 Adamówek St., Polen Hergestellt in Polen

Vertrieb durch Greiner Bio-One GmbH, Österreich

CH REP

Greiner Bio-One VACUETTE Schweiz GmbH St. Leonhardstraße 39 9000 St. Gallen Schweiz www.gbo.com/preanalytics office@at.gbo.com Tel.: +43 7583 6791

980939_Rev04_12-2022 Seite **2/2**