

Contenitore per urine nelle 24 ore con dispositivo di trasferimento integrato
Per uso diagnostico in vitro
Istruzioni per l'uso

Usò previsto

VACUETTE® URI-PLUS è concepito per la raccolta delle urine in un periodo di 24 ore e il successivo trasferimento di un campione di urina in provette per urine. Il dispositivo deve essere usato in conformità alle istruzioni da professionisti sanitari adeguatamente addestrati.

Descrizione del prodotto

VACUETTE® URI-PLUS è un contenitore di plastica color ambra, graduato, non sterile, dotato di un dispositivo di trasferimento integrato nel tappo, inclusa una cannula lunga per la raccolta del campione in provette per la raccolta sottovuoto.

Manipolazione

È responsabilità del laboratorio fornire informazioni sulla conservazione adeguata delle urine durante il periodo di 24 ore.

Raccolta

1. La raccolta nelle 24 ore ha inizio dopo che il/la paziente ha svuotato la vescica nel water per la prima volta al mattino. La data e l'ora vengono annotate sull'etichetta del contenitore e su eventuali altri documenti forniti secondo le istruzioni del laboratorio.
2. Durante le 24 ore successive, tutte le urine del/della paziente devono essere raccolte nel contenitore. Si raccomanda di usare un vaso o contenitore separato e pulito per la raccolta delle urine durante la minzione; il contenuto sarà quindi ogni volta versato nel contenitore per urine nelle 24 ore.
3. Esattamente 24 ore dopo l'inizio, la raccolta viene conclusa con lo svuotamento finale della vescica in un vaso o contenitore, il cui contenuto verrà aggiunto al contenitore per urine nelle 24 ore. Data e ora dovranno essere nuovamente indicate sull'etichetta e su eventuali documenti correlati.
4. Il volume di urina raccolto dovrà essere determinato controllando il livello di riempimento rispetto alla scala sul contenitore.

Trasferimento

5. Miscelare il contenuto del contenitore per urine nelle 24 ore prima di trasferire un campione nella provetta per urine.
6. Sollevare l'etichetta sul tappo del contenitore per urine nelle 24 ore e premere saldamente la provetta per urine nell'apertura del dispositivo di trasferimento. Tenere la provetta in posizione fino a quando non si è completamente riempita.
7. Per motivi di sicurezza, riposizionare l'etichetta sopra l'apertura dopo avere eseguito il trasferimento del campione.

Precauzioni/Avvertenze

- Non toccare l'interno del dispositivo di trasferimento.
- Tenere l'etichetta sopra il dispositivo di trasferimento integrato durante la raccolta nelle 24 ore, onde evitare lesioni accidentali da puntura d'ago.
- Per evitare perdite, tenere sempre diritto il contenitore.

Applicabile solo per gli stati membri dell'Unione Europea: in caso di incidenti gravi in relazione al prodotto, questi devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente dello stato membro in cui risiede l'utente/il paziente.



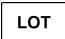
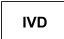






Conservazione del contenitore per urina VACUETTE® URI-PLUS

Tenere al riparo dalla luce diretta del sole.


Smaltimento

Tenere in considerazione e rispettare le linee guida generali di igiene e i requisiti normativi per il corretto smaltimento di materiale infettivo. Il tappo contiene un ago e pertanto deve essere smaltito in un apposito contenitore per oggetti acuminati.

Etichette sulla confezione

	Codice articolo		Non riutilizzare
	Codice lotto		Dispositivo medico-diagnostico <i>in vitro</i>
	Data di scadenza		In alto
	Fabbricante		Tenere al riparo dalla luce solare
	Data di fabbricazione		Consultare le istruzioni per l'uso

Stabilimento di produzione:
ENFA Envases Farmacéuticos, S.A., C/Paralela, 15. Paracuellos de Jarama, 28860 Madrid, Spagna
Distribuito da Greiner Bio-One GmbH, Austria



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster, Austria

www.gbo.com/greanalytics
office@at.gbo.com
Telefono +43 7583 6791

Appendice - Registro delle modifiche apportate dall'ultima revisione

Posizione nel documento	Descrizione della modifica
Precauzioni/Avvertenze	Aggiunta di una nota riguardante la segnalazione di gravi incidenze nell'Unione Europea.
Conservazione	Modifica del titolo da "Conservazione prima della raccolta" a "Conservazione del contenitore per urina VACUETTE® URI-PLUS"
Informazioni sull'etichetta	Aggiunta dei simboli <i>Tenere al riparo dalla luce solare, data di fabbricazione e consultare le istruzioni per l'uso.</i>