

Tiltenkt bruk

VACUETTE® URI-PLUS skal benyttes for oppsamling av urin i løpet av en 24-timersperiode, og påfølgende overføring av en urinprøve til urinprøvetakingsrør. Enheten skal brukes av kvalifisert helsepersonell i henhold til instruksjonene.

Produktbeskrivelse

VACUETTE® URI-PLUS er en ikke-steril, sylindrerformet, brun plastbeholder med en integrert overføringsenhet i lokket inkludert et langt sugerør for prøveoppheving i vakuumrør.

Håndtering

Laboratoriet skal gi informasjon om hensiktsmessig oppbevaring av urin i løpet av 24-timersperioden.

Prøvetaking

1. Etter at pasienten har tømt blæren i toalettet for første gang om morgenen, begynner 24-timersoppsamlingen. Tidspunkt og dato noteres på beholderetiketten og på all dokumentasjon som følger etter instruksjon fra laboratoriet.
2. I løpet av de følgende 24 timene skal hver urindråpe fra pasienten samles opp i beholderen. Det anbefales at det brukes en separat, ren kopp eller et glassbeger til å samle urin, og at innholdet tømmes i 24-timersbeholderen hver gang.
3. Nøyaktig 24 timer etter starten avsluttes oppsamlingen med en endelig tømming av blæren i en ren kopp eller et glassbeger som skal tømmes i 24-timersbeholderen. Tidspunkt og dato skal igjen dokumenteres på etiketten og på eventuelt tilknyttede papirer.
4. Urinvolumet som er oppsamlet avgjøres ved å kontrollere innholdet mot skalaen på beholderen.

Overføring

5. Bland innholdet i 24-timersbeholderen før du overfører en prøve i urinprøvetakingsrør.
6. Løft opp etiketten på lokket på 24-timersbeholderen og skyv urinprøvetakingsrøret ned i åpningen på overføringsenheten. Hold røret i stilling inntil røret er helt fylt.
7. Av sikkerhetsmessige grunner må du bytte etiketten over åpningen etter at prøven er overført.

Forholdsregler/forsiktighetsregler

- Ikke berør innsiden av overføringsenheten.
- La etiketten over den integrerte overføringsenheten være på under 24-timersoppsamlingen for å unngå utilsiktede stikkskader.
- Hold beholderen oppreist hele tiden for å forhindre lekkasje av innholdet.

Gjelder kun for EU-land: Skulle det oppstå alvorlige hendelser i forbindelse med produktet, må disse rapporteres til produsenten og den relevante myndigheten i landet der brukeren/pasienten holder til.

Oppbevaring av VACUETTE® URI-PLUS urinbeholder

Holdes unna direkte sollys.

Avfallshåndtering

Generelle retningslinjer for hygiene samt offentlige forskrifter for korrekt avfallshåndtering av infisert materiale skal respekteres og følges. Lokket inneholder en kanyle og bør derfor kastes i en egnet beholder for skarpe gjenstander.

Merking på emballasje

REF	Katalognummer		Må ikke brukes på nytt
LOT	Partikode	IVD	In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr
	Utløpsdato		Denne side opp
	Produsent		Beskyttes mot sollys
	Produksjonsdato		Se bruksanvisningen

Produksjonssted:
ENFA Envases Farmacéuticos, S.A., C/Paralela, 15. Paracuellos de Jarama, 28860 Madrid, Spania
Distribuert av Greiner Bio-One GmbH, Østerrike

Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster, Austria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Tlf.: +43 7583 6791

Vedlegg – Endringslogg siden siste revisjon

Plassering i dokumentet

Forholdsregler/forsiktighetsregler
Oppbevaring
Informasjon på etiketten

Endringsbeskrivelse

Tilføelse av en merknad om alvorlige hendelser i EU.
Tilpasning av toppteksten fra «Oppbevaring før prøvetaking» til «Oppbevaring av **VACUETTE®** URI-PLUS urinbeholder»
Tilføelse av symbolene *Hold unna sollys*, *produksjonsdato* og *se bruksanvisningen*.