



Adaptér pro odběr vzorků



Pro diagnostické použití in vitro

Návod k použití

Použití

Adaptér pro odběr vzorků umožňuje připojení k systému Luer. Tento produkt je prostředek pro jednorázové použití určený pro odpovídajícím způsobem vyškolené zdravotnické pracovníky. Adaptér pro odběr vzorků není určen pro infúze.

Popis výrobku

Adaptér pro odběr vzorků je vyroben z plastu a je určen k in-vitro diagnostice. Adaptér pro odběr vzorků je sterilní, ale není garantován nulový obsah pyrogenů. Adaptér pro odběr vzorků je balen po jednom kusu a je označen informacemi, jako je například číslo položky, číslo ŠARŽE a datum expirace.

Materiál

Adaptér: polypropylen; pryžový uzávěr: bromobutylová pryž

Opatření/upozornění

- Je-li obal porušený nebo poškozený, vyhodte adaptér pro odběr vzorků a použijte jiný.
- Při venepunkci a manipulaci se zkumavkami pro odběr krve noste rukavice, aby bylo riziko expozice co nejmenší.
- Manipulace s biologickými vzorky a prostředky pro odběr krve (např. lancetami, jehlami, adaptérem Luer, adaptéry pro odběr vzorků a soupravami pro odběr krve) musí být prováděna v souladu s hygienickými a bezpečnostními zásadami a postupy stanovenými ve vašem zdravotnickém zařízení.
- Při kontaktu s biologickými vzorky může dojít k přenosu HBV, HCV, HIV a dalších infekčních onemocnění. Při kontaktu s biologickými vzorky zajistěte dostatečnou lékařskou pomoc.
- Všechny adaptéry pro odběr vzorků vyhazujte do nádob schválených pro likvidaci biologického odpadu.
- Adaptér pro odběr vzorků není určen pro injekce.

Skladování

Doporučená teplota při skladování: 4–36 °C (40–97 °F) skladovat na suchém místě.









Zacházení

- Vyjměte adaptér pro odběr vzorků z obalu a připojte jej k odpovídajícímu systému Luer.
- Provedte odběr vzorku v souladu se standardními zásadami.
POZNÁMKA: *Vždy dodržujte místní bezpečnostní zásady, abyste minimalizovali riziko expozice.*

Likvidace

Při řádné likvidaci infekčního materiálu je nutno dodržovat obecná hygienická pravidla a zákonné předpisy. Riziku infekce mohou zamezit jednorázové rukavice.

Informace na štítku

| | | | |
|---|---------------------|---|-----------------------------------|
|  | Výrobce |  | Omezení teploty |
|  | Datum použitelnosti |  | Nepoužívejte opakovaně |
|  | Číslo dávky |  | Sterilizováno zářením |
|  | Katalogové číslo |  | Výrobek obsahuje přírodní kaučuk. |



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Straße 32,
4550 Kremsmünster
Austria

Vyrobeno v Rakousku

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Tel. +43 7583 6791