

Blodprøvetagnings-/infusionssæt Brugsanvisning

Tilsligtet brug

Blodprøvetagnings-/infusionssæt består af en steril blodprøvetagningskanyle til engangsbrug med sommerfugl, der er fastgjort til en fleksibel slange med en luerkobling. Blodprøvetagnings-/infusionssæt bruges til blodprøvetagning og/eller kortvarig infusion af intravenøse væsker.

Produktbeskrivelse

Blodprøvetagnings-/infusionssæt består af en steril kanyle til engangsbrug med sommerfugl, der er fastgjort til en fleksibel slange med en luerkobling. Det fås i forskellige kombinationer. Blodprøvetagnings-/infusionssæt er pakket enkeltvis, sterilt og kan anvendes sammen med et luersystem (f.eks. HOLDEX®). Udstyret har ingen dele, der er fremstillet af naturgummi-latex. Produktet må udelukkende anvendes af korrekt oplært sundhedspersonale i overensstemmelse med denne vejledning.

Blodprøvetagnings-/infusionssæt	Pakket enkeltvis og sterilt hvilket gør det muligt at anvende sættet med et luersystem.
Blodprøvetagnings-/infusionssæt med Luer-adapter	Pakket enkeltvis og sterilt med Luer-adapter (f.eks. til brug sammen med en standardrørholder).
Blodprøvetagnings-/infusionssæt med Luer-adapter + holder	Pakket enkeltvis og sterilt klar til brug til blodprøvetagning.

Forholdsregler/forsigtighedsregler

- Enheden fungerer som tilsligtet, når anvisningerne følges.
- Undersøg den enkelte emballages integritet før brug. Hvis emballagen er beskadiget, må enheden ikke anvendes.
- Brug ikke blodprøvetagnings-/infusionssæt efter deres udløbsdato.
- En brugt kanyle skal betragtes som kontamineret og skal bortskaffes i en godkendt beholder til skarpe genstande umiddelbart efter brugen.
- Hold altid hænderne bag kanylen under brug og bortskaffelse.
- Buk ikke kanylen. Bøjning af kanylen kan forårsage smerte hos patienten, forårsage nålestiksskader, kan føre til kontaminering af kanylen og forårsage infektioner, kan føre til hæmolyse af prøven eller beskadige kanylen og kanylespidsen.
- Må ikke anvendes subkutant.
- Alle biologiske prøver og tilbehør til blodprøvetagning (f.eks. lancetter, kanyler, luer-adaptore og blodprøvetagnings-/infusionssæt) skal håndteres i henhold til gældende politikker og bestemmelser.
- Søg relevant lægehjælp i tilfælde af eksponering for biologiske prøver (f.eks. i tilfælde af stikskader), da der er risiko for overførsel af HIV, virushepatitis eller andre infektionssygdomme.
- Genbrug af dette produkt kan give anledning til skadelige infektioner, tilskadekomst eller død.
- Bortskaf alle brugte blodprøvetagnings-/infusionssæt sammen med holderen i beholdere til biologisk farligt affald, som er godkendt til denne bortskaffelse.
- Bær altid handsker under udførelse af venepunktur for at minimere eksponeringsrisikoen.
- Undgå lækage af blod, samt at der kommer luft i slangen under en infusion.
- Blødgøringsmidlet DEHP findes i blodprøvetagnings-/infusionssættets slange. Frigivelse af DEHP er mulig ved kontakt med lipider. Der skal udvises særlig forsigtighed ved anvendelse på gravide eller ammende kvinder eller børn.
- Der skal udvises forsigtighed under blodprøvetagning på eksempelvis immobiliserede patienter og patienter med hæmofili eller epilepsi.
- På grund af risikoen for overfladekontamination, hvis der drypper blod fra den brugte kanylespids, anbefales det at bortskaffe kanylen med spidsen opad.
- IV-infusionsprocedurer skal udføres i henhold til gældende retningslinjer og procedurer på stedet.
- Sørg for, at al luft fjernes ved at fylde sættet, før det anvendes til kortvarig IV-infusion.
- Hvert blodprøvetagnings-/infusionssæt kan bruges til enten blodprøvetagning eller infusion, men ikke til begge anvendelser.

Opbevaring

Opbevar blodprøvetagnings-/infusionssæt ved 4-36°C (40-97°F).

BEMÆRK: Må ikke udsættes for direkte sollys. Overskridelse af den anbefalede opbevaringstemperatur kan føre til en forringelse af blodprøvetagnings-/infusionssættets kvalitet.

Håndtering

1. Tag blodprøvetagnings-/infusionssæt ud af emballagen.
2. Kontrollér udstyret. Vælg en ny kanyle, hvis den individuelle emballage har været åbnet eller der er tegn på, at den har været forsøgt åbnet.
3. Vælg stedet til venepunktet. Anlæg, hvis nødvendigt, en staseslange, og klargør stedet med et egnet antiseptisk middel. UNDLAD AT PALPERE stedet efter desinfektion.

Til blodprøvetagning

1. Vælg passende rør og blodprøvetagnings-/infusionssæt.
2. Fjern forsigtigt kanylehætten fra sommerfuglens kanyle.
3. Udfør venepunktur, mens patientens arm holdes nedad. Flashback bekræfter en vellykket venepunktur.
4. Gør kanylen med sommerfuglen fast med tape, hvis det er påkrævet.

- Opsaml blod i henhold til gældende retningslinjer og procedurer på stedet. Fjern stasebåndet, så snart der ses blod i røret. Understøt altid røret for at sikre korrekt vacuum træk og for at forebygge kick-back. **BEMÆRK:** Det første rør i serien vil blive underfyldt på grund af døde volumen i slange. Det anbefales der anvendes et spildrør (ingen tilsætning) først for at sikre det rette antikoagulans/blod-forhold.
- Efter endt blodprøvetagning lægges gaze over blodprøvetagningsstedet uden at udøve tryk.
- Fjern forsigtigt kanylen fra venen.
- Øv forsigtigt tryk på punkturstedet med gazen i henhold til den gældende protokol.
- Bortskaf straks blodprøvetagnings-/infusionssæt i en godkendt affaldsbeholder i henhold til gældende procedurer på stedet.

Til kortvarig IV-infusion

Ved brug til infusionsformål skal en eventuel han-del (Luer-adapter eller Luer-adapter + holder) fjernes fra blodprøvetagningssettet med aseptisk teknik før tilslutning til hun-luerporten.

Fjern forsigtigt kanylehætten fra sommerfuglens kanyle, og fyld sættet i henhold til den anbefalede procedure. Sørg for, at der ikke er luft i systemet under infusionen.

Fyldevolumen		
Størrelser	Slange	Maks. Volumen
21G, 23G, 25G	10 cm / 4 tommer	0,26 ml
21G, 23G, 25G	19 cm / 7,5 tommer	0,40 ml
21G, 23G, 25G	30 cm / 12 tommer	0,56 ml

- Udfør venepunktur, mens patientens arm holdes nedad, og sørg for, at infusionssættet er korrekt fastgjort til patienten.
- Påbegynd kortvarig IV-infusion. **BEMÆRK:** Følg de på stedet gældende procedurer. Dog anbefales det, at udstyret kun anvendes til en enkelt infusion med en varighed på maks. 5 timer.
- Efter endt infusion afsluttes proceduren (se punkt 6-9 i afsnittet vedrørende blodprøvetagning ovenfor).

Blodprøvetagning/infusion



Bortskaffelse



Oplysninger på etiketten

	Producent		Temperaturgrænse
	Anvendes før:		Må ikke genanvendes
	Batchkode		Steriliseret med ethylenoxid
	Katalognummer		Læs brugsanvisningen
	Produktionsdato		

Forsigtig: I henhold til amerikansk forbundslovgivning må dette produkt udelukkende sælges eller ordineres af en læge.

Litteratur:

CLSI. *Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens*. 7th ed. CLSI standard GP41. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2017.

Produktionssted:
Nipro (Thailand) Corporation Ltd.
10/2 Moo 8 Bangnomko, Sena,
Phra Nakhon Si Ayutthaya 13110,
Thailand
Fremstillet i Thailand
Distribueret af Greiner Bio-One GmbH, Østrig



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Østrig

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefon +43 7583 6791