

## VACUETTE® SAFELINK

### Υποδοχέας με αρσενικό σύνδεσμο luer lock (αποστειρωμένος) Οδηγίες χρήσης

#### Προοριζόμενη χρήση

Το VACUETTE® SAFELINK προορίζεται για χρήση σε διαδικασίες αιμοληψίας, σε συνδυασμό με συσκευές με θύρα θηλυκού luer.

#### Περιγραφή προϊόντος

Αποστειρωμένος, αναλώσιμος πλαστικός υποδοχέας μίας χρήσης με αρσενικό σύνδεσμο luer lock κεντραρισμένο στο επάνω μέρος του υποδοχέα. Στο εσωτερικό του υποδοχέα υπάρχει συνδεδεμένη μια βελόνα από ανοξείδωτο χάλυβα με προστατευτικό κάλυμμα, η οποία διευκολύνει τη λήψη αίματος καθώς χρησιμεύει στη διάτρηση του καπακιού ενός συνδεδεμένου σωληναρίου κενού.

#### Χειρισμός

1. Ανοίξτε προσεκτικά τη συσκευασία.
2. Κρατήστε τον υποδοχέα στο ένα χέρι και συνδέστε τον αρσενικό σύνδεσμο luer που βρίσκεται στο επάνω μέρος του υποδοχέα στον θηλυκό σύνδεσμο luer της συσκευής λήψης της επιλογής σας, βιδώνοντας απαλά. Βεβαιωθείτε ότι η συναρμογή είναι σταθερή, όμως μην σφίγγετε υπερβολικά.
3. Πραγματοποιήστε την αιμοληψία σύμφωνα με την πολιτική του ιδρύματός σας.
4. Μετά την αιμοληψία, απορρίψτε τον υποδοχέα όπως περιγράφεται παρακάτω.

#### Αποθήκευση

Φυλάσσετε τον υποδοχέα σε θερμοκρασία 4–25 °C (40–77 °F)

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αποφύγετε την έκθεση στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Η υπέρβαση της ανώτατης συνιστώμενης θερμοκρασίας αποθήκευσης μπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση του υποδοχέα.

#### Προφυλάξεις/Επισημάνσεις προσοχής

- Η απόδοση της συσκευής θα είναι η αναμενόμενη, όταν οι οδηγίες ακολουθούνται αναλόγως.
- Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με περιφερικό φλεβοκαθετήρα (PIVC), πρέπει να χρησιμοποιηθεί σετ προέκτασης.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση όταν η πίεση της ροής αίματος υπερβαίνει τα 185 mmHg.
- Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για κάθε μεμονωμένο εξάρτημα.
- Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη διάρκεια μιας αιμοληψίας με αυτήν τη συσκευή.
- Ελέγχετε την ακεραιότητα κάθε μεμονωμένης συσκευασίας πριν από τη χρήση. Εάν η συσκευασία έχει σπάσει, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Για μία χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Μην επαναχρησιμοποιείτε το προϊόν, καθώς υπάρχει κίνδυνος επικίνδυνων λοιμώξεων!
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για μία διαδικασία αιμοληψίας.
- Κρατάτε τα χέρια σας πίσω από τη βελόνα κατά τη χρήση ή την απόρριψη.
- Ποτέ μην αγγίζετε το εσωτερικό του υποδοχέα.
- Ποτέ μην τοποθετείτε ξανά το καπάκι στη βελόνα. Συνιστάται η χρήση εξαρτημάτων ασφαλείας.
- Διατηρείτε πάντα το σωληνάριο στη θέση του, πιέζοντάς το με τον αντίχειρα ή τον δείκτη για να διασφαλιστεί η αιμοληψία υπό πλήρες κενό.
- Κατά τη χρήση συστήματος αιμοληψίας υπό κενό, ελέγχετε πάντοτε ότι οι σωλήνες έχουν πληρωθεί σωστά.
- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας και μόνο σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες.

#### Απόρριψη

Θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη και να τηρείτε τις γενικές οδηγίες υγιεινής και τους νομικούς κανονισμούς για την κατάλληλη απόρριψη μολυσματικού υλικού. Μετά τη χρήση, απορρίψτε τον υποδοχέα μαζί με όλα τα εξαρτήματα μίας χρήσης σε κατάλληλα δοχεία απόρριψης βιολογικά επικίνδυνων υλικών.

#### Πληροφορίες ετικέτας

	Κατασκευαστής		Όριο θερμοκρασίας
	Ημερομηνία λήξης		Μην επαναχρησιμοποιείτε το προϊόν
	Κωδικός παρτίδας		Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
	Αριθμός καταλόγου	Rx only	Συσκευή για την οποία απαιτείται συνταγή
	Αποστειρωμένο με ακτινοβολία		