

Istruzioni per l'uso

Uso previsto

La lancetta di sicurezza per incisione del tallone PIXIE **MiniCollect®** è utilizzata per il prelievo di campioni ematici dai talloni dei neonati durante le analisi del sangue.

Descrizione del prodotto

La lancetta di sicurezza per incisione del tallone PIXIE **MiniCollect®** è un dispositivo sterile e monouso per l'incisione del tallone. Il dispositivo è costituito da una lama in acciaio inossidabile, contenuta in un alloggiamento di plastica, che si ritrae in modo automatico e permanente dopo l'incisione. Il dispositivo penetra la cute con un movimento pendolare per tagliare i capillari.

Precauzioni/Avvertenze

- Per la manipolazione delle lancette di sicurezza per incisioni sul tallone PIXIE **MiniCollect®**, fare riferimento alle politiche e alle procedure della struttura in cui si opera.
- Il contatto con campioni biologici può potenzialmente trasmettere malattie infettive come HBV, HCV, HIV e altre. In caso di esposizione a campioni biologici, sottoporsi subito al trattamento clinico appropriato.
- Smaltire tutte le lancette di sicurezza per incisione del tallone PIXIE **MiniCollect®** in contenitori per materiali a rischio biologico approvati per questo tipo di smaltimento.
- Durante l'incisione del tallone e la manipolazione dei campioni di sangue capillare, indossare guanti monouso per ridurre al minimo il rischio di esposizione.
- Non utilizzare le lancette di sicurezza per incisione del tallone PIXIE **MiniCollect®** dopo la data di scadenza.
- Non utilizzare le lancette di sicurezza per incisione del tallone PIXIE **MiniCollect®** se il meccanismo di blocco è stato rimosso.
- Non utilizzare le lancette di sicurezza per incisione del tallone PIXIE **MiniCollect®** se il blister protettivo risulta danneggiato.
- Le lancette di sicurezza per incisioni sul tallone PIXIE **MiniCollect®** sono raccomandate solo per le incisioni sul tallone del neonato.
- Il prodotto è monouso, non riutilizzare.

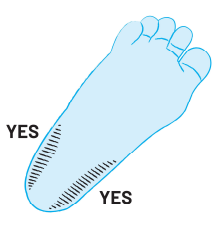
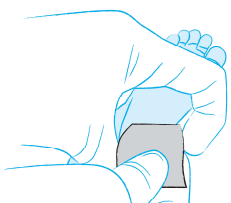
Conservazione

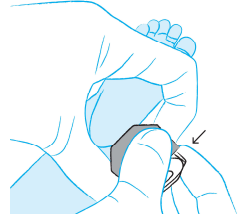
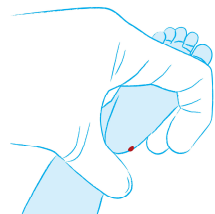
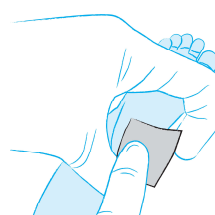
Conservare in un ambiente asciutto e ben ventilato. Il prodotto non deve entrare in contatto con sostanze tossiche, velenose e corrosive.

Manipolazione

Fare riferimento alle raccomandazioni di CLSI GP42-Ed7 relative alla scelta del dispositivo adeguato, tenendo conto dell'età e del peso del bambino.

Codice colore	Profondità/lunghezza dell'incisione	Applicazione
Verde	Profondità 0,65 mm/Lunghezza di incisione 1,40 mm	Micro-Preemie
Arancione	Profondità 0,85 mm/Lunghezza di incisione 1,75 mm	Preemie
Giallo	Profondità 1,00 mm/Lunghezza di incisione 2,50 mm	Neonati

1		Selezionare un sito all'interno dell'area evidenziata. Preriscaldare o massaggiare il sito. È possibile utilizzare un asciugamano caldo e umido (o altri dispositivi di riscaldamento) a una temperatura non superiore a 42 °C (108 °F) per coprire l'area per 3-5 minuti.
2		Pulire il sito di incisione del tallone con un tampone antisettico (alcol isopropilico al 70%) e lasciare asciugare la cute all'aria. I residui di alcol può causare fastidio al paziente durante l'esecuzione dell'incisione e possono influire sul campione di sangue, ad esempio a causa di emolisi.

4		Rilasciare il meccanismo di blocco premendo verso il basso la linguetta di sicurezza.
5		Sollevare il piede oltre il livello del cuore del bambino. Posizionare il dispositivo per incisione sul tallone, assicurandosi che il lato della lama del dispositivo sia completamente a contatto con la cute. Premere quindi il pulsante per rilasciare la lama.
6		Immediatamente dopo l'esecuzione, rimuovere il dispositivo dal tallone del neonato e smaltirlo in un contenitore per oggetti taglienti a rischio biologico.
7		Si consiglia di eliminare la prima goccia di sangue con una garza sterile, dato che è molto probabile che contenga fluido tissutale in eccesso. Applicare una leggera pressione intermittente sul tessuto circostante. Evitare una pressione forte e ripetitiva (effetto "mungitura") in quanto potrebbe causare emolisi o contaminazione del campione con liquido tissutale. Secondo CLSI GP42, 7ª edizione, si consiglia di posizionare il piede del neonato leggermente più in basso rispetto al resto del corpo, se possibile.
8		Dopo il prelievo di sangue, premere delicatamente una compressa di garza sterile asciutta sul sito di incisione fino al termine del sanguinamento.

Informazioni sull'etichetta

	Fabbricante		Sterilizzazione tramite irradiazione
	Data di scadenza		Non riutilizzare
	Codice lotto		Consultare le istruzioni per l'uso
	Numero di catalogo		Dispositivo medico
	Attenzione		Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Data di produzione		

Riferimenti:

CLSI. *Collection of Capillary Blood Specimens*. 7th ed. CLSI standard GP 4. Clinical and Laboratory Standards Institute; 2020.



SteriLance Medical (Suzhou) Inc.
No.168 PuTuoShan Road, New District
215153 Suzhou, Jiangsu, R.P.Cina



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP L'Aia
Paesi Bassi

Distribuito da:
Greiner Bio-One Italia S.r.l.
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Austria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefono +43 7583 6791