


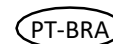

## Tubos sem Aditivo Z MiniCollect®

Para Diagnóstico *In Vitro*  
Instruções de Uso



### Indicação de Uso

Os Tubos sem Aditivo **MiniCollect®** são para coleta, transporte, separação e processamento de amostras de sangue capilar para análises sorológicas em laboratório clínico.

### Descrição do Produto

Os Tubos **MiniCollect®** com sistema integrado para coleta de pouco volume de amostras biológicas, são de plástico, sem vácuo, não estéril. A tampa é codificada por cores para identificar os aditivos que estão presentes em concentrações variáveis dependendo do tipo de tubo e dos volumes indicados.

Os tubos sem aditivo **MiniCollect®** não contém nenhum anticoagulante ou ativador de coágulo.

Este produto deve ser utilizado apenas por profissionais da área da saúde devidamente treinados de acordo com essas instruções

Tipo de Tubo	Tipo de Amostra	Cor da Tampa
Tubo sem Aditivo Z <b>MiniCollect®</b> – Não disponível em USA	Sangue Capilar	Branca

### Versões do Produto

Tubos **MiniCollect®** com tubo de transporte opcional 13 x 75 mm (transparente ou âmbar)

Tubos **MiniCollect®** pré-acoplado com tubo de transporte 13 x 75 mm

### Armazenamento do Produto

Armazenar os tubos entre 4–25°C (40–77°F). Evite exposição direta a luz solar. O armazenamento em temperaturas acima do recomendado pode danificar o produto (ex. evaporação dos aditivos líquidos, coloração, etc.).

### Armazenamento e Estabilidade da amostra

Consulte as instruções de uso ou literatura para obter informações sobre o material a ser coletado, armazenamento e estabilidade.

### Cuidados / Precauções

- Não utilizar os tubos **MiniCollect®** caso apresentem algum material estranho!
- Manipular toda amostra biológica e os materiais perfurocortantes para coleta de sangue de acordo com as normas e procedimentos de cada instituição.
- Obter atenção médica apropriada no caso de qualquer exposição a amostras biológicas.
- Verificar se todos os tubos estão adequados e dentro do prazo de validade antes do uso. Não utilizar os tubos após o prazo de validade.
- O laboratório é responsável por verificar se a troca do tubo por outro não afetará significativamente o resultado analítico obtido na amostra do paciente.
- O sistema **MiniCollect®** é de uso único.

### Coleta da Amostra e Manipulação

#### Materiais necessários, mas não fornecidos

- Etiquetas para identificação das amostras
- Para análise de bilirrubina os Tubos **MiniCollect®** devem ser usados com tubos de transporte âmbar ou outra proteção adicional à luz
- Pratique as precauções universais de biossegurança, use luvas e equipamentos de proteção contra exposição de sangue contaminado por patógenos
- Material para antisepsia
- Curativo
- Dependendo do volume de sangue e do procedimento, aquecer o local a ser puncionado se necessário
- Curativo se necessário
- Recipiente apropriado para descarte de material contaminado
- Lancetas de Segurança

#### Recomendações para Ordem de Coleta (baseado em CLSI GP42-A6)

Se outros tubos **MiniCollect®** forem utilizados para coleta de amostras, inclusive amostras em EDTA, o tubo de EDTA deve ser preenchido primeiro para garantir o volume correto e resultados confiáveis. Em seguida, os demais **MiniCollect®** com aditivos são coletados, sendo os tubos de sorologia coletados por último.

- 1 EDTA
- 2 Heparina / Heparina com Gel
- 3 Glicose
- 4 Soro / Soro com Gel

## Remoção da Tampa

A ranhura da tampa facilita a abertura do Tubo **MiniCollect®**. Pressionar suavemente para cima o triângulo localizado na tampa do **MiniCollect®**. O triângulo indica a posição oposta do funil.

## Coleta da Amostra

Para a coleta de sangue por punção cutânea, por favor, consulte as instruções de uso para a lanceta. O fluxo de sangue do local da punção se torna melhor quando o local da punção está voltado para baixo. A primeira gota de sangue capilar deve ser desprezada, pois pode conter fluido tecidual. Aplicar gentilmente uma pressão intermitente no tecido mais próximo (ou próximo do local da punção quando o sangue é obtido de um dedo). Pressão forte e repetitiva (ordenhando) não deve ser aplicada; isto pode causar hemólise ou contaminação por fluidos teciduais nas amostras e alterar os resultados dos testes.

Após desprezar a primeira gota, deixe as gotas de sangue caírem pela parede do tubo **MiniCollect®**. Se uma gota de sangue permanecer alojada dentro do funil, toque suavemente o tubo em uma superfície rígida para deslocá-la para o fundo do tubo. Os tubos devem ser preenchidos corretamente de acordo com a marca de preenchimento (volume nominal). Após o término da coleta, fechar o tubo com a tampa original, um clique audível indica o fechamento correto. Agitação vigorosa pode causar formação de espuma e hemólise. As amostras de sangue devem ser identificadas imediatamente após a coleta.









## Centrifugação

A retração de coágulo no tubo sem aditivo deve ocorrer completamente antes da centrifugação. Certifique-se de que os tubos estejam posicionados corretamente na caçapa da centrífuga. É recomendado que os Tubos **MiniCollect®** sejam centrifugados a 3000g por um período de 10 minutos. Outras configurações de centrifugação também podem proporcionar uma separação aceitável. A centrifugação deve ser realizada a uma temperatura de 15 a 24°C (59 a 75°F).

## Descarte


- As precauções universais de biossegurança e as diretrizes de descarte seguro de materiais infecciosos devem ser seguidas.
- Sempre use luvas durante a coleta de sangue e o descarte de material.
- Tubos contaminados ou preenchidos de sangue coletado devem ser descartados em recipiente apropriado para a coleta de material biológico, os quais deverão seguir a política de gerenciamento de resíduos da instituição.

## Informações da Etiqueta

	Número do Item		Limite de Temperatura
	Número de Lote		Produto para Diagnóstico <i>in Vitro</i>
	Prazo de Validade		Consultar Instruções de Uso
	Não reutilizar		Fabricante
Rx only	Dispositivo de Prescrição		

### Literatura

GP42-A6 Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens; Approved Standard-Sixth Edition.

 Greiner Bio-One GmbH  
Bad Haller Str. 32,  
4550 Kremsmünster, Austria

[www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics)  
[office@at.gbo.com](mailto:office@at.gbo.com)  
Phone +43 7583 6791

### Importador e Distribuidor:

Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.  
Av. Affonso Pansan, 1967 – Vila Bertini – CEP. 13.473-620 – Americana – SP  
Fone (0xx) (19) 3468-9600 FAX (0xx) (19) 3468-9601  
CNPJ 71.957.310/0001-47 – site: [www.gbo.com](http://www.gbo.com)

### Produto para Diagnóstico *in vitro* de Uso Único

### Responsável Técnico:

Dra. Nádia Camila Gennaro Alves CRF-SP nº 32.272

**ANVISA / MS nº 10290310061**

Informações de uso do produto, solicitar via e-mail: [suporte@gbo.com](mailto:suporte@gbo.com)