


Sistema para Coleta de Sangue a Vácuo VACUETTE® Instruções de Uso

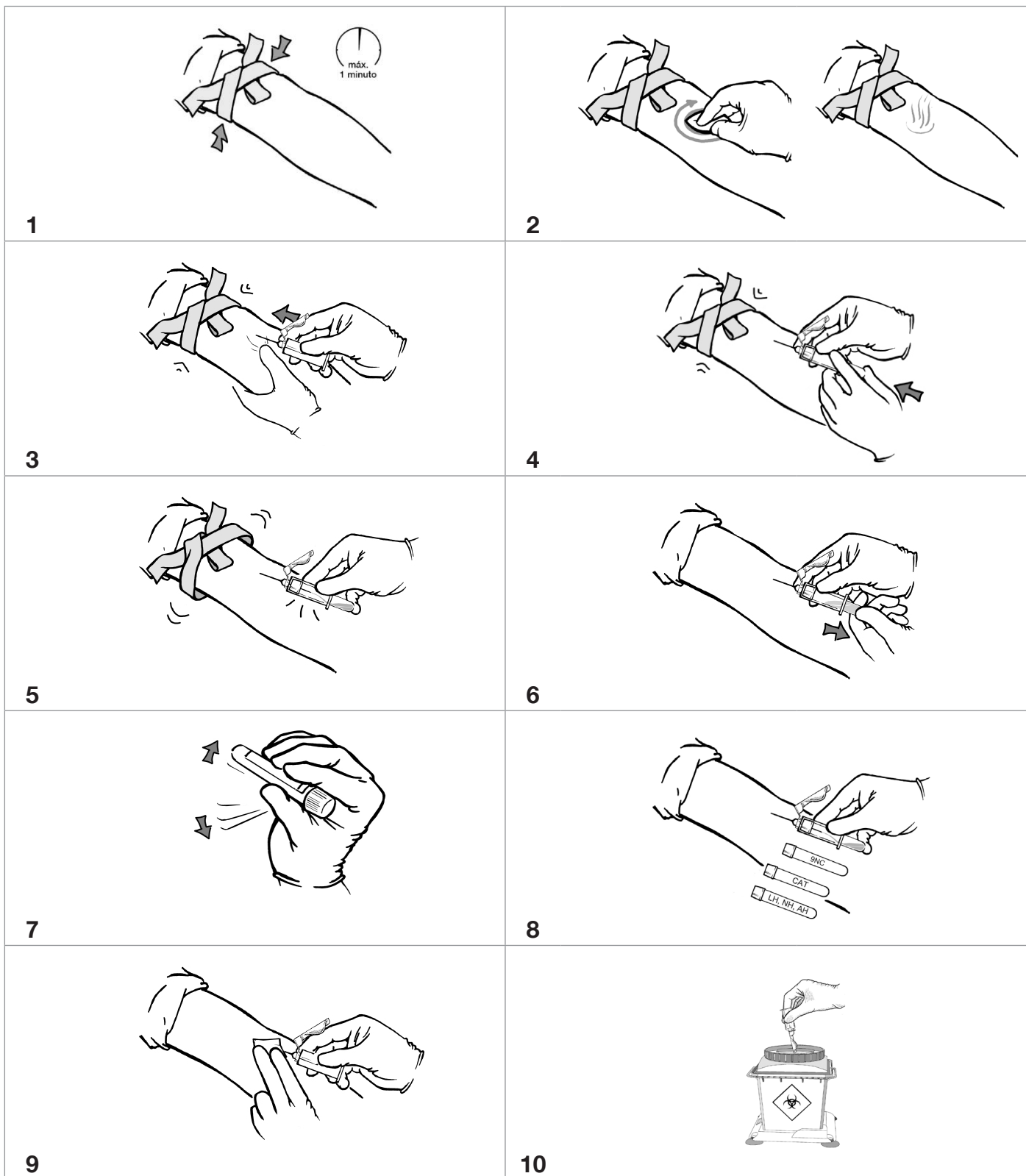

Importador e Distribuidor:
Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Av. Afonso Pansan, 1967 – Vila Bertini
CEP. 13.473-620 – Americana – SP
Fone +55 19 3468-9600 / FAX +55 19 3468-9601 CNPJ 71.957.310/0001-47
www.gbo.com

Produto de Uso Médico para Diagnóstico *in Vitro*
Responsável Técnico:
Dra. Nádia C. G. Alves – CRF-SP nº 32.272

CADASTRO NA ANVISA / MS
10290310032 – Vacuette tubo para coleta de sangue a vácuo com Anticoagulante
10290310034 – Vacuette tubo para coleta de sangue a vácuo para Sorologia
10290310037 – Vacuette tubo para coleta de sangue a vácuo (Sem Aditivo)

Informações de Uso do produto, solicitar via e-mail: suporte@gbo.com



Greiner Bio-One Brasil, Av. Afonso Pansan 1.967 13.473-620, Americana-SP, Brazil
Made in Brazil

?



/



Idioma	Nome do Parceiro	Telefone n°.	@ E-mail
Búlgaro	CHRONO Limited	+359 2 815 9800	office@chrono-bg.com
Chinês	Greiner Bio-One Suns Co., Ltd.	+86 10 8355 1991	office@cn.gbo.com
Croata	HKO Medical Systems	+385 12441 757	hko@hko.hr
Dinamarquês	Hettich Labinstrument ApS.	+45 3677 5555	info@hettich.dk
Eslovaco	MED LEADER S.R.O.	+421 2622 40188	medleader@medleader.sk
Espanhol	VACUETTE ESPAÑA S.A.	+34 91 652 7707	info@es.gbo.com
Estoniano	ISIS Medical OÜ	+372 6775 759	info@isismedical.ee
Finlandês	Pamark Oy	+358 201 555 660	asiakaspalvelu@pamark.fi
Francês	Greiner Bio-One France SAS	+33 1 69 86 25 25	accueil@gbo.com
Grego	Bio Line Scientific	+30 210 522 65 47	demagos@hol.gr
Holandês	Greiner Bio-One B.V.	+31 172 420 900	info@nl.gbo.com
Húngaro	Greiner Bio-One Hungary Kft.	+369 621 3088	office@hu.gbo.com
Inglês Americano	Greiner Bio-One North America Inc.	1-800-515-8112	patech@gbo.com
Inglês Britânico	Greiner Bio-One Ltd.	+44 1453 825 255	info@uk.gbo.com
Italiano	Greiner Bio-One Italia S.r.l.	+39 02 94383340	office@it.gbo.com
Norueguês	Med-Kjemi AS	+47 6676 4900	firmapost@med-kjemi.no
Polonês	Eclipse Spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k.	+48 12 29 50 150	biuro@eclipsemedical.pl
BRA-Português	Greiner Bio-One Brasil	+55 19 3468 9600	suporte@gbo.com
Português	VACUETTE Portugal S.A.	+351 252 647 721	info@vacuette.pt
Romeno	Diamedix IMPEX SA	+40 21 6688866/67	office@diamedix.ro
Russo	OMB Ltd Russian Federation	+7 (495) 925 8150	omb@omb.ru
Sueco	Hettich Labinstrument AB	+46 8752 0030	info@hettichlabinstrument.se
Tcheco	Dialab spol. s.r.o.	+420 257 9 10 260	office@dialab.cz
Turco	Greiner Bio-One Turkey	+90 216 576 6004	office@tr.gbo.com