

## Torniquete Super-T VACUETTE®

Torniquete Descartável

### Instruções de uso

#### Indicação de Uso

O Super-T VACUETTE® é utilizado na coleta de sangue de rotina para aplicar pressão no braço para tornar as veias proeminentes e mais fáceis de encontrar e sentir. Este produto deve ser utilizado apenas por profissionais de saúde devidamente treinados de acordo com essa instrução de uso.

#### Descrição do Produto

O Super-T VACUETTE® é um torniquete descartável de uso único, feito de silicone e revestido com talco em pó. Não contém quaisquer componentes feitos de borracha natural seca e é sem-DEHP.

#### Manuseio

1. Aplicar o torniquete 7,5 cm acima do local da punção.	2. Simplesmente colocar o Super-T VACUETTE® em volta do braço passando uma extremidade pela abertura.	3. Puxar a extremidade com fenda para cima até a tensão desejada ser atingida e soltar suavemente.	4. O torniquete ficará preso na posição correta.	5. Quando o sangue fluir para o primeiro tubo, puxar a extremidade com a fenda e esta irá se soltar imediatamente.

Se o torniquete permanecer no braço do paciente por mais de 1 minuto, desamarrar e aplicar novamente após 2 minutos.<sup>1</sup>

#### Cuidados/Precauções

- Não aplicar pressões elevadas que possam prejudicar o fluxo do sangue para a extremidade.
  - Soltar o torniquete assim que o sangue começar a fluir para o primeiro tubo.
  - Estase muito prolongada pode contribuir para a hemólise.
  - Não utilizar o torniquete em pele que apresente ferimento.
  - Descartar o torniquete imediatamente após o uso e não reutilizar.
  - Reutilizar torniquete descartável pode causar doenças ao paciente devido a contaminação cruzada.
- Qualquer incidente grave que ocorrer com o produto, deve-se comunicar o fabricante o fabricante e a autoridade nacional responsável.

#### Armazenamento

Evite exposição direta à luz solar.

Temperatura de armazenamento: 4–25 °C

#### Descarte

Descartar de acordo com a política da instituição.

#### Informações da Etiqueta

	Fabricante		Limite de Temperatura
	Data de Validade		Não reutilizar
	Número de Lote		Consultar as Instruções de Uso
	Número do Item		Dispositivo Médico
	Manter protegido da luz solar		

Literatura:

<sup>1</sup>CLSI GP41-A7: CLSI. Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens. 7th ed. CLSI standard GP41

Local de Produção:  
STARLIM Spritzguss GmbH,  
Mühlstrasse 21,  
4614 Marchtrenk, Austria  
Distributed by Greiner Bio-One GmbH,  
Áustria



Greiner Bio-One GmbH  
Bad Haller Str. 32  
4550 Kremsmünster  
Áustria

[www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics)  
[office@at.gbo.com](mailto:office@at.gbo.com)  
Phone +43 7583 6791

Distribuído por: Greiner Bio-One GmbH, Áustria

**Importador e Distribuidor:**

Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.  
Av. Affonso Pansan, 1967 – Vila Bertini – CEP. 13.473-620 – Americana – SP  
Fone +55 19 3468-9600 / FAX +55 19 3468-9601  
CNPJ 71.957.310/0001-47 – site: [www.gbo.com](http://www.gbo.com)

**Produto de Uso Médico**

**Responsável Técnico:**

Dra. Nádia Camila Gennaro Alves CRF-SP nº 32.272

**ANVISA / MS 10290319007**

Informações de uso do produto, solicitar via e-mail: [suporte@gbo.com](mailto:suporte@gbo.com)