

VACUETTE® Super-T Torniquete descartável Instruções de utilização

Utilização a que se destina

O **VACUETTE®** Super-T é utilizado na colheita de sangue de rotina para aplicar pressão no braço para tornar as veias mais visíveis e mais fáceis de palpar e de encontrar. Este produto deve ser utilizado apenas por profissionais de saúde com formação adequada e de acordo com as instruções de utilização.

Descrição do produto

O **VACUETTE®** Super-T é um torniquete descartável de utilização única, feito de silicone e revestido com talco. Este não contém quaisquer componentes feitos de borracha natural seca nem de DEHP.

Manuseamento

1 Coloque o torniquete 7.5 a 10 cm acima do local da punção.	2 Coloque simplesmente o VACUETTE® Super-T em volta do braço, passando uma extremidade pela abertura.	3 Segure ambas as extremidades do torniquete, puxe a extremidade com o entalhe pela abertura e liberte-a de seguida.	4 O torniquete ficará então preso na posição correta.	5 Quando o sangue fluir para o primeiro tubo, puxe simplesmente a extremidade com a abertura e esta irá soltar-se imediatamente.

Libertar o torniquete se estiver aplicado durante mais de 1 minuto, e reaplicar após 2 minutos. ¹

Precauções/Cuidados

- Não aplique pressões elevadas que possam prejudicar o fluxo de sangue arterial para as extremidades.
- Solte o torniquete assim que o sangue começar a fluir para o interior do primeiro tubo.
- Uma estase demasiado longa e elevada poderá resultar em hemólise.
- Não utilizar na pele gretada.
- Eliminar o torniquete imediatamente após a utilização e não reutilizar.
- A reutilização do torniquete descartável pode levar a uma doença para o paciente devido à contaminação cruzada.

Em caso de ocorrência de incidentes graves em relação ao produto, estes devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente do Estado-membro no qual o utilizador/doente está estabelecido.

Armazenamento

Evite a exposição à luz solar direta.
Temperatura de armazenamento: 4–25 °C

Eliminação

Eliminação de acordo com a política das suas instalações.

Informações do rótulo

	Fabricante		Limite de temperatura
	Prazo de validade		Não reutilizar
	Código do lote		Consultar as instruções de utilização
	Número de catálogo		Dispositivo médico
	Manter afastado da luz solar		

Literatura:

¹CLSI GP41-A7: CLSI. Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens. 7th ed. CLSI standard GP41

Production location:
STARLIM Spritzguss GmbH,
Mühlstrasse 21,
4614 Marchtrenk, Austria
Distributed by Greiner Bio-One GmbH,
Austria



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Austria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Phone +43 7583 6791