

# HANDHABUNGSEMPFEHLUNGEN

DIE VOLLSTÄNDIGEN HANDHABUNGSHINWEISE

entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Produkts unter [www.gbo.com](http://www.gbo.com).

## MINICOLLECT®

### Kapillarblutentnahmesystem



1

Die Punktionsstelle vorwärmen und desinfizieren.



2

Kappe abnehmen.




3

Führen Sie die Punktion durch und entsorgen Sie den ersten Tropfen Blut.



4

Entnehmen Sie die Blutprobe.

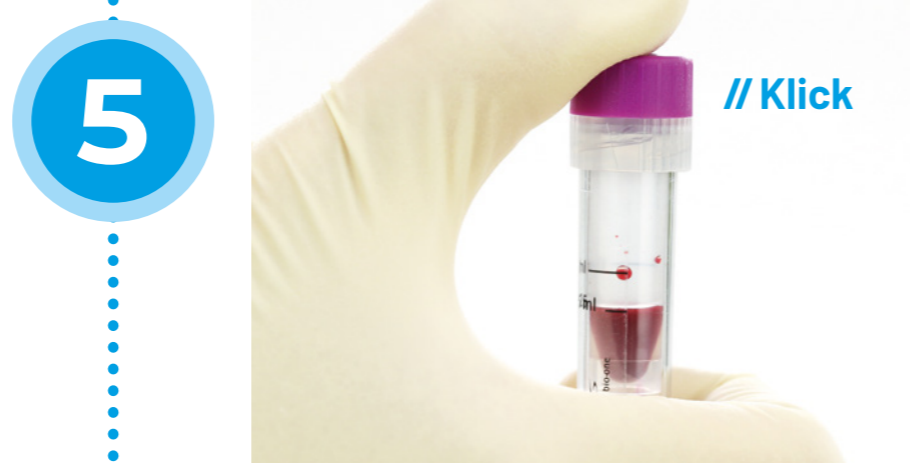

5

// Klick

Verschließen Sie das Röhrchen mit der Originalkappe.



6

8-10x

Schwenken Sie das Röhrchen unmittelbar nach der Entnahme vorsichtig.

## ENTNAHME-REIHENFOLGE

GEMÄSS CLSI GP42-ED7

Hinweis: Bitte beachten Sie für die Reihenfolge der Blutentnahme immer die Vorgaben Ihrer Einrichtung.



1

EDTA

2

Andere Additive

3

Röhrchen ohne Additive und Serum-Röhrchen

## MINICOLLECT® GERINNUNGSRÖHRCHEN

Nur zur Verwendung mit venösem Blut bestimmt.

1



Überführen von venösem Blut in das Röhrchen.

2



Verschließen Sie das Röhrchen mit der Originalkappe.

3



4-5x

Schwenken Sie das Röhrchen sofort vorsichtig.

ZUSÄTZLICH

## BREITES SORTIMENT AN SICHERHEITSLANZETTEN


### MINICOLLECT® PIXIE

Sicherheitslanzetten zur Ferseninzision

hellgrün ↓ 0,65 mm

orange ↓ 0,85 mm

gelb ↓ 1 mm

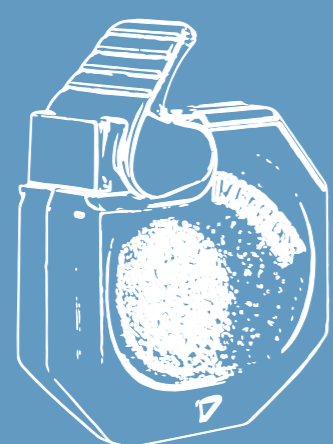

### MINICOLLECT®

Sicherheitslanzette mit Nadel

lila ↓ 1,25 mm

orange ↓ 2,25 mm

mit Klinge

rosa ↓ 1 mm

grün ↓ 1,5 mm



blau ↓ 2 mm

### MINICOLLECT®

Lancelino Sicherheitslanzette mit Nadel

hellgrün ↓ 1,2 mm

lila ↓ 1,5 mm

blau ↓ 1,8 mm

grün ↓ 2,4 mm

mit Klinge

gelb ↓ 2 mm



Die Blutmenge hängt von der Länge der Lanzette ab und wird mit Blutstropfen markiert



**Legal Disclaimer:** Diese Produktinformationen richten sich ausschließlich an medizinisches Fachpersonal. Produkte von Greiner Bio-One dürfen nur von entsprechend geschultem medizinischem Fachpersonal in Übereinstimmung mit der entsprechenden Gebrauchsanweisung (IFU) verwendet werden. Eine Auflistung der Indikationen, Kontraindikationen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise finden Sie in der Gebrauchsanweisung, die jedem Produkt beiliegt oder zum Download auf unserer Webseite [www.gbo.com](http://www.gbo.com) (Download Center) abrufbar ist. Für weiterführende Informationen wenden Sie sich an Ihren lokalen Greiner Bio-One Vertriebspartner oder besuchen Sie unsere Website. Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung, Gewährleistung oder Garantie der Greiner Bio-One GmbH ist ausgeschlossen. Alle Rechte, Irrtum und Änderungen sind vorbehalten. Sofern nicht anders angeführt, verfügt Greiner Bio-One GmbH über alle Urheberrechte und/oder sonstigen (Verwendungs-)Rechte in den vorliegenden Unterlagen, insbesondere an Kennzeichen, wie an angeführten (Wort-Bild-)Marken, Logos. Eine Verwendung, Vervielfältigung oder jeder sonstige Gebrauch der Rechte der Greiner Bio-One GmbH ist ausdrücklich untersagt. Medieninhaber: Greiner Bio-One GmbH

[www.gbo.com](http://www.gbo.com)

Greiner Bio-One GmbH / Bad Haller Straße 32 / A-4550 Kremsmünster / Austria  
PHONE +43 7583 6791-0 / FAX +43 7583 6318 / E-MAIL [office@gbo.com](mailto:office@gbo.com)

Poster MiniCollect® Handling Recommendations de [rev.00, 07.2022]

  
**greiner**  
BIO-ONE