

BLUTENTNAHME- REIHENFOLGE

DIE VOLLSTÄNDIGEN HANDABUNGS- HINWEISE

entnehmen Sie bitte der
Gebrauchsanweisung
des jeweiligen Produkts
unter www.gbo.com.

VACUETTE®

Blutentnahmeröhrchen

basierend auf CLSI GP41-ED7

1

BLUTKULTUR

2

NATRIUMCITRAT/CTAD*

3

SERUM

mit und ohne Separator

4

HEPARIN

mit und ohne Separator

5

EDTA

mit und ohne Separator

6

GLYCOLYSE-INHIBITOR

7

ANDERE ADDITIVE



HINWEIS

Bitte beachten Sie für die Reihenfolge der Blutentnahme
immer die Vorgaben Ihrer Einrichtung.

* Wenn ein Blutentnahmeset mit Flügeln verwendet wird,
dann ist das erste Röhrchen der Reihe unterfüllt. Wenn also
eine Natriumcitrat Probe zuerst entnommen wird, dann wird
empfohlen, vorher ein Discard-Röhrchen (z.B. ohne Additiv)
zu wählen, um das richtige Additiv-zu-Blut-Verhältnis zu
gewährleisten. Obwohl Studien gezeigt haben, dass PT- und
aPTT-Tests nicht beeinflusst werden, wenn sie als erste einer
Röhrchenreihe verwendet werden, wird trotzdem dazu geraten,
ein zweites Röhrchen für andere Gerinnungstests auszuwählen,
da nicht bekannt ist, ob diese Tests beeinflusst werden oder nicht.

Diese Produktinformationen richten sich ausschließlich an medizinisches Fachpersonal. Produkte von Greiner Bio-One dürfen nur von
entsprechend geschultem medizinischem Fachpersonal in Übereinstimmung mit der entsprechenden Gebrauchsanweisung (IFU) verwendet
werden. Eine Auflistung der Indikationen, Kontraindikationen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise finden Sie in der Gebrauchsanweisung,
die jedem Produkt beiliegt oder zum Download auf unserer Webseite www.gbo.com (Download Center) abrufbar ist. Für weiterführende
Informationen wenden Sie sich an Ihren lokalen Greiner Bio-One Vertriebspartner oder besuchen Sie unsere Webseite.

Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung, Gewährleistung oder Garantie der Greiner Bio-One GmbH ist
ausgeschlossen. Alle Rechte, Irrtum und Änderungen sind vorbehalten. Sofern nicht anders angeführt, verfügt Greiner Bio-One GmbH über alle
Urheberrechte und/oder sonstigen (Verwendungs-)Rechte in den vorliegenden Unterlagen, insbesondere an Kennzeichen, wie an angeführten
(Wort-)Bild-/Marken, Logos. Eine Verwendung, Vervielfältigung oder jeder sonstige Gebrauch der Rechte der Greiner Bio-One GmbH ist
ausdrücklich untersagt. **Medieninhaber:** Greiner Bio-One GmbH

www.gbo.com

Greiner Bio-One GmbH / Bad Haller Straße 32 / 4550 Kremsmünster / Austria
PHONE +43 7583 6791-0 / FAX +43 7583 6318 / E-MAIL office@gbo.com

Poster Order of Draw de [rev.03, 04.2021]


greiner
BIO-ONE