



クエン酸ナトリウム 3.2%入り 微量血液容器

クエン酸ナトリウム3.2%入り 微量血液容器

本製品はカルシウムをキレート除去するクエン酸ナトリウムがあらかじめ入れられた血液容器です。血液収容後の収容量は 0.5mlと1.0mlの2種類をご用意しております。

コンプリートタイプは13 x 75mmの形状であり、遠心機や各種機器のラックへのセッティングが容易になっております。

キャップの色は国際的な色分けに準拠したライトブルーを採用しております。直射日光を避け、4-25℃で保管してください。

左: 微量血液容器
右: コンプリートタイプ

医療機器ではございません。
ご使用の際には、十分にご注意ください。



使用方法

ご使用の際には、添付文書をよくお読みください。



1 チューブキャップを取り外します。



2 静脈血をチューブに移します。



3 オリジナルキャップでチューブを閉じます。



4 採取後すぐにチューブを数回軽く反転させます。

本凝固チューブは静脈血での使用のみとなっています。



5 必要に応じて、13x75キャリアチューブにチューブを挿入することができます。

チューブ製品概要

製品番号	製品情報(添加剤等)	キャップカラー	収容量	包装		
				内包装	二次内包装	外包装
微量血液容器						
450538	クエン酸ナトリウム 3.2%	ライトブルー	0.5ml	50個	500個	2000個
450539	クエン酸ナトリウム 3.2%	ライトブルー	1ml	50個	500個	2000個
微量血液容器コンプリートタイプ キャリアチューブ一体型 13x75 mm						
450556	クエン酸ナトリウム 3.2%	ライトブルー	1ml	50個	500個	2000個