

毛細管採血システム

MiniCollect® II

**ご評価用の
無料サンプル進呈中**

ご希望の方は下記の
グライナー・ジャパン取扱店
または弊社まで
お問い合わせください。

MiniCollect®IIは各種分析に用いる血液サンプルを少量採血するためのシステムです。
このシステムは小児、ご高齢の患者様、および静脈が脆弱で採血が困難な患者様に適しています。
また、動物からの採血にもご使用いただけます。

MiniCollect®II が選ばれる理由



- 1 血管の脆弱な新生児や老人の採血に最適
- 2 広い開口部とスクープで採血しやすい
- 3 チューブを装着で適合機器が拡充 (裏面参照)
- 4 カラーコードラベルで識別しやすい
- 5 少量採血にも最適



販売名「ミニコレクトII」
一般的名称「開放型採血用チューブ」
医療機器認証番号 229 AABZX 00018000



<https://www.youtube.com/watch?v=Xo0y9GCyfQs>
動画中のチューブイメージは旧タイプになります。

使用方法の動画

使用方法

ご使用の際には、添付文書をよくお読みください。



1 穿刺部位を温めることをお勧めします。次に穿刺部位を適切に消毒してください。



2 チューブ上部の周囲にあるギザギザした部分を押し上げるようにしてキャップを外すことができます。スクープ上下方向を示す矢印と平らな部分は押し上げにくくなっております。



3 穿刺部周囲を軽く押します。血液の最初の1滴は廃棄します。



4 血液の小滴がスクープを伝いチューブの内側に流れ込みます。穿刺部位は下向きに保持してください。



5 オリジナルキャップでチューブを閉じます。正しく閉じると「カチッ」と音がします。



6 採取後すぐにチューブを8～10回転倒混和させます。

ここが良くなりました!

ポイント①

キャップの脱着性向上



キャップがより大きく、溝が深くなりました。

ポイント②

取違い防止強化



チューブラベル上のカラーラインが見やすく、識別しやすくなりました。

ポイント③



キャリアチューブを接続またはコンプリータイプをご使用頂くと一般的な遠心機、搬送機、測定器に適合できます。
*チューブイメージは旧タイプになります。

MiniCollect®II 製品紹介


製品番号	製品情報(添加剤等)	キャップカラー	血液採取量	内包装	包装 二次内包装	外包装
血液凝固促進剤入り (生化学・血清学検査等)						
450534	血液凝固促進剤	● 赤	0.5 - 1ml	50個	500個	2000個
血液凝固促進剤・分離剤入り (生化学・血清学検査等)						
450533	血液凝固促進剤/分離剤	● ゴールド	0.5 - 0.8ml	50個	500個	2000個
450548	血液凝固促進剤/分離剤 (コンプリータイプ)	● ゴールド	0.5 - 0.8ml	50個	500個	2000個
LHヘパリンリチウム入り (緊急検査等)						
450536	ヘパリンリチウム	● 緑	0.5ml	50個	500個	2000個
LHヘパリンリチウム/分離剤入り (緊急検査等)						
450535	ヘパリンリチウム/分離剤	● 薄緑	0.8ml	50個	500個	2000個
EDTA-3K入り (血液学検査等)						
450530	EDTA-3K	● ラベンダ	0.25 - 0.5ml	50個	500個	2000個
EDTA-2K入り (血液学検査等)						
450532	EDTA-2K	● ラベンダ	0.25 - 0.5ml	50個	500個	2000個
450547	EDTA-2K (コンプリータイプ)	● ラベンダ	0.25 - 0.5ml	50個	500個	2000個
FXフッ化ナトリウム/シュウ酸カリウム入り (血糖検査等)						
450540	フッ化ナトリウム/シュウ酸カリウム	● 灰色	0.25ml	50個	500個	2000個

*クエン酸ナトリウム 3.2%入り 微量血液容器(雑品)の取り扱いもごさいます。(1ml:450539)

キャリアチューブ製品紹介

キャリアチューブはMiniCollect® IIに取り付けて、遠心分離機などに適合させるアダプターとしてご利用頂ける製品です。血液保管・輸送のための医療機器ではごさいません。

製品番号	製品情報	内包装	外包装
450417	キャリアチューブ 13×75 PREMIUM	100個	500個
450418	キャリアチューブ(遮光管) 13×75 PREMIUM	100個	500個

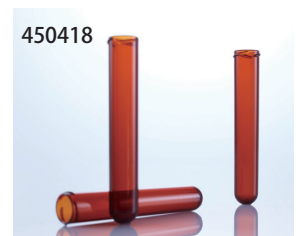

製造販売業者

株式会社グライナー・ジャパン

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-17-44

TEL 03-3505-8875 FAX 03-3505-8945

URL https://www.gbo.com/ja_JP.html

グライナー・ジャパン取扱店

■お願いおよび注意事項

【価格】価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではごさいません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認下さい。記載の価格は2021年5月1日現在の価格です。予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認下さい。記載の価格には消費税は含まれておりません。

Document Number 202105001