



VACUETTE® Blood Culture Holder VACUETTE®-veriviljelyohjain Käyttöohjeet



Käyttötarkoitus

VACUETTE®-veriviljelyohjainta käytetään täytettäessä veriviljelypulloja ja -putkia rutiinomaisissa laskimopunktiotoimenpiteissä. Laitetta saavat käyttää asianmukaisesti koulutetut terveydenhuollon ammattilaiset vain näiden ohjeiden mukaisesti.

Tuotekuvaus

VACUETTE®-veriviljelyohjain on kertakäyttöinen, ei-steriili ja valmistettu muovista. Se on yhteensopiva kaikkien VACUETTE®-luer-sovitinten ja VACUETTE® SAFETY-verinäytteenottosarjojen kanssa.

Käsittely

HUOM. Katso lisätietoja näytteenottosarjoista tai luer-sovitimista niihin liittyvistä käyttöohjeista.

LUE TÄMÄ TIEDOTE KOKONAAN ENNEN LASKIMOPUNKTION SUORITTAMISTA.

MINIMOI ALTISTUMISRISKI KÄYTTÄMÄLLÄ KÄSINEITÄ TEHDESSÄSI LASKIMOPUNKTIOTA JA KÄSITELLESSÄSI VERINÄYTEPUTKIA!

- Kierrä luer-sovitin yhdessä + SAFETY-verinäytteenottosarjan kanssa VACUETTE®-veriviljelyohjaimen. Varmista, että luer-sovitin on tukevasti kiinni eikä pääse kiertymään auki käytön aikana.
HUOM. Luer-sovitimen virheellinen kiertäminen VACUETTE®-veriviljelyohjaimen voi vaurioittaa ohjaimen ja/tai sovitimen kierteitä. Vaurioituneet kierteet voivat aueta ja luer-sovitin voi irrota laskimopunktion aikana.
- Puhdista punktiokohta ja kätesi laitoksesi puhdistusohjeiden mukaisesti.
- Desinfioi verinäytepullojen paljaat septumit alkoholipyyhkeellä ja anna niiden kuivua.
- Suorita laskimopunktio siten, että potilaan käsivarsi osoittaa alaspäin. **HUOM.** Aseta veriviljelypullot/verinäyteputket suoraan ja keskitetysti. **HUOM.** Noudata veriviljelypullojen valmistajan ilmoittamia pullojen käsittelyohjeita.
- Aseta veriviljelyohjain pullojen päälle ja paina alas septumin puhkaisemiseksi.
HUOM. Kun otat sekä aerobisen että anaerobisen pullon, inokuloi ensin aerobinen pullo ja sen jälkeen anaerobinen.
- Kun oikea verimäärä on otettu, poista ohjain pulloista ja jatka (tarvittaessa) verinäytteenottoa VACUETTE®-verinäyteputkiin.
- Kun verinäyte on valmis, aseta harso kevyesti laskimopunktiokohdalle painamatta sitä suoraan neulalle.
HUOM. Pidä kätesi neulan takana aina neulan käytön ja hävityksen aikana.
- Jos käytät SAFETY-verinäytteenottosarjaa, aktivoi turvamekanismi painamalla napaa kummaltakin puolelta. Tällöin lukko kytkeytyy. Liu'uta turvamekanismia taaksepäin, kunnes kuuluu naksahdus. Naksahdus osoittaa, että turvamekanismi on aktivoitu oikein.
- Hävitä veriviljelyohjaimen sisältävä laite yhtenä kappaleena asianmukaiseen terävien esineiden säiliöön oman laitoksesi käytäntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
- Jos käytät verinäytteenottosarjaa, hävitä veriviljelyohjaimen sisältävä laite yhtenä kappaleena asianmukaiseen terävien esineiden säiliöön oman laitoksesi käytäntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
- Purista punktiokohtaa laitoksen käytännön mukaisesti.
HUOM. Älä purista punktiokohtaa liian kovaa.

Varotoimet/Varoitukset

- Tarkista veriviljelyohjain ennen käyttöä. Älä käytä ohjainta, jos se on vaurioitunut.
- Älä aseta neulansuojusta takaisin.
- Hävitä veriviljelyohjaimen sisältävä SAFETY-verinäytteenottosarja laskimopunktion jälkeen yhtenä kappaleena asianmukaiseen terävien esineiden säiliöön oman laitoksesi käytäntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
- Pidä kätesi neulan takana aina neulan käytön ja hävityksen aikana.
- Käsittele kaikkia biologisia näytteitä ja verinäytteenoton teräviä esineitä (lansetteja, neuloja, luer-sovitimia ja verinäytteenottosarjoja) laitoksesi käytäntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
- Hakeudu asianmukaiseen lääketieteelliseen hoitoon, jos altistut biologisille näytteille (esimerkiksi punktiavamman vuoksi), sillä näytteet voivat tartuttaa HIV:n (AIDS), hepatiittiviruksen tai muun tartuntataudin.
- Hävitä kaikki käytetyt veriviljelyohjaimen ja neulan sisältävät SAFETY-verinäytteenottosarjat yhtenä kappaleena niiden hävittämiseen tarkoitettuun biovaarallisten aineiden säiliöön.
- Altistumisriskin pienentämiseksi käsineitä tulee käyttää koko laskimopunktiotoimenpiteen ajan.





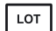

Säilytys

Vältä suoraa auringonvaloa.

Hävittäminen

- Tarttuvien materiaalien asianmukaista hävittämistä koskevia hygieniaohteita ja lainsäädäntöä tulee noudattaa.
- Tartuntavaaraa voidaan ehkäistä kertakäyttöisillä käsineillä.
- Kontaminoituneet tuotteet ja neulat tulee hävittää välittömästi verinäytteenoton jälkeen niille tarkoitettuihin biovaarallisten jätteiden säiliöihin, jotka myöhemmin autoklavoidaan ja poltetaan.

Etikettitiedot

	Valmistaja		Luettelonumero
	Viimeinen käyttöpäivä		Älä käytä uudelleen
	Erän koodi		Katso käyttöohjeet

Varoitus: Yhdysvaltain liittovaltion laki rajoittaa tämän laitteen myynnin vain lääkäreille tai lääkärin määräyksestä.



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32,
4550 Kremsmünster, Austria

Valmistettu Itävallassa

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Puhelin +43 7583 6791