

VACUETTE® Blood Culture Holder
VACUETTE® vértényészettartó
Használati utasítás**Rendeltetés**

A **VACUETTE®** vértényészettartó arra szolgál, hogy a segítségével vért töltsenek vértényészeti palackokba és csövekbe rutin vénaszúrási eljárás során. Ezt az eszközt csak megfelelően képzett egészségügyi szakemberek használhatják, csak ezen utasításoknak megfelelően.

A termék ismertetése

A **VACUETTE®** vértényészettartó egyszer használatos, nem steril, és műanyagból készült. Kompatibilis mindegyik **VACUETTE®** luer-adapterrel és **VACUETTE®** SAFETY/vérvételi készlettel.

Használat

MEGJEGYZÉS: A vérvételi készletekről és Luer-adapterekről részletesebb tájékoztatást lásd az illető termék használati utasításában.

VÉNASZÚRÁS VÉGZÉSE ELŐTT OLVASSA VÉGIG EZT A KÖRLEVELET!

A VÉNASZÚRÁS ÉS A VÉRVÉTELI CSÖVEK KEZELÉSE SORÁN VISELJEN GUMIKESZTYÚT A FERTŐZŐ ANYAGOKNAK VALÓ EXPOZÍCIÓ KOCKÁZATÁNAK MINIMALIZÁLÁSA ÉRDEKÉBEN!

- Csavarja a luer-adaptert és a SAFETY/vérvételi készletet a **VACUETTE®** vértényészettartóba. Győződjön meg arról, hogy a luer-adapter erősen rögzítve van, hogy ne csavarodjon ki használat közben.
MEGJEGYZÉS: A luer-adapter nem megfelelő becsavarása a **VACUETTE®** vértényészettartóba a vértényészettartó és/vagy a luer-adapter menetének károsodásához vezethet. Ez a károsodás a luer-adapter kilazulását okozhatja vénaszúrással közben.
- Tisztítsa meg a kezét és a szúrás helyét az intézményben jóváhagyott módszereknek megfelelően.
- Fertőtlenítsa a vérvételi palack szeptumát alkoholos törlővel, majd hagyja levegőn megszáradni.
- Vénaszúrással a beteg karja lefelé irányuljon. **MEGJEGYZÉS:** Kérjük, a vértényészeti üvegeket, illetve vérvételi csöveket egyenesen helyezze be, a nyílás közepébe. **MEGJEGYZÉS:** A vértényészeti palackok megfelelő használatához kövesse a gyártó utasításait.
- Helyezze a vértényészettartót a palackra, és a dugó átszúrásához nyomja lefelé.
MEGJEGYZÉS: Ha aerob és anaerob tenyésztést is végez, először az aerob és utána az anaerob palackba adjon mintát.
- A megfelelő mennyiségű vér levétele után húzza ki a vértényészettartót a palackból, és (szükség esetén) folytassa a vérvételt a **VACUETTE®** vérvételi csövekbe.
- A vérvétel befejezése után óvatosan helyezzen egy darab gézt a szúrás helyére, de ne nyomja közvetlenül a vénába behelyezett tűre.
MEGJEGYZÉS: A használat és a hulladékkezelés során a kezeit mindig tartsa a tű mögött.
- **SAFETY** vérvételi készlet használata esetén a biztonsági mechanizmus aktiválása érdekében nyomja be az elosztó két oldalát a zár bezárásához. Csúsztassa hátra a biztonsági mechanizmust, amíg kattánás nem hallatszik. A kattánás azt jelzi, hogy a biztonsági mechanizmus megfelelően aktiválva van.
- Az eszközt a vértényészettartóval együtt, egy egységként dobja az éles hulladékok tárolójába az intézményben érvényes irányelveknek és módszereknek megfelelően.
- **Biztonsági vérvételi készlet** használata esetén az eszközt a vértényészettartóval együtt, egy egységként dobja az éles hulladékok tárolójába az intézményben érvényes irányelveknek és módszereknek megfelelően.
- Tartsa nyomva a szúrás helyét az intézményi protokollnak megfelelően.
MEGJEGYZÉS: Ne fejtessen ki túl erős nyomást a szúrás helyére.

Óvintézkedések és figyelmeztetések

- Használat előtt ellenőrizze a vértényészettartót. Ne használja, ha megsérült.
- Ne helyezze vissza a tűvédőt semmilyen tűre.
- A vénaszúrással a SAFETY/vérvételi készletet a vértényészettartóval együtt, egy egységként dobja az éles hulladékok tárolójába az intézményben érvényes irányelveknek és eljárásoknak megfelelően.
- A használat és a hulladékkezelés során a kezeit mindig tartsa a tű mögött.
- Minden biológiai mintát és „éles” vérvételi kelléket (lándzsák, tűk, luer-adapterek és vérvételi készletek) kezeljen az intézményben érvényes irányelveknek és módszereknek megfelelően.
- A biológiai mintáknak való expozíció (például tűszúrásos sérülés) esetén mindig kérjen megfelelő orvosi ellátást, mert ezek terjeszthetnek HIV-et (AIDS), vírusos hepatitiszt és más fertőző betegségeket.
- Minden használt SAFETY/vérvételi készletet dobjon a vértényészettartóval és a tűvel együtt az ezek tárolására jóváhagyott, veszélyes biológiai hulladéknak való tárolóba.
- Vénaszúrással mindig viseljen gumikesztyűt a fertőző anyagoknak való expozíció kockázatának minimalizálása érdekében!





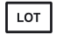

Tárolás

Ne hagyja, hogy közvetlen napfény érje.

Hulladékkezelés

- Ismerni kell és be kell tartani az általános higiéniai irányelveket és a fertőző anyagok megfelelő hulladékkezelésére vonatkozó előírásokat.
- Az eldobható gumikesztyű megakadályozhatja a fertőzésveszélyt.
- A tüt tartalmazó szennyezett termékeket a vérvétel után azonnal el kell dobni a megfelelő, veszélyes biológiai anyagok tárolására való hulladéktárolóba, amely azután autoklávozható és elégethető.

A címkén található adatok

	Gyártó		Katalógusszám
	Lejárat dátum		Tilos újrahasználni.
	Tételkód		Olvassa el a használati utasítást.

Figyelem! Az Amerikai Egyesült Államok törvényei szerint ez az eszköz csak orvos által vagy orvos rendelvényére értékesíthető.



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32,
4550 Kremsmünster, Ausztria

Készült Ausztriában

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefon: +43 7583 6791