



VACUETTE[®] Blood Culture Holder Suporte de cultura de sangue VACUETTE[®] Instruções de utilização



Utilização prevista

O suporte de cultura de sangue VACUETTE[®] é utilizado para encher frascos e tubos de cultura de sangue em procedimentos de rotina de punção venosa. Este produto deve ser utilizado apenas por profissionais de saúde com formação adequada e de acordo com estas Instruções de utilização.

Descrição do produto

O suporte de cultura de sangue VACUETTE[®] é descartável, não estéril e fabricado de plástico. É compatível com todos os adaptadores Luer VACUETTE[®] e conjuntos de colheita de sangue/SAFETY VACUETTE[®].

Manuseamento

NOTA: Para obter informações detalhadas sobre conjuntos de colheita de sangue ou adaptadores Luer, consulte as instruções de utilização apropriadas.

LEIA ESTA CIRCULAR NA ÍNTEGRA ANTES DE EXECUTAR A PUNÇÃO VENOSA.

UTILIZE LUVAS DURANTE A PUNÇÃO VENOSA E AO MANUSEAR OS TUBOS DE COLHEITA DE SANGUE PARA MINIMIZAR O RISCO DE EXPOSIÇÃO!

- Introduza o adaptador Luer + o conjunto de colheita de sangue/SAFETY no suporte de cultura de sangue VACUETTE[®]. Certifique-se de que o adaptador Luer está firmemente colocado para que este não se desencaixe durante a utilização.
NOTA: A introdução inadequada do adaptador Luer no suporte de cultura de sangue VACUETTE[®] pode resultar em danos no acoplamento do suporte e/ou no adaptador Luer. Estes danos podem fazer com que o adaptador Luer fique solto durante a punção venosa.
- Limpe o local de punção e as suas mãos de acordo com os procedimentos aprovados da sua instalação.
- Desinfete o septo exposto dos frascos de colheita de sangue com um toalhete embebido em álcool e deixe secar ao ar.
- Efetue a punção venosa com o braço do paciente posicionado para baixo. **NOTA:** Insira os frascos de cultura de sangue/tubos de colheita de sangue em linha reta e centrados. **NOTA:** Cumpra as instruções do fabricante para o manuseamento correto de frascos de cultura de sangue.
- Coloque o suporte de cultura de sangue nos frascos e pressione para puncionar o septo.
NOTA: Se utilizar um frasco aeróbico ou anaeróbico, inocule o frasco aeróbico primeiro e, em seguida, o frasco anaeróbico.
- Depois de obter a quantidade correta de sangue, retire o suporte dos frascos e (se necessário) prossiga com a colheita de sangue para tubos de colheita de sangue VACUETTE[®].
- Após a colheita de sangue, aplique delicadamente uma compressa de gaze no local da punção venosa sem pressionar diretamente a agulha inserida.
NOTA: Mantenha as mãos atrás da agulha durante todo o processo de utilização e eliminação.
- Se utilizar um conjunto de colheita de sangue SAFETY, ative o mecanismo de segurança premindo ambos os lados do eixo para acionar o bloqueio. Deslize o mecanismo de segurança para trás até ouvir um estalido. O estalido é um sinal de que o mecanismo de segurança foi corretamente ativado.
- Elimine o dispositivo com suporte de cultura de sangue como uma única unidade no recipiente para instrumentos afiados adequado, de acordo com as políticas e os procedimentos da sua instalação.
- Se utilizar um conjunto de colheita de sangue, elimine o dispositivo com suporte de cultura de sangue como uma única unidade no recipiente para instrumentos afiados adequado, de acordo com as políticas e os procedimentos da sua instalação.
- Mantenha pressão no local de punção de acordo com o protocolo da instalação.
NOTA: Não aplique pressão desnecessária sobre o local de punção.

Precauções/cuidados

- Verifique o suporte de cultura de sangue antes da sua utilização. Não o utilize se estiver danificado.
- Não volte a cobrir nenhuma agulha.
- Após a punção venosa, elimine o conjunto de colheita de sangue/SAFETY com suporte de cultura de sangue como uma única unidade num recipiente para instrumentos afiados adequado, de acordo com as políticas e os procedimentos da sua instalação.
- Mantenha as mãos atrás da agulha durante todo o processo de utilização e eliminação.
- Manuseie todas as amostras biológicas e instrumentos afiados de recolha de sangue (lancetas, agulhas, adaptadores Luer e conjuntos de recolha de sangue) de acordo com as políticas e os procedimentos das suas instalações.
- Obtenha assistência médica adequada no caso de ocorrer qualquer exposição a amostras biológicas (por exemplo, através de um ferimento por punção), dado que estas podem transmitir VIH (SIDA), hepatite viral ou outras doenças infecciosas.
- Elimine todos os conjuntos de colheita de sangue/SAFETY usados com suporte de cultura de sangue e respetiva agulha em recipientes para resíduos de risco biológico aprovados para a sua eliminação.
- Deve usar luvas em todos os momentos durante a punção venosa para minimizar o risco de exposição.





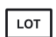

Armazenamento

Evite a exposição à luz solar direta.

Eliminação

- Deve considerar e cumprir as diretrizes gerais de higiene e os regulamentos legais em relação à eliminação apropriada de material infeccioso.
- A utilização de luvas descartáveis previne o risco de infecção.
- Imediatamente após a colheita de sangue, os produtos com agulhas contaminados devem ser eliminados em recipientes apropriados para material de risco biológico, que podem ser autoclavados e incinerados posteriormente.

Informações do rótulo

	Fabricante		Número de catálogo
	Prazo de validade		Não reutilizar
	Código do lote		Consultar as instruções de utilização

Atenção: A lei federal (EUA) restringe a venda deste dispositivo a médicos ou sob receita médica.



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32,
4550 Kremsmünster, Áustria

Fabricado na Áustria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefone: +43 7583 6791