

**VACUETTE**[®] Blood Culture Holder
VACUETTE[®] Blood Culture Holder
Användningsinstruktioner**Användning**

VACUETTE[®] Blood Culture Holder används för att fylla blododlingsflaskor och rör med blod vid rutinmässig venpunktur. Enheten ska användas av lämpligt utbildad sjukvårdspersonal och endast i enlighet med de här anvisningarna.

Produktbeskrivning

VACUETTE[®] Blood Culture Holder är avsedd för engångsbruk, är icke-steril och är tillverkad i plast. Den är kompatibel med alla **VACUETTE**[®]-lueradapttrar och **VACUETTE**[®] SAFETY/blodprovstagningsatsar.

Handhavande

Obs! Mer detaljerad information om blodprovstagningsatsar eller lueradapttrar finns i motsvarande bruksanvisning.

LÄS NOGA IGENOM HELA DETTA DOKUMENT INNAN VENPUNKTUR PÅBÖRJAS.

ANVÄND HANDSKAR VID BLODPROVSTAGNING OCH HANTERING AV PROVTAGNINGSRÖR SÅ ATT RISKEN FÖR ATT EXPONERAS FÖR BLODET MINIMERAS!

- Skruva fast lueradapttern + SAFETY/blodprovstagningsatsen i **VACUETTE**[®] Blood Culture Holder. Kontrollera att lueradapttern sitter fast ordentligt och inte kan lossna under användning.
Obs! Om lueradapttern skruvas fast felaktigt på **VACUETTE**[®] Blood Culture Holder kan det leda till skador på hållarens och/eller lueradaptterns gångor. Dessa skador kan leda till att lueradapttern lossnar under venpunktur.
- Rengör punktionsstället och dina händer enligt din institutions godkända procedurer.
- Desinficera det exponerade septat på blodinsamlingsflaskorna med en alkoholdyna och låt lufttorka.
- Genomför venpunktionen med patientens arm riktad nedåt. **Obs!** Sätt in blododlingsflaskorna/blodprovstagningsrören rakt och centrerat. **Obs!** Följ tillverkarens instruktioner för korrekt hantering av blododlingsflaskor.
- Placera Blood Culture Holder på flaskorna och tryck nedåt tills membranet punkteras.
Obs! Vid användning av både aerob och anaerob flaska, ympa först den aeroba och sedan den anaeroba flaskan.
- Efter att korrekt mängd blod samlats in, flytta bort hållaren från flaskorna och fortsätt (vid behov) blodprovstagningen i **VACUETTE**[®] rör för blodprovstagnning.
- När blodproverna tagits placerar du försiktigt gasväven över punktionsstället utan att trycka direkt på den instuckna kanylen.
Obs! Håll alltid händerna bakom nålen vid användning och omhändertagande.
- Vid användning av SAFETY blodprovstagningsats aktiverar du säkerhetsmekanismen genom att trycka in båda sidorna på navet för att aktivera låset. Skjut säkerhetsmekanismen bakåt tills ett tydligt klickljud hörs. Klickljudet innebär att säkerhetsmekanismen har aktiverats korrekt.
- Kasta enheten med Blood Culture Holder som en enhet i avfallsbehållaren för vassa föremål i enlighet med policyn och procedurerna på din institution.
- Vid användning av ett Blood Collection Set, kasta enheten med Blood Culture Holder som en enhet i avfallsbehållaren för vassa föremål i enlighet med policyn och procedurerna på din institution.
- Bibehåll tryck på insticksstället enligt institutionens protokoll.
Obs! Applicera inte onödigt tryck på punktionsstället.

Försiktighetsåtgärder/varningar

- Kontrollera Blood Culture Holder före användning. Använd den inte om den är skadad.
- Sätt inte tillbaka skyddet på någon av nålarna.
- Efter venpunktur ska SAFETY/blodprovstagningsatsen och Blood Culture Holder avyttras tillsammans som en enhet i avfallsbehållare för vassa föremål i enlighet med policyn och procedurerna på din institution.
- Håll alltid händerna bakom nålen vid användning och omhändertagande.
- Vid hantering av biologiska prov och tillbehör för blodprovstagningen (t.ex. lansetter, kanyler, lueradapttrar och utrustning för blodprovstagning) måste gällande hygien- och säkerhetsbestämmelser för din arbetsplats följas och iakttas.
- Sök omedelbart vård om du exponeras för någon form av smittorisk (t.ex. genom stickskadorna). HIV (AIDS), viral hepatit och andra smittsamma sjukdomar kan överföras genom kontakt med biologiska prover.
- Kasta alla använda SAFETY/blodprovstagningsatsar med Blood Culture Holder tillsammans med nålen i behållare som är godkända för biologiskt riskavfall.
- Handskar ska alltid bäras vid venpunktion för att minimera risken för att komma i kontakt med blodet.







Förvaring

Undvik exponering för direkt solljus.

Avfallshantering

- Följ de allmänna hygienriktlinjerna och rättsliga bestämmelserna för korrekt kassering av smittförande material.
- Engångshandskar kan minska risken för infektioner.
- Kontaminerade produkter med nålar måste omedelbart efter blodprovstagningen kastas i lämpliga avfallsbehållare för biologiskt riskmaterial och som sedan kan autoklaveras och förbrännas.

Märkning på produktetiketter

	Tillverkare		Artikelnummer
	Utgångsdatum		Återanvänd inte
	Batchnummer		Konsultera användningsinstruktionerna

Varning! Federal lag i USA begränsar försäljning av denna enhet till läkare eller på order av läkare.



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32,
4550 Kremsmünster, Österrike

Tillverkad i Österrike

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefon +43 7583 6791