

**Kullanım Amacı**

**VACUETTE®** Kan Kültürü Tutucusu, rutin ven ponksiyonu prosedürlerinde kanı kan kültürü şişelerine ve tüplerine doldurmak için kullanılır. Bu cihaz, bu talimatlar uyarınca yalnızca doğru eğitimi almış sağlık uzmanları tarafından kullanılmalıdır.

**Ürün Tanımı**

**VACUETTE®** Kan Kültürü Tutucusu tek kullanımlıktır, steril değildir ve plastikten yapılmıştır. Tüm **VACUETTE®** Luer Adaptörleri ve **VACUETTE®** SAFETY/Kan Alma Setleri ile uyumludur.

**Kullanım**

**NOT:** Kan Alma Setleri veya Luer adaptörleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen uygun Kullanım Talimatlarına bakın.

**KAN ALMA İŞLEMİNE BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUN.**

VEN PONKSİYONU SIRASINDA VE KAN ALMA TÜPLERİNİ İŞLERKEN, MARUZ KALMA TEHLİKESİNİ MİNİMİZE ETMEK İÇİN ELDIVEN GİYİN.

- Luer adaptörü + SAFETY/Kan Alma setini **VACUETTE®** Kan Kültürü Tutucusuna geçirin. Luer adaptörünün kullanım sırasında yerinden çıkmasını önlemek için sıkıca oturduğundan emin olun.  
**NOT:** Luer adaptörünün **VACUETTE®** Kan Kültürü Tutucusuna yanlış geçirilmesi, tutucunun ve/veya Luer adaptörünün dışlarında hasara neden olabilir. Bu hasar, ven ponksiyonu sırasında Luer adaptörünün gevşemesine yol açabilir.
- Punktür bölgesini ve ellerinizi tesisinizin onaylanmış prosedürlerine uygun olarak temizleyin.
- Kan alma şişelerinin açıkta kalan bölümlerini alkollü bir tamponla dezenfekte edip kurumaya bırakın.
- Ven ponksiyonunu hastanın kolu aşağı bakacak şekilde gerçekleştirin. **NOT:** Lütfen kan kültürü şişelerini/kan alma tüplerini düz ve ortalanmış şekilde yerleştirin. **NOT:** Kan kültürü şişelerinin doğru kullanımı için üreticinin talimatlarına uyun.
- Kan Kültürü Tutucusunu şişelerin üzerine yerleştirin ve aşağı bastırarak septumu delin.  
**NOT:** Aerobik ve anaerobik bir şişe alırken öncelikle aerobik, daha sonra anaerobik şişeyi aşlayın.
- Doğru miktarda kanı aldıktan sonra, tutucuyu şişelerden çıkarın ve (gerekirse) **VACUETTE®** Kan Alma Tüplerine kan almaya devam edin.
- Kan alma işlemi tamamlandıktan sonra, damara girmiş iğneye doğrudan baskı yapmadan ven ponksiyonu bölgesinin üzerine gazlı bezi hafifçe yerleştirin.  
**NOT:** Kullanım ve atma sırasında ellerinizi daima iğnenin gerisinde tutun.
- GÜVENLİ Kan Alma Seti** kullanırken, kilidi devreye sokmak için hub'ın her iki tarafına bastırarak güvenlik mekanizmasını etkinleştirin. Bir tık sesi duyulana kadar güvenlik mekanizmasını geriye doğru kaydırın. Tık sesi, güvenlik mekanizmasının doğru şekilde etkinleştirildiğine yönelik bir işarettir.
- Cihazı Kan Kültürü Tutucusu ile tek birim halinde, tesisinizin ilkelerine ve prosedürlerine uygun olarak uygun keskin materyallere yönelik kaba atın.
- Kan Alma Seti** kullanırken, cihazı Kan Kültürü Tutucusu ile tek birim halinde, tesisinizin ilkelerine ve prosedürlerine uygun olarak uygun keskin materyallere yönelik kaba atın.
- Tesis protokolüne uygun olarak punktür bölgesine basınç uygulayın.  
**NOT:** Punktür bölgesine gereksiz basınç uygulamayın.

**Önlemler/Dikkat Edilecek Konular**

- Kan Kültürü Tutucusunu kullanmadan önce kontrol edin. Hasarlıysa kullanmayın.
- Herhangi bir iğnenin kapağını yeniden takmayın.
- Ven ponksiyonu sonrasında, SAFETY/Kan Alma Setini Kan Kültürü Tutucusu ile tek birim halinde, tesisinizin ilkelerine ve prosedürlerine uygun olarak uygun keskin materyallere yönelik kaba atın.
- Kullanım ve atma sırasında ellerinizi daima iğnenin gerisinde tutun.
- Tüm biyolojik numuneleri ve kan alma aletlerini (neşterler, iğneler, Luer adaptörleri ve kan alma setleri) tesisinizin ilke ve prosedürlerine göre kullanın.
- Biyolojik numunelere (örneğin, delici aletle yaralanma) maruz kalınması durumunda uygun tıbbi yardım alın, nitekim bunlar HIV (AIDS), viral hepatit veya bulaşıcı hastalıklar yayabilirler.
- Kullanılan tüm SAFETY/Kan Alma Setlerini Kan Kültürü Tutucusu ve iğneyle birlikte, onaylanmış biyolojik tehlikeli atık kaplarına atın.
- Maruz kalma riskini en aza indirmek için ven ponksiyonu sırasında daima eldiven takılmalıdır.





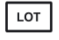

**Saklama**

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

**Atma**

- Bulaşıcı maddelerin uygun bir şekilde elden çıkarılmasına yönelik genel hijyen ilkeleri ve kanuni düzenlemeler göz önüne alınmalı ve uygulanmalıdır.
- Tek kullanımlık eldivenler enfeksiyon riskini önler.
- Kontamine olmuş iğneli ürünler kan almadan hemen sonra, daha sonra otoklavlanacak ve yakılacak olan uygun biyolojik tehlike atık konteynerlerine atılmalıdır.

## Etiket Bilgileri

	Üretici		Katalog numarası
	Son kullanım tarihi		Yeniden kullanmayın
	Parti kodu		Kullanım talimatlarına başvurun

Dikkat: ABD Federal yasaları, bu cihazın yalnızca bir hekim tarafından veya bir hekimin talimatı üzerine satılmasına izin verir.



Greiner Bio-One GmbH  
Bad Haller Str. 32,  
4550 Kremsmünster, Avusturya

Avusturya'da Üretilmiştir

[www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics)  
[office@at.gbo.com](mailto:office@at.gbo.com)  
Telefon +43 7583 6791