



VACUETTE® SAFELINK corps de pompe avec adaptateur Luer Lock mâle Pour une connexion plus sûre



- ↪ Corps de prélèvement à usage unique
- ↪ Facile d'utilisation : convient à tout adaptateur Luer Lock femelle standard
- ↪ Prélèvement sécurisé grâce à une connexion vissante

VACUETTE® SAFELINK corps de pompe avec adaptateur Luer Lock mâle

Pour une connexion plus sûre

Dans une démarche d'optimisation continue de notre gamme de produits, nous proposons régulièrement de nouveaux dispositifs à nos clients. Notre dernière innovation **VACUETTE® SAFELINK** se distingue par sa manipulation efficace et pratique due à son design particulier étudié à cet effet. Ce corps de pompe, à connecter avec un dispositif doté d'un adaptateur Luer Lock femelle standard, permet un prélèvement sanguin simple et rapide.

Connexion „Lock“, sécurisée et standard

- usage unique
- simple et sécurisé

Le mécanisme de verrouillage Luer Lock rend le corps de pompe pratique, simple d'utilisation et polyvalent. D'un simple mouvement de vissage contrôlé, le dispositif est solidement connecté.

Prélèvement rapide et sécurisé

VACUETTE® SAFELINK peut être associé à tous les dispositifs possédant un adaptateur Luer Lock femelle standard et convient aux pressions élevées jusqu'à 185mmHg. La Directive¹ recommande la connexion à un mécanisme Luer Lock lors de l'utilisation d'un dispositif d'accès veineux pour un prélèvement sécurisé.

Accessoire compacte et robuste

Le corps de pompe stérile et à usage unique est en plastique incassable. Il est doté d'un adaptateur sécurisé Luer Lock et ne contient pas de caoutchouc naturel (latex). A l'intérieur de **VACUETTE® SAFELINK**, se trouve une aiguille en acier inoxydable.



Mécanisme luer lock de **VACUETTE® SAFELINK**

INDICATIONS

Packaging

Le corps de prélèvement est stérile et dans un emballage unitaire jusqu'à utilisation.

Date de péremption

36 mois après date de fabrication

Température de stockage

Entre 4 et 25°C

Recommandations d'utilisation



Ouvrir soigneusement l'emballage



Joindre le Luer mâle au dispositif Luer femelle choisi en le vissant doucement



Effectuer le prélèvement sanguin



Éliminer les déchets

N° référence	Description	Sous conditionnement	Conditionnement
450210	VACUETTE® SAFELINK corps de pompe avec adaptateur Luer Lock mâle	100 pcs.	800 pcs.

¹ Infusion Therapy Standard of Practice, Revised 2016, www.ins1.org