

## Sérum contre plasma

Bien que dans de nombreux cas l'utilisation d'un tube plasma soit favorisée en raison de son temps de réponse réduit, il convient de noter qu'en raison de la présence d'anticoagulants, les tubes plasma ne conviennent pas pour tous les tests de laboratoire<sup>2</sup>. Dans certains domaines, l'utilisation du sérum est indispensable.



Le nouveau tube sérum activateur de coagulation **VACUETTE®** allie la **QUALITÉ DU SÉRUM** et la **RAPIDITÉ DU PLASMA**.

Your **Power** for Health

  
greiner bio-one



**Autriche (siège)**  
Greiner Bio-One GmbH  
Tél. +43 7583 6791-0  
Fax +43 7583 6318  
E-Mail office@at.gbo.com

**Allemagne**  
Greiner Bio-One GmbH/Preanalytics  
Tél. +49 7022 948-0  
Fax +49 7022 948-514  
E-Mail office@de.gbo.com

**Brésil**  
Greiner Bio-One Brasil  
Tél. +55 19 3468-9600  
Fax +55 19 3468-9621  
E-Mail office@br.gbo.com

**Chine**  
Greiner Bio-One Suns Co., Ltd.  
Tél. +86 10 83 55 19 91  
Fax +86 10 63 56 69 00  
E-Mail office@cn.gbo.com

**Espagne**  
Greiner Bio One España, S.A.U.  
Tél. +34 91 652 77 07  
Fax +34 91 652 33 35  
E-Mail info@es.gbo.com

Pour plus d'informations, nous vous invitons à visiter notre site [www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics) ou à nous contacter.

**Etats-Unis**  
Greiner Bio-One North America Inc.  
Tél. +1 704 261-7800  
Fax +1 704 261-7899  
E-Mail info@us.gbo.com

**France**  
Greiner Bio-One SAS  
Tél. +33 1 69 86 25 25  
Fax +33 1 69 86 25 35  
E-Mail accueil@gbo.com

**Hongrie**  
Greiner Bio-One Hungary Kft.  
Tél. +36 96 213 088  
Fax +36 96 213 198  
E-Mail office@hu.gbo.com

**Inde**  
Greiner Bio-One INDIA Pvt., Ltd.  
Tél. +91 120 375 9291  
E-Mail info@gboindia.com

**Italie**  
Greiner Bio-One Italia S.r.l.  
Tél. +39 02 9438 3340  
Fax +39 02 9438 3366  
E-Mail office@it.gbo.com

**Japon**  
Greiner Bio-One Co., Ltd.  
Tél. +81 3 3505 8875  
Fax +81 3 3505 8945  
E-Mail info@jp.gbo.com

**Pays-Bas**  
Greiner Bio-One B.V.  
Tél. +31 172 4209 00  
Fax +31 172 4438 01  
E-Mail info@nl.gbo.com

**Portugal**  
VACUETTE Portugal S.A.  
Tél. +351 252 647 721  
Fax +351 252 647 722  
E-Mail info@vacuette.pt

**Royaume-Uni**  
Greiner Bio-One Ltd.  
Tél. +44 1453 8252 55  
Fax +44 1453 8262 66  
E-Mail info@uk.gbo.com

**Suisse**  
Greiner Bio-One VACUETTE Schweiz GmbH  
Tél. +41 71 228 55 22  
Fax +41 71 228 55 21  
E-Mail office@ch.gbo.com

**Thaïlande**  
Greiner Bio-One Thailand Ltd  
Tél. +66 38 46 56 33  
Fax +66 38 46 56 36  
E-Mail office@th.gbo.com

**Turquie**  
Greiner Bio-One Turkey  
Tél. +90 216 576 6004  
Fax +90 216 576 6005  
E-Mail office@tr.gbo.com



980642 rev.00, 06.2018 f

Your **Power** for Health

  
greiner bio-one



Tube sérum activateur de coagulation  
**VACUETTE®**

La vitesse sans compromis



## Tube sérum activateur de coagulation VACUETTE®

### La vitesse sans compromis

Le temps est un facteur clé lorsqu'il s'agit d'établir un diagnostic sanguin précis et rapide afin d'offrir la meilleure prise en charge possible au patient. Grâce à un processus d'accélération de la coagulation sanguine après le prélèvement, les professionnels de santé peuvent gagner de précieuses minutes, tout en profitant d'une excellente qualité de résultats de laboratoire. Le tube sérum activateur de coagulation **VACUETTE®** allie la rapidité d'un tube à plasma et les qualités d'un tube à sérum.

### Prêt pour les analyses en seulement 10 à 15 minutes<sup>1</sup>

La paroi intérieure du tube est recouverte d'un mélange de BCA et de thrombine qui accélère le processus de coagulation. Ainsi, avec le tube sérum activateur de coagulation **VACUETTE®**, l'ensemble du processus, centrifugation comprise, ne dure que 10 minutes au lieu de 40 minutes pour un tube sérum classique. Un moyen simple de réduire efficacement le temps de réponse.

Après la centrifugation, le gel fourni forme une barrière stable entre le sérum et les composants cellulaires du sang total.



### DE VÉRITABLES AVANTAGES :

- Accélération du processus préanalytique
- Meilleur temps de réponse
- Possibilité d'effectuer un prélèvement sanguin peu avant le transport de l'échantillon de sang
- Résultats plus rapides pour les analyses sur place

### Liste de références :


N° référence	Vol. Nom.	Couleur du bouchon	Couleur de la bague	Taille du tube	Description	Sous conditionnement	Conditionnement
<b>Tube CAT sérum activateur de coagulation VACUETTE® - Traditionnel (bouchon coiffant)</b>							
454591	3,5 ml	orange	jaune	13 x 75	CAT sérum activateur de coagulation Sep	50 pcs.	1.200 pcs.
456310	5 ml	orange	jaune	13 x 100	CAT sérum activateur de coagulation Sep	50 pcs.	1.200 pcs.

### Mélange facile de l'échantillon

L'échantillon de sang total se mélange parfaitement avec l'additif en 5 à 10 retournements.

### Tube en PET incassable

Dans les situations difficiles, il peut arriver qu'un tube glisse entre les mains. Aucun problème, puisque le tube sérum activateur de coagulation **VACUETTE®** est fabriqué, de manière standard, en PET incassable. Il utilise des techniques éprouvées de vide et est équipé d'un bouchon de sécurité particulièrement facile à ouvrir. Cela permet de travailler dans le respect des règles d'hygiène, sans risque d'éclaboussure, comme cela pourrait être le cas avec les bouchons en caoutchouc habituel.

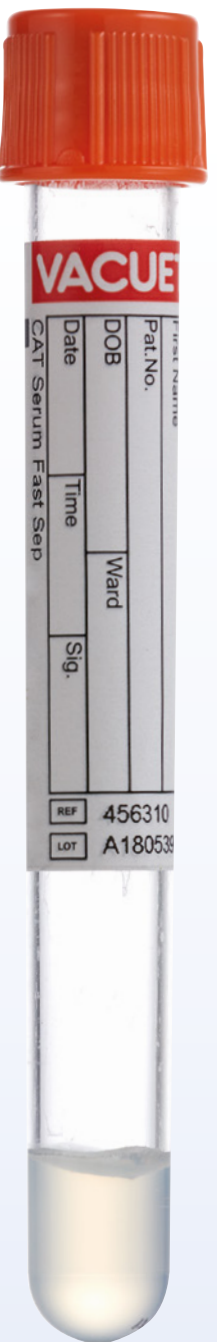

### Centrifugation

Pour obtenir le sérum, Greiner Bio-One recommande de procéder à une centrifugation dans les conditions suivantes :

**5 min pour 3000g**  
**10 min pour 1800g**  
**20°C**

Sources :

<sup>1</sup> En fonction des conditions de centrifugation choisies  
<sup>2</sup> Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations. World Health Organization. WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2, 2002.

## Coagulation complète en seulement 5 MINUTES

### LANCER PLUS RAPIDEMENT DES TRAITEMENTS CIBLÉS

Le tube sérum activateur de coagulation **VACUETTE®** permet une coagulation complète de l'échantillon de sang total en seulement 5 minutes, ce qui accélère donc considérablement le processus préanalytique.

