



VACUETTE® SAFELINK Halter mit *männlichem* Luer-Lock

Für eine sichere Verbindung



- Rörchenhalter für die einmalige Anwendung
- Simple Handhabung: eignet sich für alle genormten *weiblichen* Luer-Lock Anschlüsse
- Sichere Schraubverbindung zwischen Halter und Entnahmeprodukt für einen festen Halt

VACUETTE® SAFELINK Halter mit *männlichem* Luer-Lock

Für eine sichere Verbindung

Durch kontinuierliche Optimierungsarbeiten an unserem Sortiment bringen wir regelmäßig verbesserte und neue Produkte für unsere Kunden auf den Markt. Das innovative Produkt **VACUETTE® SAFELINK** überzeugt durch seine effiziente und praktische Handhabung sowie sein zweckmäßiges Design. Es ermöglicht eine einfache und schnelle Blutentnahme in Kombination mit Medizinprodukten, die einen genormten *weiblichen* Luer-Lock Anschluss haben.

Einfaches Schraubsystem für eine sichere Befestigung

- Einwegprodukt
- Praktisch und sicher

Durch den einfachen Luer-Lock Mechanismus ist der Halter ein praktikables und vielseitiges Zubehörprodukt, das bei der Blutentnahme zum Einsatz kommt. Mit einer kurzen Drehbewegung kann er sicher mit dem jeweiligen Einwegprodukt verbunden werden.



Schraubsystem des **VACUETTE® SAFELINK**

Direkte und sichere Probenentnahme

Der **VACUETTE® SAFELINK** kann in Verbindung mit allen standardisierten *weiblichen* Luer-Ansätzen im Rahmen der Blutprobengewinnung eingesetzt werden und hält einem Druck bis zu 185 mmHg stand. Laut Richtlinien¹ wird die Verwendung eines Luer-Lock Mechanismus in Verbindung mit Venenzugängen für eine sichere Entnahme empfohlen.

Kompaktes und robustes Zubehörprodukt

Der sterile, latexfreie Einweg-Halter ist aus bruchsaurem Kunststoff mit einer sicheren Luer-Lock Verbindung gefertigt. An der Innenseite des **VACUETTE® SAFELINK** befindet sich die Edelstahlnadel.

HINWEISE

Verpackung

Der Röhrenhalter ist bis zur Anwendung einzeln und steril in einer Folie verpackt.

Lagerdauer

ab Produktionstag
36 Monate haltbar

Lagertemperatur

4 bis 25 °C.

Handhabungsempfehlung



1 Vorsichtiges Öffnen der Verpackung



2 Befestigen des Halters durch sachte Drehbewegung am *weiblichen* Luer-Lock Anschluss



3 Blutentnahme



4 Entsorgung

Art. Nr.	Beschreibung	Verpackung	
		Innen	Außen
450210	VACUETTE® SAFELINK Halter mit <i>männlichem</i> Luer-Lock	100 Stk.	800 Stk.

¹ Infusion Therapy Standard of Practice, Revised 2016, www.ins1.org