



MiniCollect® Lancelino Sicherheitslanzetten

Intuitive Punktion macht den Unterschied



- ↳ Einfache Aktivierung durch Druck auf Punktionsstelle
- ↳ Ergonomisch abgerundetes Design für angenehmen Halt
- ↳ Punktgenaue Platzierung durch runde Auflagefläche
- ↳ Exakt vorgegebene Lanzettenlängen
- ↳ Mehrere Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen und Patienten
- ↳ Lanzette ist nach Verwendung sicher umschlossen

Handhabungskomfort gibt Sicherheit



- Auslösen erfolgt durch einfaches Platzieren und Drücken auf die Punktionsstelle.
- Exakt vorgegebene Nadel- und Klingenlängen.
- Das abgerundete Design sorgt für ein angenehmes Griffgefühl ohne Rillen oder Kanten.
- Die Handhabung ist einfach und intuitiv ohne großen Erklärungsaufwand.
- Sicher durch einmalige Verwendung.
- Je nach Ausführung der einzelnen Lanzetten mit Nadel oder Klinge ergeben sich unterschiedliche Einstichtiefen für die Verwendung bei kleinen und bei großen Patienten.
- Einfache optische Erkennung des jeweiligen Lanzetten-Typs samt dessen Einstichtiefe durch farbliche Differenzierung.
- Durch den automatischen Rückzug der Klinge/Nadel sind Verletzungen für den Anwender ausgeschlossen.

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Gebrauchshinweise.

Die vollständigen Handhabungshinweise finden Sie in der Gebrauchsanweisung 980939 unter www.gbo.com.



1 Entfernen des Schutzstiftes.



2 Auf Punktionsstelle drücken, bis die Lanzette auslöst.



3 Entsorgung.



4 Sanften Druck auf das umliegende Gewebe ausüben.

Artikelübersicht

Art. Nr.	Beschreibung	Blutvolumen	Verpackung	
			Innen	Außen
MiniCollect® Lancelino Sicherheitslanzetten mit Nadel (steril)				
450520	Sicherheitslanzette hellgrün, 30 G, Einstichtiefe 1,2 mm	●	200 Stk.	2000 Stk.
450521	Sicherheitslanzette lila, 25 G, Einstichtiefe 1,5 mm	●●	200 Stk.	2000 Stk.
450522	Sicherheitslanzette blau, 21 G, Einstichtiefe 1,8 mm	●●●	200 Stk.	2000 Stk.
450523	Sicherheitslanzette grün, 21 G, Einstichtiefe 2,4 mm	●●●●	200 Stk.	2000 Stk.
MiniCollect® Lancelino Sicherheitslanzetten mit Klinge (steril)				
450524	Sicherheitslanzette gelb, 0,8 mm, Einstichtiefe 2 mm	●●●●●	200 Stk.	2000 Stk.
Produktmusterset und Werbegeschenk				
980263	MiniCollect® Lancelino Musterset (Deutsch)			
980262	MiniCollect® Lancelino Pflasterbriefchen + Tattoo für Kids (Give Away)			