

SICHERER ABWURF DER NADEL MIT EINEM KLICK



SPEEDY Röhrchenhalter

Der Speedy Röhrchenhalter gewährleistet einen sicheren und zuverlässigen Abwurf der gebrauchten Blutentnahmekanüle in einen Entsorgungsbehälter für scharfe/spitze Gegenstände. Der Halter wurde für den bis zu 100-fachen Gebrauch getestet.

Ein einfacher Druck auf den blauen Entriegelungsmechanismus am Halter gewährleistet eine einfache Entsorgung der Kanüle in die durchstichsichere Box – ohne die kontaminierte Nadel berühren zu müssen. Speedy ist eine sichere Alternative zu herkömmlichen Haltern.

- / Durch die automatische Rückstellung des Auslösemechanismus sind keine manuellen Handgriffe des Anwenders nötig
- / Bei Wiederverwendung: leichte Reinigung dank glatter Oberfläche
- / 100-fach bewährte Verwendung

WICHTIG ZU WISSEN.

Der Auslösemechanismus ist mit einer optischen Orientierungshilfe versehen, welche die korrekte Positionierung der Kanüle im Halter anzeigt.

Darüber hinaus zeigt ein Pfeil die Richtung für den Abwurf der Kanüle an.



Disclaimer: Greiner Bio-One empfiehlt dennoch ausdrücklich den einmaligen Gebrauch.



Speedy Röhrenhalter

Art. Nr.	UVP / VP [Stück]
450212	10 / 1.000

EMPFOHLENE HANDHABUNG

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung unter www.gbo.com.



1

Nach der Blutentnahme
den Speedy Röhrenhalter
vertikal mit der Kanülenspitze
nach unten halten.



2

Auslösemechanismus
drücken.



3

Die Kanüle wird sicher in
den Behälter abgeworfen.